

КРЕСЛО-СТУЛ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

Инструкция по эксплуатации



Модель: BWC-120

Благодарим Вас, что Вы приобрели кресло-стул с санитарным оснащением BWC-120 марки BRONIGEN. Кресло изготовлено из современных материалов, обеспечивающих надёжную и долгосрочную эксплуатацию. Складная конструкция проста в сборке и удобна для транспортировки и хранения кресла. Кресло-стул может быть использовано как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях в качестве переносного туалета.

Перед началом использования кресла-стула ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по применению, что поможет Вам использовать изделие наиболее эффективно.

Комплектация

- Кресло-стул, 1 шт.
- Санитарное судно, 1 шт.
- Пластиковое сидение с крышкой, 1 шт.
- Инструкция, 1 шт.

Назначение

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для облегчения ухода за тяжелобольными и инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Область применения

Кресла-стулья с санитарным оснащением используются как в стационарных медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Оказываемые эффекты

Кресла-стулья с санитарным оснащением позволяют пациентам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата более удобно совершать действия, связанные с отправлением естественных потребностей организма.

Принцип действия

Кресло-стул имеет складную конструкцию. Высота кресла-стула регулируется по высоте.

Пластиковое сидение с крышкой крепится на заднюю раму. При откидывании крышка служит дополнительной опорой для спины. Пластиковое санитарное судно легко снимается для опорожнения.

Противопоказания

Не выявлены.

Правила использования

- Соберите кресло-стул, как изображено на обложке.
- Установите необходимую высоту стула с помощью кнопочных фиксаторов на каждой ножке. Перед использованием убедитесь, что все ножки установлены на одинаковую высоту и заблокированы фиксатором.
- В случае хранения кресла-стула в холодном помещении перед креплением пластикового сидения и крышки необходимо сначала нагреть их до комнатной температуры, а затем зафиксировать на задней раме.
- После каждого использования туалета проводите санитарногигиеническую обработку судна и поручней кресла-стула.
- Ножки кресла-стула оснащены резиновыми насадками, снижающими эффект скольжения. В случае износа насадок необходимо заменить их на новые.

Правила ухода

- Для чистки кресла-стула используйте тёплую воду с нейтральным моющим средством. После чистки вытрите все детали насухо тряпочкой.
- Не применяйте растворители (спирт, ацетон и др.), а также сильнодействующие моющие средства.
- Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

Меры предосторожности

- Предохраняйте кресло-стул от ударов и повреждений.
- Не допускайте прикосновения кресла-стула к электрическим проводам.

Правила хранения

- Храните кресло-стул после использования в сухом чистом месте.
- Не подвергайте кресло-стул воздействию высокой температуры, влажности и пыли.
- Температура хранения кресла-стула от -20°C до +60°C.
- Оберегайте кресло-стул от воздействия прямых солнечных лучей.

Правила утилизации

Утилизация кресла-стула осуществляется по правилам утилизации лома, содержащего сталь, и отходов полимерных материалов, действующим на территории потребителя.



Технические характеристики

Вес (кг)	3,8
Максимальная нагрузка (кг)	137
Глубина сидения (см)	43
Ширина между поручнями (см)	50
Высота сиденья (см)	42 – 57
Габаритные размеры (Ш х Д х В, см)	57 x 49 x 62 (77)

Гарантии производителя

Гарантийный срок составляет 6 месяцев со дня продажи.

Срок службы кресел-стульев составляет не менее 3 лет.

Гарантия производителя распространяется на кресла-стулья при отсутствии повреждений вследствие удара, механического воздействия, несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию.

Торгующая организация

(название, адрес, контактный телефон)

Дата продажи

Печать торгующей организации

Подпись продавца

С условиями гарантии ознакомлен Подпись покупателя



Декларация о соответствии № РОСС DE.ИM24.Д00630 от 26.07.2011 г. выдана ООО «Центр сертификации и декларирования».

РУ № ФСЗ 2011/10203 от 19.07.2011 г.

выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ,

Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп»,

Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.