



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подушка ортопедическая
под спину
TRELAX® AUTOBACK

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОЦЕДУРЫ

КАЧЕСТВА

ГОСТ ISO 9001

2015

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОЦЕДУРЫ

КАЧЕСТВА

ГОСТ ISO 9001

2015

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОЦЕДУРЫ

КАЧЕСТВА

ГОСТ ISO 9001

2015

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОЦЕДУРЫ

КАЧЕСТВА

ГОСТ ISO 9001

2015

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОЦЕДУРЫ

КАЧЕСТВА

ГОСТ ISO 9001

2015

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОЦЕДУРЫ

КАЧЕСТВА

ГОСТ ISO 9001

2015

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОЦЕДУРЫ

КАЧЕСТВА

ГОСТ ISO 9001

2015

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОЦЕДУРЫ

КАЧЕСТВА

ГОСТ ISO 9001

2015


ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	1
2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	2
3. ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ.....	2
4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ....	2
5. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДУШКИ TRELAX AUTOVACK.....	2
6. СПОСОБ ПОДБОРА.....	3
7. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
8. СОСТАВ.....	3
9. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
10. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	4
11. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ.....	4
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	5
13. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	5
14. СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	5
15. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	6
16. РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX.....	7

Ортопедическая подушка под спину TRELAX AUTOBACK предназначена для повышения комфорта автомобильных сидений.

Подушка AUTOBACK мягко поддерживает поясницу и компенсирует продольные и поперечные нагрузки на пояснично-крестцовый отдел позвоночника, возникающие при длительном сидении во время вождения автомобиля.

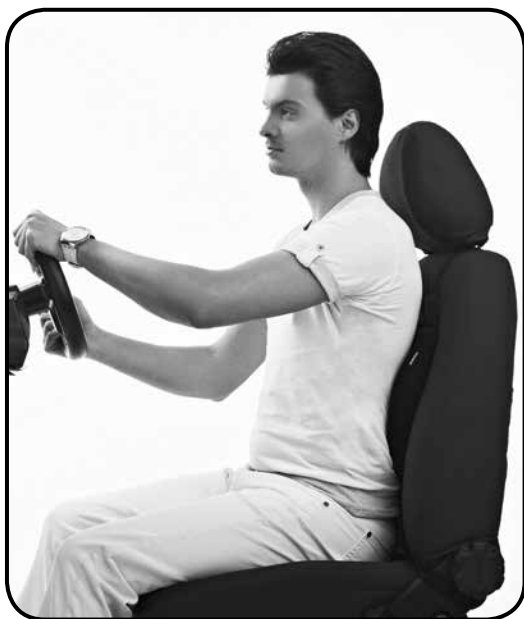

Наименование	Артикул	Размер, см
AUTOBACK	П12	25x29x6

Показания к применению

- Изделие используется для профилактических и лечебных целей. При использовании изделия в лечебных целях необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.
- Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время длительного сидения.
- Профилактика возникновения болей в нижней части спины при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника.
- Профилактика развития остеохондроза в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника.
- Комплексная терапия остеохондроза нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника.
- Устранение мышечного дисбаланса в области поясницы в результате сколиоза.
- Комплексная реабилитация после травм и заболеваний нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника.
- Поддержка поясничного отдела позвоночника при длительном сидении.

Лечебные эффекты

- Обеспечение физиологически выгодного положения нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника во время длительного сидения.
- Правильная поддержка поясницы с обеспечением ровного (по вертикали) положения позвоночника.
- Нормализация тонуса мышц нижней трети грудного отдела и поясницы.
- Уменьшение объема движений в поясничном отделе позвоночника.

Ограничения и противопоказания к применению

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Преимущества подушки TRELAX AUTOBACK

- Профиль подушки AUTOBACK позволяет удобно поддерживать поясничный отдел позвоночника.
- Конструкция подушки обеспечивает максимальную площадь опоры для поясницы.
- Форма подушки стабилизирует правильный изгиб поясницы.
- Упругая структура изделия снимает напряжение в мышцах, способствует поддержанию оптимальной величины поясничного лордоза.

- ☰ Гарантированное сохранение формы на протяжении не менее 3-х лет ежедневного использования.
- ☰ Полная комплектация (основа, съемный чехол, ремень для фиксации подушки в двух положениях).
- ☰ Легкость ухода за подушкой (нет необходимости стирать подушку целиком).

Способ подбора

Подушка AUTOBACK имеет универсальный размер и не требует специального подбора. Использование подушки AUTOBACK возможно во всех типах автомобильных кресел.

Способ применения

Подушку AUTOBACK размещают на кресле так, чтобы максимальный выступ валика располагался на уровне поясничного изгиба позвоночника.



Для крепления к спинке кресла на подушке имеются два фиксирующих эластичных ремня.

Состав





Основа — эластичный пенополиуретан.


Чехол — 100% полиэстер.

Комплектность


Основа, съемный чехол с ремнями для фиксации, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.


Уход за изделием

- 
 Съемный чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим).
- 
 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- 
 Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50°C.
- 
 Глажение при температуре 110°C.

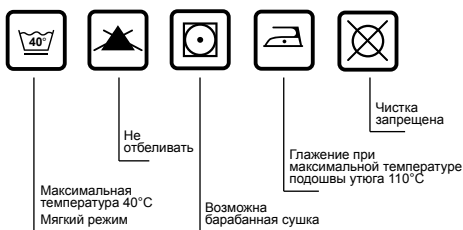

Характеристики материалов

- 
 Эластичный пенополиуретан изготавливается способом горячего формования, благодаря чему подушка имеет качественную ровную поверхность и правильную симметричную форму. Эластичный пенополиуретан мягко и надежно поддерживает спину при длительном сидении во время вождения автомобиля. Оптимально подобранная плотность пенополиуретана обеспечивает длительный срок службы подушки и гарантирует сохранность формы в течение 3-х лет.

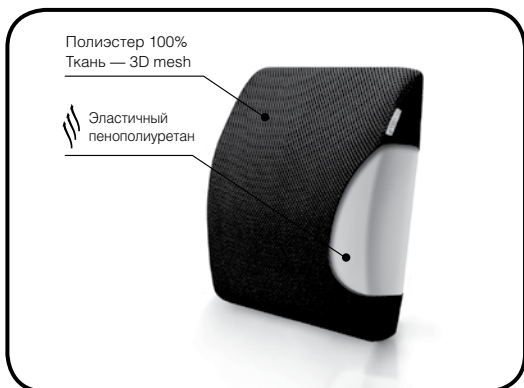

- Съемный чехол изготовлен из ткани 3D-mesh. Ткань 3D-mesh обладает высокой прочностью и износостойкостью. Основным ее преимуществом является хорошая гигроскопичность и высокая воздухопроницаемость.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на подушку — 3 года со дня продажи.
- Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.
- Возможен период привыкания к подушке, но не более 2-х недель.
- Гарантия на чехол: 6 месяцев со дня выдачи потребителю.
- Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.
- Для предотвращения деформации подушку нужно использовать согласно инструкции, не скручивать, не складывать.
- Срок службы — не менее 3-х лет.
- При использовании подушки свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта. Не рекомендуется использовать подушку более 10 лет.
- Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки AUTOBACK.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Подушка ортопедическая TRELAX под спину,
арт. П12, AUTOBACK**

ТУ № 9396-003-88419706-2008

Аттестация по Высшей категории качества с правом маркировки продукции знаком «Аттестат качества» сроком на 2 года № 02-04-018 от 19.06.2013 г.

Сертификат соответствия № SSAQ 001.3.2.0031, удостоверяющий систему менеджмента качества применительно к разработке и производству ортопедических изделий. Соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485:2011 «Изделия медицинские. Система менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования»



Товар является медицинским изделием

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04606 от 15.04.2009 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия не ограничен

Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ41.Д00004 (с 30.01.2012 г. по 30.01.2015 г.) выдана ООО «Центр сертификации и декларирования»

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ TRELAX RESPECTA

предназначена для полноценного отдыха подростков и взрослых. Технология памяти формы, реализованная в изделии, позволяет избежать негативного эффекта привыкания к подушке и с первого дня почувствовать высокую степень комфорта и профилактический эффект. Подушки под голову успешно используют для профилактики остеохондроза, головных болей, при повышенном тонусе мышц шеи и спины, в комплексе реабилитационных мер после травм шейного отдела позвоночника.



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАЦЫ TRELAX

предназначены для сна и дневного отдыха, устранения дискомфорта в постели, предупреждения развития и лечения заболеваний позвоночника (сколиозов, радикулитов, остеохондрозов, спондилоартритов, болевых ощущений в области спины). Ежедневный отдых и сон на ортопедическом матрасе помогает снять утомление мышц спины, обеспечивает максимальный отдых и мягкий массаж всего тела во время ночного сна.

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ TRELAX DIVA

предназначена для использования во время отдыха в автомобиле, самолете, поезде, дома и в офисе. Подушка разгружает мышцы шейно-воротниковой зоны, позволяет сохранить бодрость и хорошее самочувствие, поддерживает оптимальное положение шеи.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ TRELAX ОПТИМА ВАВУ

используется для профилактики заболеваний шеи, формирования и поддержания правильного изгиба шейного отдела позвоночника, в период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника, при повышенном тонусе мышц шеи и верхней части спины (включая кривошею), в случае нестабильности позвонков шейного отдела позвоночника, при наличии признаков остеохондроза в детском и подростковом возрасте. Подушка предназначена для использования детьми с длиной надплечья от 7 до 9 см.

Рекомендуем



МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ TRELAX НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ

МОДЕЛИ «Классик» и «Люкс»

предназначены для повышения комфорта автомобильных кресел, профилактики остеохондроза, радикулита, болей и тяжести в спине во время вождения автомобиля.

За счет наполнителя в виде полимерных шариков матрас на автомобильное сиденье обеспечивает массажный эффект и повышает тонус мышц, что делает вождение автомобиля более приятным и комфортным.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Производитель:
ООО «ТРЕЛАКС»

Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4

www.trelaxorto.ru

Арт.: INTTC-П112-N6_03/14