

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Orlett®
вернет радость движения

Инструкция по применению ортопедических изделий



Бандажи на брюшную стенку

AB-309, AB-412

Бандажи на грудную клетку

AB-206(W), AB-206(M)

Medical Line



Бандажи Orlett медицинские на брюшную стенку, арт. АВ-309, АВ-412

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандажи Orlett медицинские на брюшную стенку, арт. АВ-309, АВ-412 обеспечивают легкую степень фиксации и поддержку передней брюшной стенки за счет нерастяжимого пелота, совмещаемого с проблемным участком, и натяжения эластичного материала, опоясывающего туловище. Способствуют формированию послеоперационного рубца, в том числе и глубокого (мышечного) за счет защиты и разгрузки соединительнотканного и мышечного аппарата передней брюшной стенки.

Модель Orlett, арт. АВ-412 отличается от модели арт. АВ-309 высотой. Высота модели Orlett, арт. АВ-309 – 23 см, арт. АВ-412 – 30 см.

Для удобства фиксации бандажи больших размеров модели Orlett, арт. АВ-309 и арт. АВ-412, начиная с размеров XL, снабжены двойным правым клапаном.

Показания к применению:

- ранняя мобилизация после операций на органах брюшной полости, включая кесарево сечение;
- профилактика образования послеоперационных грыж передней брюшной стенки (при слабости мышц, после больших разрезов);
- профилактика ущемления вправляемых послеоперационных грыж, грыж белой линии живота, пупочных грыж;
- может назначаться в период восстановления после нормальных родов, в качестве поддержки при опущении внутренних органов брюшной полости, почек, ожирения 3–4 степени (для подтяжки живота и улучшения силуэта в эстетических целях), при реабилитации после липосакции передней брюшной стенки, после пластических операций.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- беременность;
- диафрагмальные грыжи;
- невправимые грыжи брюшной стенки;
- синдром портальной гипертензии.

Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача;
- людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Инструкция по применению

Конструкция бандажей:

Бандаж Orlett на переднюю брюшную стенку, арт. АВ-309 (рис. 1) и бандаж Orlett на переднюю брюшную стенку, арт. АВ-412 (рис. 2) состоят из:

1. эластичного пояса с застёжками-липучками «Велкро»;
2. нерастяжимого пелота.

Порядок надевания:



рис.1

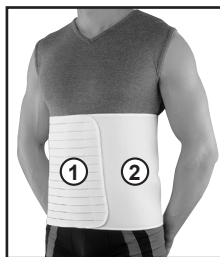


рис.2

Бандажи Orlett, арт. АВ-309, АВ-412 надевают в положении лёжа перед подъемом с постели. Нерастяжимый пелот должен располагаться в области послеоперационного рубца или грыжевого выпячивания. При необходимости грыжевое выпячивание предварительно вправляется.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать бандаж слишком сильно, во избежание избыточного давления на ткани и нарушения кровообращения.

Правила подбора:

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измеряется окружность талии (рис. 3).

Согласно полученным результатам подбирается необходимая модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

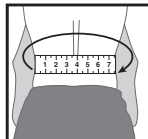


рис.3

Таблица подбора размеров:

Бандажи Orlett на брюшную стенку, арт.: АВ-309, АВ-412	
Размер	Окружность талии (см)
XS	до 75
S	75-85
M	85-95
L	95-105
XL	105-120
XXL	120-135
XXXL	более 135

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Бандажи медицинские на грудную клетку, арт. АВ-206(W), АВ-206(M)

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандаж Orlett на грудную клетку, женский арт. АВ-206(W), и бандаж Orlett на грудную клетку, мужской, арт. АВ-206(M) обеспечивают легкую степень фиксации, мягкую поддержку и равномерное сдавливание грудной клетки после травм и операций. Способствуют уменьшению риска развития осложнений, облегчают состояние пациентов при миалгиях, миозитах и межреберных невралгиях.

В женской модели Orlett, арт. АВ-206(W) предусмотрен вырез в области груди.

Показания к применению:

- миалгии, миозиты и межреберные невралгии;
- реабилитационный период после травм и операций на грудной клетке.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- «окончатые» переломы ребер;
- напряженный гемо- или пневмоторакс.

Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача;
- людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее бельё, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Инструкция по применению бандажей

Бандаж Orlett на грудную клетку, женский, арт. АВ-206 (W) (рис. 4) и бандаж Orlett на грудную клетку, мужской, арт. АВ-206 (M) (рис. 5) состоят из:

1. эластичного пояса;
2. застёжки-липучки «Велкро».



рис.4



рис.5

Порядок надевания:

Бандаж надевают на область грудной клетки в состоянии нефорсированного (неполного) выдоха.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать бандаж слишком сильно, во избежание нарушения дыхания.

Правила подбора:

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измеряется окружность грудной клетки на уровне подмышечных впадин (рис. 6).

Согласно полученным результатам подбирается необходимая модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

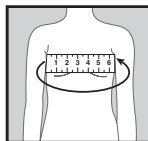


рис.6

Таблица подбора размеров:

Бандажи Orlett на грудную клетку, арт. АВ-206(W), АВ-206(M)	
Размер	Окружность грудной клетки (см)
S	до 82
M	82-96
L	96-110
XL	110-124
XXL	более 124

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



Состав изделий:

Бандажи Orlett, арт. АВ-309, АВ-412: 15% вискоза, 10% полиуретановый поролон, 10% нейлон, 40% полиэстер, 10% хлопок, 15% спандекс.

Бандажи Orlett, арт. АВ-206(W), АВ-206(M): 18% спандекс, 22% нейлон, 60% полиэстер.

Условия хранения:

Бандажи должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандажи утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

Комплектность:

Бандаж Orlett AB-309: ортопедическое изделие арт. АВ-309, инструкция по применению.

Бандаж Orlett AB-412: ортопедическое изделие арт. АВ-412, инструкция по применению.

Бандаж Orlett AB-206(W): ортопедическое изделие арт. АВ-206(W), инструкция по применению.

Бандаж Orlett AB-206(M): ортопедическое изделие арт. АВ-206(M), инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 30.12.2011 г.
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ32.Д00175 от 11.01.2012 г.
выдана ЗАО «Центр Экспертизы Качества»

Производитель: Рехард Технолоджис ГмБХ

Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д.14, стр. 1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.