

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ И СТОПУ

AFO-101

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез Orlett на голеностопный сустав и стопы (ортез-стоподержатель), арт. AFO-101, удерживает стопу в физиологически правильном положении и способствует восстановлению нормального (естественного) стереотипа ходьбы.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Синдром отвисающей стопы после:

- перенесенных невритов;
- повреждений малоберцового нерва при травмах;
- инсультов;
- травм спинного мозга;
- детского церебрального паралича;
- нейроинфекции и опухолей спинного мозга.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза;
- сгибательные (разгибательные) контрактуры голеностопного сустава (т.е. в направлении подошвы стопы).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться у врача.

Людам с чувствительной кожей следует надевать ортез на хлопчатобумажный носок, плотно прилегающий к телу или эластичный бандаж легкой степени фиксации (например, эластичный бандаж Orlett на голеностопный сустав).

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

КОНСТРУКЦИЯ



Цифры на рисунке соответствуют следующим элементам конструкции:

1. пластиковая гильза стоподержателя;
2. фиксирующий на голени ремень с застежками-липучками велкро;
3. фиксирующий ремень на область стопы или лодыжки.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Ортез надевают на хлопчатобумажный носок.

1. Разместите стопу на гильзе ортеза и зафиксируйте на голени регулируемым ремнем с застежками-липучками велкро.
2. Дополнительно зафиксируйте гильзу фиксирующим ремнем на стопе либо над лодыжками.
3. Поместите стопу с ортезом в обувь.

ВНИМАНИЕ!

Ортез предназначен для ношения в обуви!

ПРАВИЛА ПОДБОРА

Ортез-стоподержатель Orlett подбирается по размеру обуви, на левую или на правую ногу.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Размер обуви
S	35-37
M	38-40
L	41-43
XL	44-47

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Для ортеза предусмотрена влажная обработка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

65% полипропилен, 30% полиамид, 5% этиленвинилацетат.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. AFO-101, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01697 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

