

(При заказе сменных частей рекомендуем Вам приобрести запасные сменные части BRONIGEN)

- Сменные наконечники, изготовленные из высокопрочной резины, амортизируют ударную нагрузку и предотвращают скольжение костыля.
 - Мягкие сменные насадки в области подмышек и в области кисти имеют эргономичную форму, облагораживают амортизирующими свойствами и комфортом при эксплуатации.
 - Костыль выдерживает нагрузку до 130 кг.
 - Облегченный каркас из алюминия нового сплава обеспечивает удобство и надежность в использовании.
 - Пользователя и подходит для пользователей ростом от 140 до 200 см.
 - Костыль регулируется по высоте в соответствии с индивидуальными ростовыми характеристиками:
- Данная модель изготовлена по современным технологиям из высококачественных материалов. Все изделия BRONIGEN разработаны и произведены с любовью и заботой о Вас и Ваших близких.

Мы благодарим Вас за выбор изделия BRONIGEN (Германия)


Уважаемый покупатель!



Костыль подмышечный BMC-110
(при росте от 140 до 200 см)

Инструкция по регулировке высоты


Почередно аккуратно потяните красные пластиковые фиксаторы опоры кисти перпендикулярно оси костыля до щелчка. Не перекашивайте фиксаторы, не снимайте их с костыля. Оставьте фиксаторы в этом положении до Шага 4.

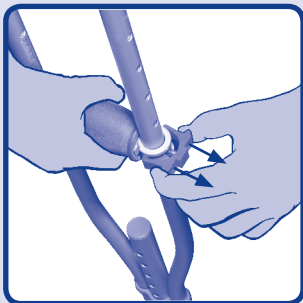


Шаг 1

Отрегулируйте высоту нижней части костыля в соответствии с ростом пользователя.

Для этого переверните костыль нижней частью вверх и, нажимая одной рукой на кнопочный фиксатор (1) нижней части костыля, другой рукой захватите резиновый наконечник (2) и перемещайте (вверх или вниз) эту часть костыля (3) до установки кнопочного фиксатора (1) на указателе, соответствующем росту пользователя.

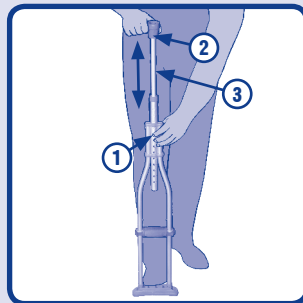


Шаг 2

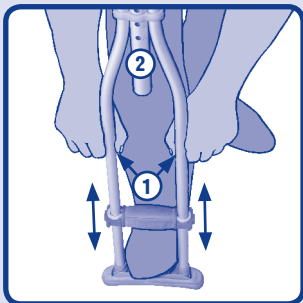

Шаг 3

Отрегулируйте высоту верхней части костыля в соответствии с ростом пользователя.

Для этого, прижимая стопой костыль к полу, нажмите одновременно на два кнопочных фиксатора верхней части (1) и, удерживая их, перемещайте (вверх или вниз) верхнюю часть костыля (2) до установки кнопочных фиксаторов на указателе, соответствующем росту пользователя. Указатель роста расположен рядом с кнопочными фиксаторами (1).

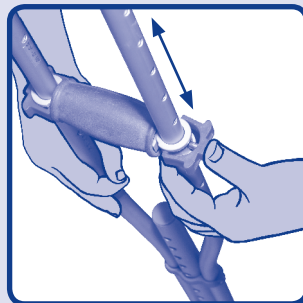

Шаг 4

Отрегулируйте высоту опоры для кисти.

Для этого переверните костыль верхней частью вверх и свободно переместите опору для кисти на высоту, удобную для пользователя. Зафиксируйте опору на месте с помощью красных пластиковых фиксаторов. Для этого нажмите пальцем на торцы фиксаторов до щелчка.