

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



Условия хранения:

Реклинатор должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Реклинатор утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не установлен. Возможность использования реклинатора дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с

врачом. Не допускается прекращение использования реклинатора без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции реклинатора. Не допускается эксплуатация поврежденного реклинатора.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. CS-150, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции и правил эксплуатации реклинатора.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
РУ № ФСЗ 2011/09549 от 12.04.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ24.Д00208 от 15.04.2011 г.

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ,
Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.

Арт. INTOK-CS-150-N6_02/12




Medical Line



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Orlett®
вернет радость движения

Инструкция по применению ортопедических изделий

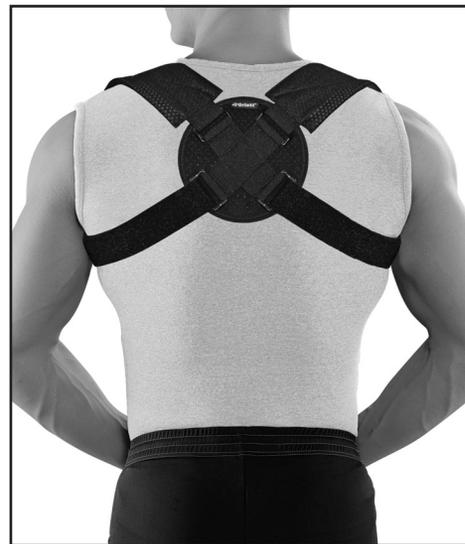

Реклинатор ортопедический
CS-150

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Реклинатор Orlett, арт. CS-150 фиксирует (компенсирует недостаточность связочного аппарата) плечевые суставы в положении отведения кзади (реклинация), частично или полностью снимает напряжение мышц ключичной области, оказывает незначительное реклинирующее воздействие (отведение) на область верхнегрудного отдела позвоночника, уменьшает объем движения лопаток.

Показания к применению:

- состояния после травм ключицы при консервативном лечении на всех сроках реабилитации;
- состояния после оперативного лечения травм ключицы;
- нарушения осанки с проявлениями на уровне верхнегрудного отдела позвоночника;
- заболевания и состояния, связанные с необходимостью отведения или фиксации плечевых суставов;
- повреждения и заболевания акромиально-ключичного сочленения;
- остеопороз, остеохондроз верхнегрудного отдела позвоночника, спондилопатии легкой степени.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения реклинатора назначает лечащий врач.

Противопоказания:

Не выявлены.

Предупреждения:

- людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться с врачом;
- людям с чувствительной кожей следует надевать реклинатор на нательное белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Инструкция по применению

Конструкция реклинатора

Цифры на рис.1 соответствуют следующим элементам конструкции:

1. пелот;
2. фиксирующие наплечные ремни с трехлестковой застежкой-липучкой «Велкро»;
3. мягкие муфты.

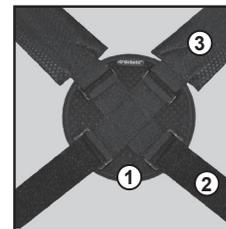


Рис. 1

Порядок надевания:

Реклинатор надевать непосредственно на тело или на майку.

1. Круглый пелот наложить на межлопаточную область.
2. Фиксирующие ремни продеть в пряжки, расположенные в пелоте
3. Наплечные ремни натянуть и зафиксировать с помощью застежек-липучек «Велкро» в положении, обеспечивающем разведение плеч.



Правила подбора:

Размер	По обхвату грудной клетки (см)
S/M	до 100
L/XL	более 100

Состав изделия:

40% полиэстер, 30% нейлон, 15% этилен винил ацетат, 13% пенополиуретан, 2% спандекс