# Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°С. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



#### Состав изделия:

14% полиэстер, 28% эластик, 18% лайкра, 13% хлопок, 27% суперлуп.

#### Условия хранения:

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

# Условия утилизации:

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

## Срок годности:

Срок годности не установлен. Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 30.12.2011 г. выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ32.Д00175 от 11.01.2012 г. выдана ЗАО «Центр Экспертизы Качества»

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ,

Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.

лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

#### Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. HP-B(P), инструкция по применению.

#### Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

# Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.


Арт. INTOK-HP-B(P)-N6\_02/12







# Инструкция по применению ортопедических изделий

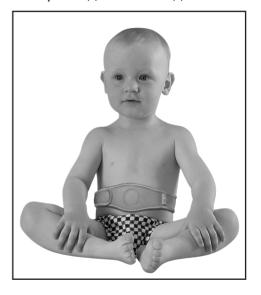

Бандаж для удержания пупочного грыжевого дефекта HP-B(P)

#### Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандаж Orlett ортопедический для удержания пупочного грыжевого дефекта, детский, предназначен для фиксации грыжевого содержимого в брюшной полости и защиты грыжи от ущемления.

#### Показания к применению:

- консервативное лечение пупочных грыж у детей до 3-х лет;
- профилактика выпадения и ущемления грыжевого мешка.

#### Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

#### Противопоказания:

Невправимая пупочная грыжа.

#### Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача;
- при наличии у ребенка заболеваний кожи, перед применением бандажа, необходима консультация врача;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

## Конструкция бандажа:

Бандаж Orlett ортопедический для удержания пупочного грыжевого дефекта, детский изготовлен из гипоаллергенных, биологически инертных материалов.

#### На рис. 1 отмечены следующие элементы конструкции:

- 1. пояс с застежкой-липучкой «Велкро»;
- 2. пелот для удержания грыжевого содержимого в брюшной полости.



Рис. 1

#### Порядок надевания:

Бандаж одевается лежа на спине, после вправления грыжевого выпячивания.

- 1. расположить полужесткий пелот так, чтобы он находился над областью пупка;
- 2. закрепить пояс при помощи застежек-липучек «Велкро».

# Правила подбора:

Размер универсальный.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.