



## Инструкция по применению ортопедических изделий



Medical Line

### Условия утилизации:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

### Срок службы:

Срок службы не установлен. Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

### Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. НВ-300, инструкция по применению.

### Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

### Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13846 от 21.09.2012 г.  
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения  
Декларация о соответствии № РОСС RU.МЕ20.Д01220 от 27.09.2012 г.  
выдана Органом по сертификации «Сертиформ ВНИИНМАШ»  
**Производитель:** ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4  
**Для корреспонденции:** Россия, 127220, Москва, а/я №60.

**Дата изготовления и упаковывания:**

Арт.: INTOK-НВ-300-Н1\_02/13

**Бандаж-суспензорий  
НВ-300**

### **Свойства товара (оказываемые эффекты):**

Бандаж-суспензорий для удержания пахового грыжевого дефекта, арт. НВ-300, обеспечивает физиологически правильное положение органов мошонки, способствует нормализации крово- и лимфообращения, сокращает сроки консервативного лечения, предупреждает развитие послеоперационных осложнений. Изделие обеспечивает легкий компрессионный и поддерживающий эффект органов мошонки, обеспечивает удобный доступ для осуществления медицинских манипуляций: перевязка, смена компресса, физикальное исследование, осмотр.

### **Показания к применению:**

- после операций на органах мошонки для профилактики отека;
- как вспомогательное средство при консервативной терапии орхитов и орхоэпидидимитов;
- после операций по поводу паховой грыжи;
- при консервативном лечении травм органов мошонки.

### **Режим и сроки ношения:**

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

### **Противопоказания:**

- индивидуальная непереносимость материалов.

### **Предупреждения:**

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования бандажа.

### **Конструкция бандажа:**

Бандаж-суспензорий, для удержания пахового грыжевого дефекта, состоит из (рис. 1):

1. Бандаж-суспензорий.
2. Клапан.

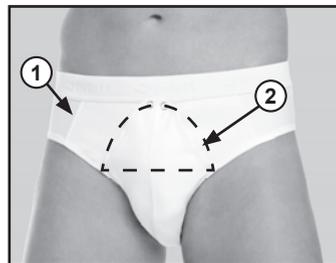


Рис. 1

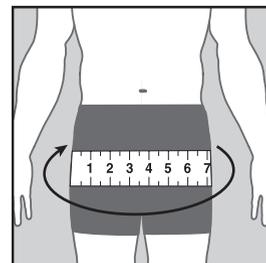


Рис.2

### **Порядок надевания:**

Бандаж-суспензорий надевается на обнаженное тело аналогично нижнему мужскому белью. При этом клапан суспензория располагается спереди. При необходимости обеспечения осмотра и медицинских манипуляций в области мошонки, клапан суспензория следует отстегнуть и отвернуть.

### **Правила подбора:**

Для корректного подбора бандажа Orlett, арт. НВ-300 необходимо измерить сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, окружность бедер на уровне, где тазовые кости выступают наиболее выражено (рис. 2). Согласно полученным результатам подобрать бандаж Orlett по таблице подбора размеров.

### **Таблица подбора размеров:**

Размер	Размер одежды	Окружность бедер (см)
XS	40-42	88-90
S	44-46	91-96
M	48-50	97-104
L	52-54	105-112
XL	56-58	113-120
XXL	60-62	121-128
XXXL	64-66	129-136

Для того, чтобы проверить правильность выбора бандажа, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

### **Правила ухода:**

Изделие необходимо стирать по мере загрязнения, желательно ежедневно. Изделие можно подвергать машинной стирке при температуре не выше +40°C (деликатный режим).

Не использовать отбеливатели и органические растворители. Возможна барабанная сушка не выше 50°C. Глажение при температуре 110°C.



### **Состав изделия:**

Эластан 22%, полиамид 78%.

### **Условия хранения:**

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.