



Orlett®
вернет радость движения

Инструкция по применению ортопедических изделий



**Бандаж-протектор
тазобедренного сустава
НРО-100 (мужской)
НРО-101 (женский)**

Правила ухода:

Бандаж (протектор) нуждается в регулярном гигиеническом уходе. Подковообразные вставки перед стиркой вынимаются и вставляются обратно в карманы уже выстиранного и высушенного бандажа.

Изделие можно подвергать машинной стирке при температуре не выше +40°C (деликатный режим). После стирки тканевую часть сушить в проветриваемом месте, избегая прямого солнечного света и не прибегая к электронагревательным приборам и искусственным источникам тепла. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50°C. Глажение при температуре 110°C.



Состав изделия:

Хлопок 80%, полиэстер 16%, вспененный полиэтилен 4%.

Условия хранения:

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не менее 1 года со дня продажи. Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

Комплектность:

Бандаж Orlett, арт. НРО-100: ортопедическое изделие арт. НРО-100, инструкция по применению.

Бандаж Orlett, арт. НРО-101: ортопедическое изделие арт. НРО-101, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев со дня продажи. Гарантия действительна только при использовании и хранении продукции в соответствии с инструкцией. Перед началом использования изделие необходимо постирать.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13846 от 21.09.2012 г.

выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения

Декларация о соответствии № РОСС RU.МЕ20.Д01220 от 27.09.2012 г.

выдана Органом по сертификации «Сертиформ ВНИИИМАШ»

Производитель: ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.

Дата изготовления и упаковывания:



Medical Line

Арт.: INTOK-НРО-100/НРО-101-N_02/13

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандаж (протектор) за счет специальных эластичных подковообразных пластин, выполненных из этилацетатвинила (EVA), обеспечивает анатомическое позиционирование тазобедренных суставов и защиту проксимальных отделов бедренных костей и тазовых костей в области вертлужных впадин от повреждений (при падениях, ушибах, толчках) за счет демпфирования прямого механического воздействия на область тазобедренного сустава.

Бандаж (протектор) обеспечивает максимальную защиту шейки бедра для пожилых людей (старше 60 лет), при остеопорозе I-II степени, после операций на тазобедренном суставе и проксимальном отделе бедра.

Показания к применению:

- профилактика переломов вертлужной впадины, шейки бедра у лиц пожилого возраста, особенно при наличии признаков остеопороза;
- период реабилитации после эндопротезирования и реэндопротезирования тазобедренного сустава;
- трохантериты и болевые синдромы в области тазобедренных суставов, в т.ч. при коксартрозах.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов.

Предупреждения:

Обязательно необходима консультация лечащего врача в случаях:

- остеопороза III-IV степени;
- онкологических заболеваний с метастазами в проксимальный отдел бедра и/или тазовые кости.

Конструкция бандажа:

Бандаж (протектор) на тазобедренный сустав, выполнен как удлиненные шорты с боковыми карманами, в которых помещены упругие вставки подковообразной формы, расположенные в проекции тазобедренных суставов. Этилвинилацетат абсолютно прозрачный материал, позволяет выполнять все виды лучевой диагностики, не снимая изделия.

Бандаж (протектор) на тазобедренный сустав, мужской, арт. НРО-100 (рис. 1) и бандаж (протектор) на тазобедренный сустав, женский, арт. НРО-101 (рис. 2) состоят из:

1. Удлиненные шорты с боковыми карманами;
2. Две эластичные подковообразные пластины.

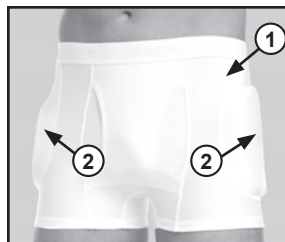


Рис. 1



Рис. 2

Порядок надевания:

Рекомендуется надевать бандаж (протектор) на тазобедренный сустав поверх нижнего белья, но допускается ношение и на обнаженное тело.

Бандаж (протектор) надевают аналогично шортам или трусам.

ВНИМАНИЕ!

Пред надеванием необходимо убедиться, что подковообразные пластины расположены в карманах максимально глубоко, т.е. соприкасаются с нижними швами карманов.

Правила подбора:

Для корректного подбора бандажа Orlett, арт. НРО-100, арт. НРО-101, необходимо измерить сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, окружность бедер (рис. 3).

Согласно полученным результатам подобрать бандаж Orlett по таблице подбора размеров.

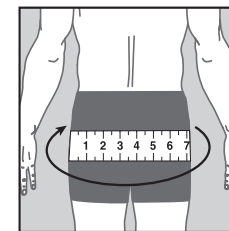


Рис. 3

Таблица подбора размеров:

Размер	Окружность бедер у женщин (см)	Окружность бедер у мужчин (см)
XS	86-93	88-90
S	94-101	91-96
M	102-109	97-104
L	110-117	105-112
XL	118-125	113-120
XXL	126-133	121-128
XXXL	134-141	129-136

Для того, чтобы проверить правильность выбора бандажа, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.