

Правила ухода:

Перед стиркой вынуть металлическую/пластиковую шину. Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить, не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. После стирки металлическую/пластиковую шину вставить на прежнее место.

Состав изделия:

Orlett, арт. RWR-102: 60% неопрен, 23% полиэстер, 15% нейлон, 2% спандекс.

Условия хранения:

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.



Условия утилизации:

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 30.12.2011 г.
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ32.Д00175 от 11.01.2012 г.
выдана ЗАО «Центр Экспертизы Качества»

Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ24.Д00209 от 15.04.2011 г.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ,
Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.

Срок службы:

Срок службы не установлен. Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. RWR-102, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Инструкция по применению ортопедических изделий



**Бандаж на лучезапястный сустав
(с поддержкой первого пальца)
RWR-102**

Medical Line



Арт. INTOK-RWR-102-N2_02/12

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандаж на лучезапястный сустав (с поддержкой первого пальца), арт. RWR-102 фиксирует лучезапястный сустав и стабилизирует положение первого (большого) пальца руки в функционально правильном положении. В конструкции бандажа предусмотрена возможность замены пластиковой шины для первого пальца на металлическую для более сильной фиксации пястно-запястного сустава в положении отведения.

Показания к применению:

- фиксация пястно-запястного и первого пястно-фалангового суставов при повреждениях локтевой коллатеральной связки;
- ушибы, растяжения связок, вывихи пястно-запястного и первого пястно-фалангового суставов;
- нестабильность пястно-запястного сустава первого пальца;
- артрозы, артриты пястно-запястного сустава первого пальца (сустава большого пальца);
- реабилитация после оперативных вмешательств на запястно-пястных и первом пястно-фаланговом суставах;
- профилактика повторных травм связочно-суставного аппарата пястно-запястного и первого пястно-фалангового суставов.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

Противопоказания:


Не выявлены.

Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования бандажа.

Конструкция бандажа на лучезапястный сустав (с поддержкой первого (большого) пальца), арт. RWR-102:

1. Манжета с застежкой-липучкой «Велкро» для фиксации бандажа на запястье в оптимальном положении.
2. Металлическая шина с возможностью моделирования.
3. Пластиковая шина.
4. Карман для металлической/пластиковой шины.
5. Манжета с застежкой-липучкой «Велкро» для большого пальца кисти.

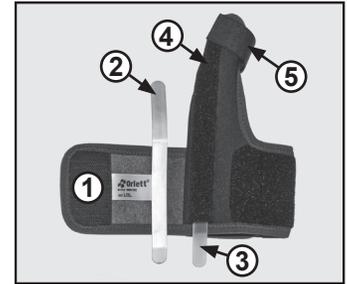

Порядок надевания:

1. Поместите пластиковую, либо металлическую шину в карман для металлической/пластиковой шины.
2. Поместите большой палец руки в манжету для большого пальца.
3. Застегните поочередно манжеты с помощью застежек – липучек «Велкро» на большом пальце и запястье.

ВНИМАНИЕ!

Выбор шины (металлической или пластиковой) определяется рекомендацией лечащего врача. Металлическая шина, при необходимости, может быть дополнительно отмоделирована лечащим врачом.

Правила подбора:

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измерить окружность руки в области лучезапястного сустава.

Согласно полученному результату подобрать необходимый размер бандажа по таблице подбора размеров.

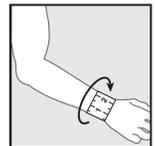


Таблица подбора размера:

Размер	Окружность лучезапястного сустава (см)
S/M	14-16
L/XL	16-22

ВНИМАНИЕ!

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.