Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.





40% полиуретановый поролон, 25% нейлон, 20% полиэстер, 15% хлопок.

Условия хранения:

Бандаж должен храниться при комнатной температуре. В сухих помещениях, вдали от источников тепла. прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. SI-301, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ24.В02193 от 14.01.2009 г. Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ. РУ ФС 2006/2376 от 28.12.2006 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.939.П.035067.09.05 от 21.09.2005 г.

Производитель:

Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 04158, Лейпциг, Фюгерштрассе 1.

Импортер:

ООО «Орто Медикл Групп». Россия, 127124. Москва. Бумажный пр-д. 14. стр.1. Для корреспонденции: Россия. 127220. Москва. а/я №60.



മ

C

٠,--0

a



Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ

Инструкция по применению ортопедических изделий



Бандаж на плечевой сустав и руку SI-301



Сделано в Германии

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандаж Orlett® на плечевой сустав и руку широко применяется для иммобилизации верхней конечности. В зависимости от сборки бандажа (с фиксацией к туловищу или без) оказывает поддержку руки или поддержку руки с фиксацией к туловищу.

Показания к применению:

- ушибы, вывихи и переломы плеча и локтевого сустава. неосложненные переломы ключицы:
- парезы и параличи верхней конечности:
- острые и хронические воспалительные заболевания суставов верхней конечности (артриты и артрозы плечевого сустава, плечелопаточные периартриты);
- реабилитация после травм и оперативных вмешательств на верхней конечности.



Рис 1

Режим и сроки ношения:


Режим и сроки ношения бандажа назначает лечаший врач.

Противопоказания:

Не выявлены

Предупреждения:

- необходимо проконсультироваться у врача;
- людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на майку с длинным рукавом, плотно прилегающую к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения бандажа.

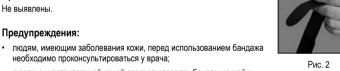

Инструкция по применению

Конструкция бандажа:

Шифры на рис.1 и 2 соответствуют следующим элементам конструкции:

- 1. Опорная муфта бандажа.
- 2. Наплечные лямки с фиксирующими застежками-липучками «Велкро».
- 3. Фиксирующий пояс.
- 4. Трехлепестковые застежки-липучки «Велкро».

Порядок надевания:

- 1. Наплечные ремни (2) закрепить на опорной муфте (1) с помощью застежек-липучек «Велкро» (4).
- 2. Отрегулировать длину наплечных ремней (2) так, чтобы при укладывании руки в муфту угол локтевого сгиба составил 90°. если иное расположение руки не предписано врачом. При необходимости ремни можно укоротить. для чего необходимо отлепить жесткую часть липучки «Велкро» (4) и отрезать ножницами лишнюю длину наплечных ремней (2).
- 3. Предплечье расположить в опорной муфте (1). Два наплечных ремня (2) перекрестить на спине и зафиксировать спереди на муфте с помощью застежек-липучек «Велкро».
- 4. Руку, при необходимости, зафиксировать к туловищу с помощью фиксирующего пояса с застежкой «Велкро» (3).

Правила подбора:

Для корректного подбора бандажа Orlett® на плечевой сустав и руку необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность грудной клетки вместе с прижатой к грудной клетке рукой (рис. 3).



Рис. 3

Согласно полученным результатом подобрать бандаж Orlett® по таблице подбора размеров.

Таблица подбора размеров:

Размер бандажа Orlett ®	Окружность грудной клетки с прижатой рукой
S/M	До 100 см
L/XL	Свыше 100 см