


Типы регулируемых шарниров, используемых
в различных моделях ортезов ORLETT®

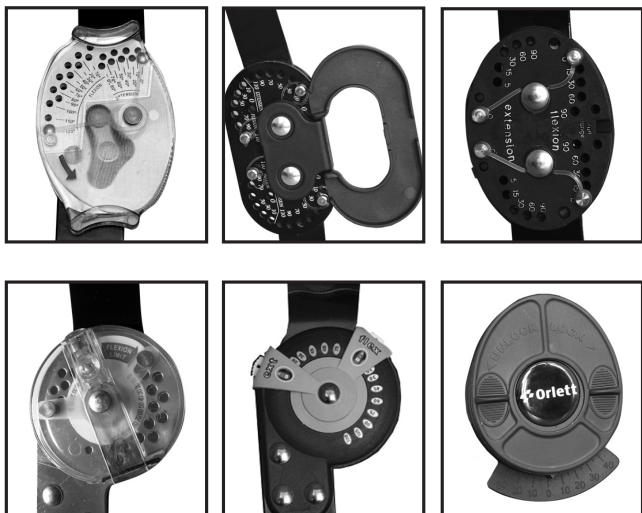


Сертификат соответствия №РОСС DE.ИМ24.В02193 от 14.01.2009 г.
Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ.
РУ ФС №2006/2376 от 28.12.2006 г.

Производитель: Рехард Технолджис ГмБХ, 04158, Лейпциг,
Фюгерштрассе 1, Германия
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп»,
Россия, 127993, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.

Арт. INTOK SO-303/RKN-381-N2

Инструкция по эксплуатации шарнира

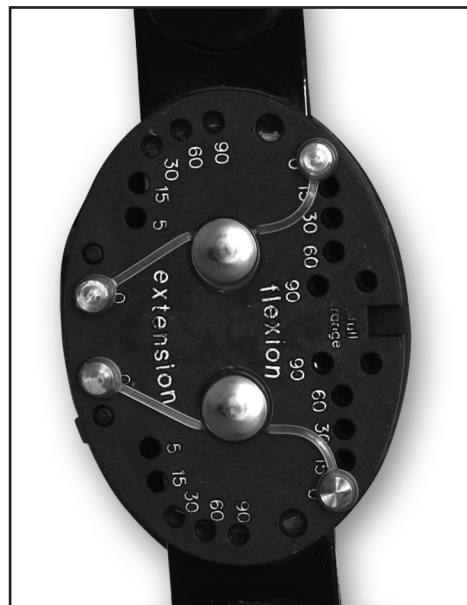

Артикулы ортезов, в которых
использован данный шарнир:

SO-303
RKN-381

Описание конструкции

Современный двусосный шарнир эффективно повторяет биомеханику движений в коленном суставе.

Конструкция шарнира позволяет регулировать объем движений или фиксировать углы сгибания и разгибания в значениях: 5, 15, 30, 60, 90 градусов.

Правила эксплуатации



1. Открыть защитную крышку.



2. С помощью четырех запорных стержней выставить требуемый угол фиксации или диапазон движений.



3. Закрыть защитную крышку. Медиальный и латеральный шарниры должны иметь одинаковый угол фиксации или заданный диапазон движения.

ВНИМАНИЕ!

Необходимые углы сгибания-разгибания или диапазон движений выставляются под контролем лечащего врача! Самостоятельное и бесконтрольное изменение установок шарнира пациентом недопустимо.