



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОДУШКА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
ПОД ГОЛОВУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ
TRELAX® RESPECTA BABY**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	2
2. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	3
3. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДУШКИ TRELAX RESPECTA BABY.....	3
4. СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
5. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	4
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ.....	5
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	6
8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	6
9. СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	6
10. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	7
11. РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX.....	8

Подушка с эффектом памяти под голову TRELAX RESPECTA BABY предназначена для полноценного сна и отдыха детей старше 3-х лет с длиной надплечья от 5 до 9 см. Технология памяти формы, реализованная в изделии, позволяет разгрузить шейный отдел позвоночника и нормализовать тонус мышц шеи. Подушка RESPECTA BABY мягко и бережно поддерживает голову и шею ребенка в функционально выгодном положении, создает оптимальные условия для комфортного и спокойного сна, а также способствует формированию красивой осанки.




**ВЫСОТА ВАЛИКОВ 6 И 8 СМ
(ОТ 3-Х ЛЕТ)**

Наименование	Артикул	Размер, см
Подушка с эффектом памяти под голову для детей старше 3-х лет, RESPECTA BABY	П25	27x38x8(6)






Правила использования

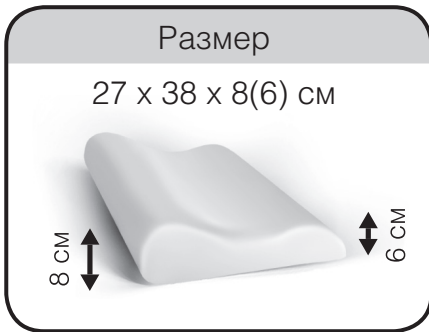Подушку RESPECTA BABY размещают во время сна так, чтобы шейный отдел позвоночника располагался на валике подушки.

В возрасте 3 лет для сна нужно использовать меньший валик, высотой 6 см. По мере роста ребёнка необходимо менять валик, располагающийся под шеей, на более высокий (8 см). Рекомендуется использовать более высокий валик при увеличении длины надплечья ребёнка свыше 7 см.



Преимущества подушки TRELAX RESPECTA BABY

-  Высота основания подушки подобрана с учетом физиологических особенностей детей этого возраста и обеспечивает правильное положение шейного отдела позвоночника во время сна.
-  Оптимальные размеры подушки 27 x 38 x 8(6) см.
-  Гарантированное сохранение формы на протяжении двух лет ежедневного использования.
-  Съёмная наволочка на молнии из ткани ТРИТЕКС.
-  Индивидуальная упаковка, удобная для транспортировки и временного хранения.

Состав и комплектность

Подушка: вязкоэластичный пенополиуретан.

Чехол: 100% хлопок.


Наволочка: 26% хлопок, 74% полиэстер.

Подушка в чехле, съёмная наволочка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Уход за изделием


Уход за наволочкой:

- ☰ Наволочку, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим).
- ☰ Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- ☰ Во избежание зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону.
- ☰ Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50°C.
- ☰ Утюжка при температуре 110°C.

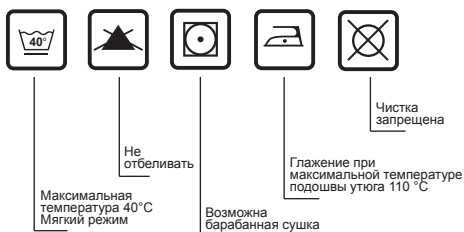


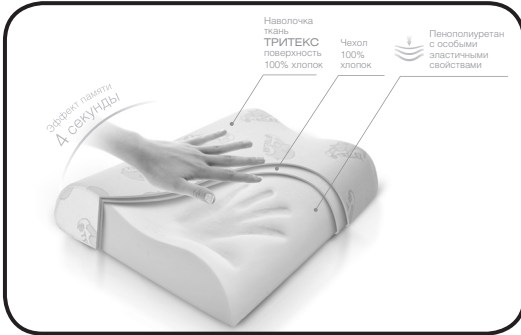
Уход за подушкой в чехле:

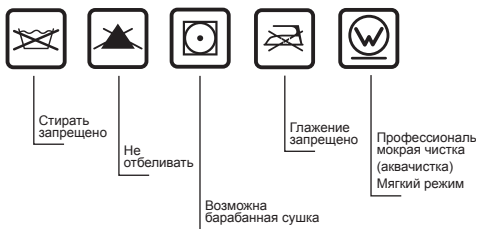

- ☰ Подушку в чехле не рекомендуется стирать в домашних условиях в связи с долгой сушкой.
- ☰ Для стирки подушки в чехле необходимо использовать профессиональную мокрую чистку (аквачистка). Рекомендуется деликатный режим чистки с использованием барабанной сушки при температуре не выше 50°C.
- ☰ Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.
- ☰ Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- ☰ Глажение запрещено.





Характеристики материалов

- 
Вязкоэластичный вспененный пенополиуретан (Memory Foam) изготавливается способом горячего формования, благодаря чему подушка имеет качественную ровную поверхность и правильную симметричную форму.



- 
 Вязкоэластичный пенополиуретан чутко реагирует на давление и температуру тела, плавно подстраивается под форму головы и шеи при поворотах во сне. Пористая структура обладает термоизолирующими свойствами, помогающими сохранить оптимальную температуру. Пенополиуретан нетоксичен и гипоаллергенен, в нем не заводятся микробы-паразиты.
- 
 Подушка RESPECTA BABY помещается в трикотажный чехол из хлопка. Для изготовления съемной наволочки используется трехслойная ткань ТРИТЕКС. Верхний слой — 100% хлопок, нижний — полиэстер, между ними эластичный слой, образованный поперечным вложением полиэфирных нитей.



- 
 За счет своей структуры ткань обладает хорошей гигроскопичностью и высокой воздухопроницаемостью. Ткань ТРИТЕКС гипоаллергенна и обработана антистатическими пропитками. Она мягкая на ощупь и приятная в использовании.
- 
 Сочетание всех свойств материалов позволяет ортопедической подушке под голову с эффектом памяти RESPECTA BABY обеспечить спокойный здоровый сон.

Гарантийные обязательства

- ☰ Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.
- ☰ Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.
- ☰ Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.
- ☰ В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 2-х дней.
- ☰ Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.
- ☰ Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.
- ☰ Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.
- ☰ Пенополиуретан — дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов.
- ☰ Эффект памяти может увеличиваться или уменьшаться по продолжительности в зависимости от температурного режима в помещении.
- ☰ Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.
- ☰ Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.
- ☰ Срок службы: не менее 2-х лет.
- ☰ При использовании подушки свыше срока службы возможна деформация формы и снижение лечебного эффекта. Не рекомендуется использовать подушку свыше 10 лет.
- ☰ Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки RESPECTA BABY.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Подушка TRELAX с эффектом памяти
под голову для детей старше 3-х лет,
арт. П25, RESPECTA BABY**

ТУ № 8599-008-88419706-2012

Экспертное заключение о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю) № 12-06-1094 от 28.06.2012 г.
выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ TRELAX ОПТИМА BABY

используется для профилактики заболеваний шеи, формирования и поддержания правильного изгиба шейного отдела позвоночника, в период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника, при повышенном тоне мышц шеи и верхней части спины (включая кривошею), в случае нестабильности позвонков шейного отдела позвоночника, при наличии признаков остеохондроза в детском и подростковом возрасте. Подушка предназначена для использования детьми с длиной надплечья от 7 до 9 см.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ ДЕТСКАЯ (ДО 1,5 ЛЕТ) TRELAX SWEET

мягко поддерживает голову и шею ребенка, уменьшает нагрузку на шейный отдел во время отдыха и сна, массирует мышцы шеи, способствует улучшению кровообращения мозга, делает сон ребенка легким и спокойным. Рекомендована для использования с 5-ти месяцев.

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ TRELAX ДЛЯ ДЕТЕЙ

способствует правильному развитию опорно-двигательного аппарата ребенка, предупреждает развитие нарушений осанки, сколиозов. Ежедневное применение ортопедических матрасов для детей обеспечивает нормальное положение позвонков и нормализует мышечный тонус, предотвращает развитие гипертонуса мышц.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА-КОНСТРУКТОР TRELAX BABY COMFORT

обеспечивает правильное положение позвоночника ребенка во время сна и кормления, предотвращает травмы и падения. Подушка BABY COMFORT способствует правильному формированию изгибов позвоночного столба, с младенческого возраста предотвращает развитие сколиоза.



Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4
www.trelaxorto.ru

Дата изготовления и упаковывания:

Арт.: INTTK-П25-N1_11/12