




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОДУШКА-ВОРОТНИК
С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
TRELAX® CRUISE**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	1
2. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	2
3. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДУШКИ-ВОРОТНИКА TRELAX CRUISE.....	2
4. СОСТАВ, КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	2
5. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ.....	2
6. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	3
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	4
8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	4
9. СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	4
10. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	5
11. РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX.....	6

Дорожная **подушка-воротник TRELAX CRUISE** обеспечивает комфортное положение во время длительных перелетов, поездок в автомобиле или поезде. Подушка-воротник не только мягко поддерживает голову и шею, но и способствует снижению вибрационного воздействия, которое неизбежно во время движения любого транспортного средства. Технология памяти формы, реализованная в изделии, снижает давление на площадь контакта и тем самым, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц воротниковой зоны. Подушка позволяет сохранить бодрость и хорошее самочувствие вне зависимости от длительности поездки.

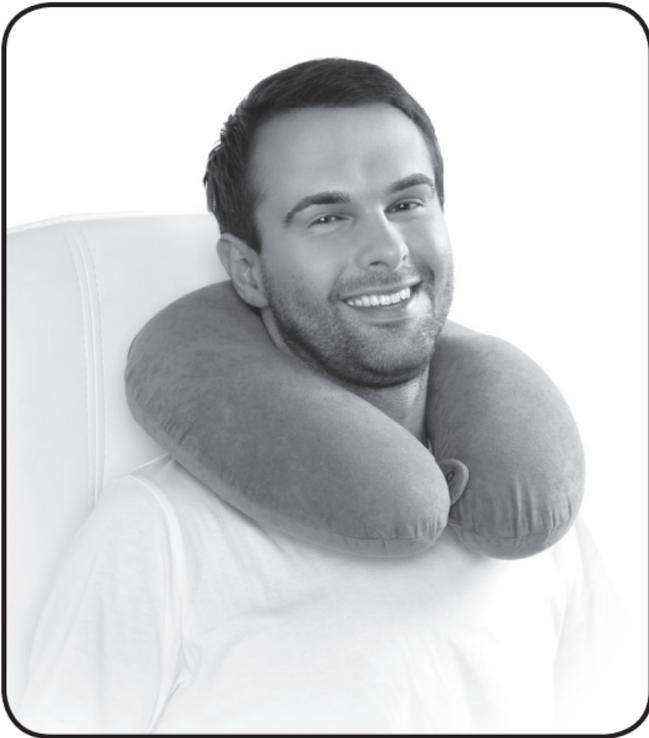

Наименование	Артикул	Размер, см
Подушка-воротник с эффектом памяти, CRUISE	П26	33x32x10

Правила использования

Подушка предназначена для применения взрослыми и детьми старше 12 лет. Подушку размещают в области шеи вырезом вперед так, чтобы при откидывании головы затылочная часть располагалась на валике подушки.

Преимущества подушки-воротника TRELAX CRUISE

- ☉ Благодаря анатомической форме подушка комфортно облегает шею и мягко поддерживает голову в правильном и удобном положении.
- ☉ Эргономичная конструкция подушки позволяет располагать ее в зависимости от индивидуальных предпочтений пользователя: выемками вверх или вниз.
- ☉ Оптимальная высота задней части подушки для поддержки шеи.
- ☉ Гарантированное сохранение формы на протяжении 12 месяцев ежедневного использования.
- ☉ Съёмный чехол подушки легко стирается в домашних условиях.
- ☉ Компактные размеры изделия. Подушка занимает мало места в багажной сумке или чемодане.
- ☉ В комплект входит удобная дорожная сумка.

Состав, комплектность

Подушка: вязкоэластичный пенополиуретан.

Чехол: 100% хлопок.


Наволочка: 100% полиэстер, ткань Автовелюр.

Подушка в чехле, съёмная наволочка, полиэтиленовый пакет, дорожная сумка, коробка, инструкция по применению.

Характеристика материалов

- ☉ Вязкоэластичный вспененный пенополиуретан (Memory Foam) изготавливается способом горячего формования, благодаря чему подушка имеет качественную ровную поверхность и правильную симметричную форму.
- ☉ Вязкоэластичный пенополиуретан чутко реагирует на давление и температуру тела, плавно подстраивается под форму головы и шеи при поворотах.
- ☉ Подушка помещена в трикотажный чехол из хлопка.

- Съемная наволочка изготовлена из **ткани Автовелюр**, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.

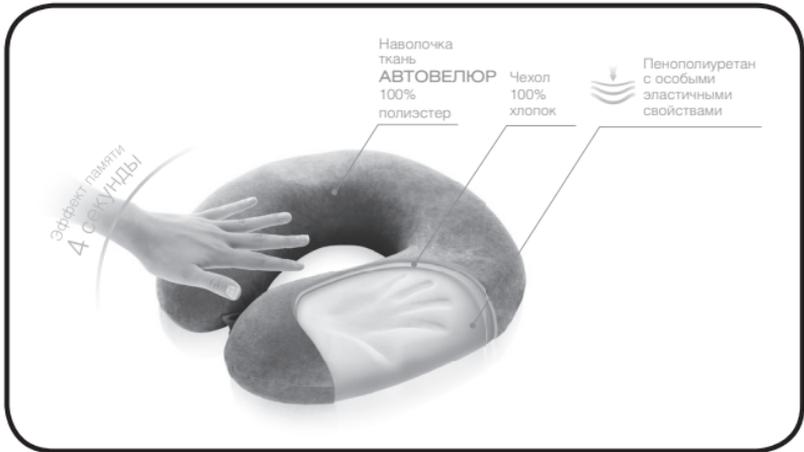

Уход за изделием

Уход за наволочкой

- Съемную наволочку отдельно от подушки можно подвергать машинной стирке при температуре 40°C (деликатный режим).
- Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50°C.
- Утюжка при температуре 110°C.



Уход за подушкой в чехле:

- Подушку в чехле не рекомендуется стирать в домашних условиях в связи с долгой сушкой.
- Для стирки подушки в чехле необходимо использовать профессиональную мокрую чистку (аквачистка). Рекомендуется деликатный режим чистки с использованием барабанной сушки при температуре не выше 50°C.
- Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

- ☹ Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- ☹ Глажение запрещено.



Гарантийные обязательства

- ☹ Гарантийный срок на подушку: 1 год со дня продажи.
- ☹ Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.
- ☹ Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.
- ☹ Срок службы: не менее 1 года.

Условия хранения

- ☹ При длительном хранении подушку следует хранить в развёрнутом виде, при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей. Не допускается хранение подушки в скрученном виде.
- ☹ При транспортировке необходимо аккуратно сложить подушку в дорожную сумку. Не перекручивайте подушку при складывании в сумку. После упаковки в сумку не складывайте подушку и не скручивайте её.
- ☹ Не рекомендуется длительно хранить подушку при температуре ниже 0°C. При кратковременном хранении изделия в холодных условиях нарушается эластичность пенополиуретана, поэтому перед использованием подушки необходимо позволить ей нагреться до комнатной температуры.
- ☹ Пенополиуретан — дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении и использовании. Храните подушку вдали от источников сильного запаха.

Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подушка-воротник TRELAX с эффектом памяти, арт. П26, CRUISE
ТУ № 8599-008-88419706-2012

Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) № 12-06-1095 от 28.06.2012 г. выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ TRELAX DIVA

предназначена для использования во время отдыха в автомобиле, самолете, поезде, дома и в офисе. Подушка разгружает мышцы шейно-воротниковой зоны, позволяет сохранить бодрость и хорошее самочувствие, поддерживает оптимальное положение шеи.



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОД СПИНУ TRELAX АВТОВАСК

предназначена для повышения комфортности автомобильных сидений. Подушка АВТОВАСК мягко поддерживает поясницу и компенсирует продольные и поперечные нагрузки на пояснично-крестцовый отдел позвоночника, возникающие при длительном сидении во время вождения автомобиля.

Рекомендуем



МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ TRELAX НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ

Модели «Классик» и «Люкс»

предназначены для повышения комфорта автомобильных кресел, профилактики остеохондроза, радикулита, болей и тяжести в спине во время вождения автомобиля.

За счет наполнителя в виде полимерных шариков матрас на автомобильное сиденье обеспечивает массажный эффект и повышает тонус мышц, что делает вождение автомобиля более приятным и комфортным.



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ПОД ГОЛОВУ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ TRELAX RESPESTA СОМПРАСТ

предназначена для отдыха во время поездок и путешествий. Благодаря компактному размеру и транспортировочной сумке подушку можно брать с собой в командировки, на дачу и даже в гости. Подушка используется для снятия напряжения в мышцах шеи и плечевого пояса с целью профилактики остеохондроза, головных болей, других признаков заболеваний позвоночника, а также в комплексе реабилитационных мер после травм шейного отдела позвоночника. Ортопедическая подушка одобрена ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и рекомендована к использованию как изделие медицинского назначения.

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАЦЫ TRELAX

предназначены для сна и дневного отдыха, устранения дискомфорта в постели, предупреждения развития и лечения заболеваний позвоночника (сколиозов, радикулитов, остеохондрозов, спондилоартритов, болевых ощущений в области спины). Ежедневный отдых и сон на ортопедическом матрасе помогает снять утомление мышц спины, обеспечивает максимальный отдых и мягкий массаж всего тела во время ночного сна.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД СПИНУ TRELAX СПЕКТРА

предназначена для повышения комфортности обычных кресел и стульев.

Подушка СПЕКТРА мягко поддерживает поясницу и компенсирует нагрузки на нижний грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника, возникающие при длительном сидении на работе и на учебе.

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ TRELAX ПОД ГОЛОВУ СЕРИИ OPTIMA

предназначены для полноценного отдыха детей и взрослых. Подушки под голову успешно используют для профилактики остеохондроза, при смещении позвонков, вертебробазиллярной недостаточности, повышенном тонусе мышц шеи и спины, в комплексе реабилитационных мер после травм шейного отдела позвоночника.

В ассортименте подушек серии OPTIMA присутствуют подушки OPTIMA 10 и OPTIMA 14 – для подростков и взрослых, OPTIMA BABY – для детей старше 3-х лет.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ TRELAX RESPESTA

предназначена для полноценного отдыха подростков и взрослых. Технология памяти формы, реализованная в изделии, позволяет избежать негативного эффекта привыкания к подушке и с первого дня почувствовать высокую степень комфорта и профилактический эффект. Подушки под голову успешно используют для профилактики остеохондроза, головных болей, при повышенном тонусе мышц шеи и спины, в комплексе реабилитационных мер после травм шейного отдела позвоночника.



Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4
www.trelaxorto.ru

Дата изготовления и упаковывания:

Арт.: INTTK-П26-N1_11/12