



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
С ОТВЕРСТИЕМ (НА СИДЕНЬЕ)
TRELAX® MEDICA**


**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ
РУ №ФСР 2009/04606**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	1
2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	2
3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	2
4. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДУШЕК.....	2
5. СПОСОБ ПОДБОРА.....	2
6. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
7. СОСТАВ.....	3
8. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
9. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	3
10. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ.....	4
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	5
12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	5
13. СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	5
14. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	6
15. РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®.....	7

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА TRELAX® MEDICA С ОТВЕРСТИЕМ (НА СИДЕНЬЕ) ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КРЕСТЦА, КОПЧИКА И ТАЗОВОГО КОЛЬЦА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ ПРОМЕЖНОСТИ, ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПРОМЕЖНОСТИ И ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА, В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ.

ФОРМА И КОНСТРУКЦИЯ ПОДУШКИ ИСКЛЮЧАЮТ ДАВЛЕНИЕ НА ТКАНИ ПРОМЕЖНОСТИ В ПОЛОЖЕНИИ «СИДЯ». ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДУШКИ УМЕНЬШАЕТ БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ И СОЗДАЕТ ЧУВСТВО КОМФОРТА ПРИ СИДЕНИИ.

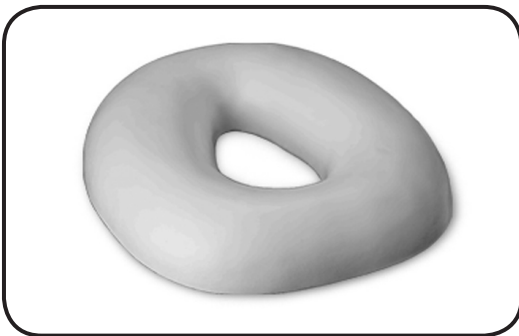

Наименование	Артикул	Размер, см
MEDICA	П06, MEDICA	43x47x9

Показания к применению

- ☰ Вывихи, переломы и другие травмы копчика.
- ☰ Травмы седалищных бугров.
- ☰ Травмы таза, повлекшие нарушение целостности тазового кольца, в период реабилитации.
- ☰ Заболевания и травмы промежности, прямой кишки и малого таза.
- ☰ Послеродовый период (особенно после оперативного родоразрешения, эпизиотомии или наложения швов на промежность).
- ☰ Профилактика пролежней в области седалищных бугров и задней поверхности бедра у длительно сидячих пациентов (инвалиды-колясочники).

Ограничения и противопоказания к применению

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Преимущества подушки TRELAX® MEDICA

- ☰ Конструкция подушки обеспечивает безопорное положение промежности во время сидения.
- ☰ Анатомическая форма подушки стабилизирует правильный изгиб поясницы.
- ☰ Оптимальная высота основания позволяет использовать подушку пациентам весом до 120 кг.
- ☰ Оптимальные размеры подушки (возможность использовать изделие для распространённых размеров сидений, включая инвалидные коляски).
- ☰ Гарантированное сохранение формы на протяжении 2-х лет ежедневного использования.
- ☰ 100% гипоаллергенность материалов и основы подушки.
- ☰ Оптимальная комплектация изделия (основа, съёмный чехол на молнии).

Способ подбора

Подушка MEDICA имеет универсальный размер и не требует специального подбора.

Способ применения

Подушка MEDICA используется при сидении на жёстких или полужёстких поверхностях.

Подушку размещают на сидении так, чтобы при посадке промежность и копчик располагались в отверстии подушки, а сиделищные бугры размещались на валике подушки.

Состав






Подушка: эластичный пенополиуретан.


Наволочка: 26% хлопок, 76% полиэстер.

Комплектность

Подушка, съёмная наволочка, полиэтиленовый пакет, инструкция по применению.


Уход за изделием

-  Наволочку, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим).
-  Во избежание зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону.
-  Не использовать отбеливатели и органические растворители.
-  Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50°C.
-  Глажение при температуре 110°C.

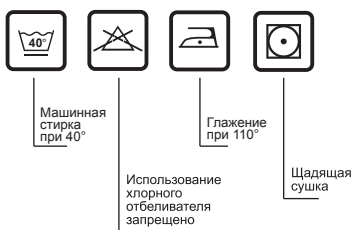


Характеристика материалов

- Эластичный вспененный пенополиуретан изготавливается способом горячего формования, благодаря чему подушка имеет качественную ровную поверхность и правильную симметричную форму.

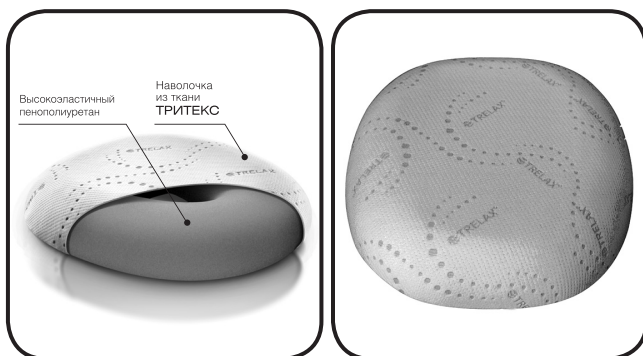

Пористая структура обладает термоизолирующими свойствами. Пенополиуретан нетоксичен и гипоаллергенен, в нем не заводятся микробы-паразиты.

- Для изготовления съемной наволочки используется трехслойная ткань ТРИТЕКС. Верхний слой — 100% хлопок, нижний — полиэстер, между ними — эластичный слой, образованный поперечным вложением полиэфирных нитей. За счет своей структуры ткань обладает хорошей гигроскопичностью и высокой воздухопроницаемостью. Ткань ТРИТЕКС гипоаллергенна и обработана антистатическими пропитками. Она мягкая на ощупь и приятная в использовании.
- Сочетание всех свойств материалов позволяет ортопедической подушке MEDICA обеспечить эффективную разгрузку проблемных зон.

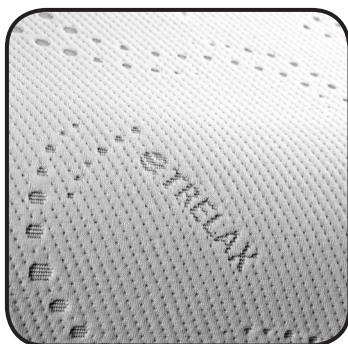

Гарантийные обязательства

- ☉ Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.
- ☉ Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.
- ☉ Гарантийные условия распространяются в случае использования подушки пациентами весом не более 120 кг.
- ☉ Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.
- ☉ Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.
- ☉ Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.
- ☉ Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.
- ☉ Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.
- ☉ Срок службы: не менее 2-х лет.
- ☉ При использовании подушки свыше срока службы возможно изменение формы и снижение лечебного эффекта. Не рекомендуется использовать подушку более 10 лет.
- ☉ Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки MEDICA.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.


Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.

Подушка ортопедическая TRELAX® с отверстием (на сиденье)
П06, MEDICA, ТУ № 9396-003-88419706-2008
Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ИМ24.В02543



Санитарно-эпидемиологическое заключение
№77.99.24.933.Д.010858.09.09

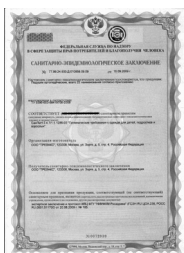

Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ
РУ №ФСР 2009/04606



Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ TRELAX® RESPECTA

предназначена для полноценного отдыха подростков и взрослых. Технология памяти формы, реализованная в изделии, позволяет избежать негативного эффекта привыкания к подушке и с первого дня почувствовать высокую степень комфорта и профилактический эффект. Подушки под голову успешно используют для профилактики остеохондроза, головных болей, при повышенном тонусе мышц шеи и спины, в комплексе реабилитационных мер после травм шейного отдела позвоночника.



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАЦЫ TRELAX®

предназначены для сна и дневного отдыха, устранения дискомфорта в постели, предупреждения развития и лечения заболеваний позвоночника (сколиозов, радикулитов, остеохондрозов, спондилоартритов, болевых ощущений в области спины). Ежедневный отдых и сон на ортопедическом матрасе помогает снять утомление мышц спины, обеспечивает максимальный отдых и мягкий массаж всего тела во время ночного сна.

Рекомендуем

**ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ПОДУШКА-КОНСТРУКТОР
TRELAX® BABY COMFORT**

обеспечивает правильное положение позвоночника ребёнка во время сна и кормления, предотвращает травмы и падения. Подушка BABY COMFORT способствует правильному формированию изгибов позвоночного столба, с младенческого возраста предотвращает развитие сколиоза.

**ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА
ПОД ГОЛОВУ СТАНДАРТНАЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ
TRELAX® ОПТИМА BABY**

используется для профилактики заболеваний шеи, формирования и поддержания правильного изгиба шейного отдела позвоночника, в период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника, при повышенном тонусе мышц шеи и верхней части спины (включая кривошею), в случае нестабильности позвонков шейного отдела позвоночника, при наличии признаков остеохондроза в детском и подростковом возрасте. Подушка предназначена для использования детьми с длиной надплечья от 7 до 9 см.

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ TRELAX® ДЛЯ ДЕТЕЙ

способствует правильному развитию опорно-двигательного аппарата ребенка, предупреждает развитие нарушений осанки, сколиозов. Ежедневное применение ортопедических матрасов для детей обеспечивает нормальное положение позвонков и нормализует мышечный тонус, предотвращает развитие гипертонуса мышц.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ ДЕТСКАЯ (ДО 1,5 ЛЕТ) TRELAX® SWEET

мягко поддерживает голову и шею ребенка, уменьшает нагрузку на шейный отдел во время отдыха и сна, массирует мышцы шеи, способствует улучшению кровообращения мозга, делает сон ребёнка лёгким и спокойным. Рекомендована для использования с 5-ти месяцев.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ



Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.
www.trelaxorto.ru

Дата изготовления и упаковывания:

Арт. INTTC-П06-N2