



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  
ДЛЯ ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ  
TRELAX® DIVA**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ  
РУ №ФСР 2009/04606**

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	1
2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	2
4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	2
5. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДУШЕК.....	2
6. СПОСОБ ПОДБОРА.....	2
7. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
8. СОСТАВ.....	3
9. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
10. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	3
11. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ.....	4
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	4
13. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	5
14. СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	5
15. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	6
16. РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®.....	7

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА TRELAX® DIVA для ОТДЫХА и ПУТЕШЕСТВИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ во ВРЕМЯ ОТДЫХА в АВТОМОБИЛЕ, САМОЛЕТЕ, ПОЕЗДЕ, ДОМА и в ОФИСЕ.

ПОДУШКА РАЗГРУЖАЕТ МЫШЦЫ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ, ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ БОДРОСТЬ и ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШЕИ.



Наименование	Артикул	Размер, см
DIVA	П08, DIVA	38x40x8,5

---

## Показания к применению

---

- ☰ Дискомфорт и мышечное напряжение в области шеи и надплечий во время длительного сидения.
- ☰ Профилактика возникновения головных болей при длительном сидении в статическом положении.
- ☰ Профилактика нарушений кровообращения головного мозга при длительном сидении в статическом положении (кресло автомобиля, самолёта, автобуса и т.д.).
- ☰ Комплексная терапия остеохондроза шейного отдела позвоночника.
- ☰ Лечение нестабильности позвонков в шейном отделе.
- ☰ Необходимость расслабления мышц шеи и надплечий перед сеансами массажа, мануальной терапии.

Лечебный эффект подушки DIVA дополняется микромассажным воздействием наполнителя подушки.

---

## Ограничения и противопоказания к применению

---

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

---

## Преимущества подушки TRELAX® DIVA

---

- ☰ Анатомическая форма, позволяющая комфортно облегать шею и поддерживать голову в правильном положении.
- ☰ Наполнитель подушки позволяет изменять толщину валика и удобно размещать шею вне зависимости от неровностей поверхности.
- ☰ Оптимальная высота задней части подушки для поддержки шеи.
- ☰ Правильно рассчитанная высота передней части подушки для удобного расположения подбородка.
- ☰ Материалы чехла и наполнителя подушки не препятствуют кожному дыханию.
- ☰ Структура подушки обеспечивает и поддерживает оптимальный температурный баланс кожных покровов.
- ☰ 100% гипоаллергенность материалов и наполнителя подушки.
- ☰ Лёгкость ухода за подушкой (подушка легко стирается в домашних условиях).

---

## Способ подбора

---

Подушка DIVA имеет универсальный размер и не требует специального подбора.

## Способ применения

Подушка предназначена для применения детьми старше 7 лет и взрослыми.

Подушку размещают в области шеи вырезом вперед так, чтобы при откидывании головы затылочная часть располагалась на валике подушки.

Для поддержания свойств изделия необходимо периодически встряхивать подушку.

## Состав

Оболочка: 100% полиэстер.

Наполнитель: вспененный пенополистирол.

## Комплектность

Подушка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.


## Уход за изделием

- Подушку можно подвергать машинной стирке при температуре 40°C (деликатный режим).
- Рекомендуется естественная сушка в горизонтальном положении.
- Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- Глажение не требуется.



## Характеристика материалов

- Оболочка (чехол) изготовлена из ткани Автовелюр, широко используемой в автомобильной промышленности для производства автокресел и внутренней обивки салона. Автовелюр обладает высокой прочностью и износостойкостью.
  - Наполнитель – шарики пенополистирола являются уникальным полимерным материалом. Диаметр шариков составляет 8-10 мм. Шарики оказывают микромассажное воздействие, сохраняют температурный баланс и способствуют снятию напряжения с мышц шеи и надплечья.
- Все шарики пенополистирола обрабатываются специальным силиконовым раствором для обеспечения антистатических свойств и сохранения формы подушки.

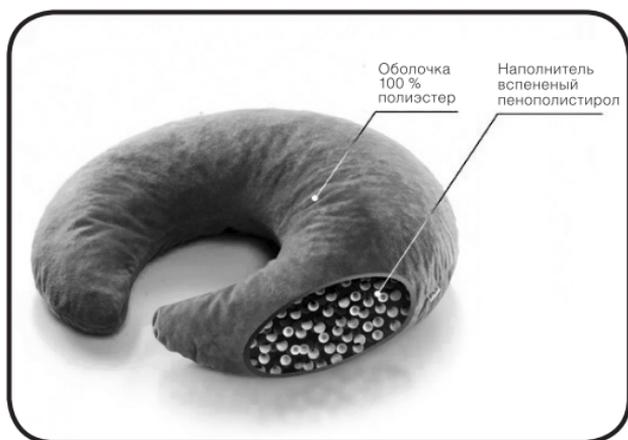

## Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на подушку: 1 год со дня продажи.
- Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.
- Во время эксплуатации возможно проминание шариков пенополистирола в местах повышенной нагрузки.
- Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.
- Срок службы: не менее 1 года.
- При использовании подушки свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта.
- Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки DIVA.

---

### **Условия хранения**

---

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

---

### **Способ утилизации**

---

Вместе с бытовым мусором.



Подушка ортопедическая TRELAX® для отдыха и путешествий  
арт. П08, DIVA  
ТУ № 9396-003-88419706-2008  
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.В02543



Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№77.99.24.933.Д.010858.09.09



Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ  
РУ №ФСР 2009/04606



## Рекомендуем



### ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД СПИНУ TRELAX® SPECTRA

предназначена для повышения комфортности обычных кресел, стульев и автомобильных сидений.

Подушка SPECTRA мягко поддерживает поясницу и компенсирует нагрузки на нижний грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника, возникающие при длительном сидении на работе, на учебе и во время вождения автомобиля.



### МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ TRELAX® НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ

МОДЕЛИ «КЛАССИК» И «ЛЮКС» предназначены для повышения комфорта автомобильных кресел, профилактики остеохондроза, радикулита, болей и тяжести в спине во время вождения автомобиля.

За счет наполнителя в виде полимерных шариков матрас на автомобильное сиденье обеспечивает массажный эффект и повышает тонус мышц, что делает вождение автомобиля более приятным и комфортным.

---

**Рекомендуем**

---

**ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  
ПОДУШКА-КОНСТРУКТОР  
TRELAX® BABY COMFORT**

обеспечивает правильное положение позвоночника ребёнка во время сна и кормления, предотвращает травмы и падения. Подушка BABY COMFORT способствует правильному формированию изгибов позвоночного столба, с младенческого возраста предотвращает развитие сколиоза.

**ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА  
ПОД ГОЛОВУ ДЕТСКАЯ  
(ДО 1,5 ЛЕТ) TRELAX® SWEET**

мягко поддерживает голову и шею ребенка, уменьшает нагрузку на шейный отдел во время отдыха и сна, массирует мышцы шеи, способствует улучшению кровообращения мозга, делает сон ребёнка лёгким и спокойным. Рекомендована для использования с 5-ти месяцев.

## Рекомендуем



### **ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ TRELAX® ОПТИМА BABY**

используется для профилактики заболеваний шеи, формирования и поддержания правильного изгиба шейного отдела позвоночника, в период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника, при повышенном тонусе мышц шеи и верхней части спины (включая кривошею), в случае нестабильности позвонков шейного отдела позвоночника, при наличии признаков остеохондроза в детском и подростковом возрасте. Подушка предназначена для использования детьми с длиной надплечья от 7 до 9 см.



### **ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ TRELAX® RESPECTA**

предназначена для полноценного отдыха подростков и взрослых. Технология памяти формы, реализованная в модели, позволяет избежать негативного эффекта привыкания к подушке и с первого дня почувствовать высокую степень комфорта и профилактический эффект. Подушки под голову успешно используют для профилактики остеохондроза, головных болей, при повышенном тонусе мышц шеи и спины, в комплексе реабилитационных мер после травм шейного отдела позвоночника.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ



**Производитель:**

ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.  
[www.trelaxorto.ru](http://www.trelaxorto.ru)

**Дата изготовления и упаковывания:**

Арт. INTTC-П08-N2