



**Orlett®**  
вернет радость движения

## Инструкция по применению ортопедических изделий



Stabil Line




Арт.: INTOK-WFG-100-N5\_06/15

**Ортез на пястно-фаланговые суставы  
WFG-100**

### Правила ухода:

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.

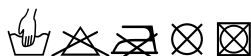

### Состав изделия:

48% полиамид, 20% полиуретан, 10% полиэстер, 5% эластан, 12% алюминий, 5% полиэтилен.

### Условия хранения:

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

### Условия утилизации:

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

### Срок службы:

Срок службы не ограничен. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

### Срок годности:

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

### Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. WFG-100, инструкция по применению.

### Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции.

### Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01699 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИММШ».

**Изготовитель:** Рехард Технолджис ГмБХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.

Претензии принимает представитель в России и СНГ — ООО «НИКАМЕД» по адресу: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.

**Для корреспонденции:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58.

### Свойства товара (оказываемые эффекты):

Ортез Orlett на пястно-фаланговые суставы, арт. WFG-100 обеспечивает сильную фиксацию пястно-фаланговых и межфаланговых суставов. Металлическая шина фиксирует пястно-фаланговые и межфаланговые суставы в заданном положении. Ограничивает подвижность, снижает болевой синдром, фиксирует лучезапястный сустав в физиологически правильном положении.

### Показания к применению:

- травмы, ушибы, растяжения 2-4 пальцев руки;
- недостаточность связочного аппарата пястно-фаланговых суставов;
- артрозы и ревматические поражения лучезапястного и пястно-фалангового суставов (2-4 пальцев руки);
- тендовагиниты области пальцев кисти.

### Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения ортезов Orlett серии STABIL LINE назначает лечащий врач. Для профилактики травм и заболеваний суставов рекомендованный режим: при нагрузках на сустав (спортивных, производственных).

### Противопоказания:

- острые гнойные воспалительные заболевания (в области применения ортеза);
- опухолевые заболевания в области применения ортеза;
- индивидуальная непереносимость материалов.

### Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться со специалистом. При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделие предназначено для многократного личного использования.

### Конструкция ортеза Orlett, арт. WFG-100:

Ортез Orlett, арт. WFG-100 состоит из следующих элементов:

1. Манжета.
2. Шина.
3. Фиксирующие ремни (5 шт.).

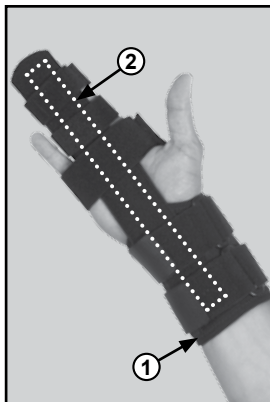


рис. 1

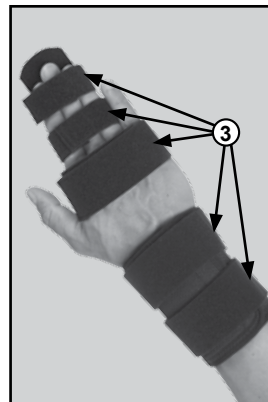


рис. 2

### Порядок надевания:

При необходимости предварительно вынуть и изогнуть металлическую шину (2), подогнав под индивидуальные особенности строения руки. Расстегнув все ремни, расположить кисть на изделии таким образом, чтобы шина располагалась под иммобилизуемой областью по ладонной поверхности кисти. Обхватить дистальную часть предплечья манжетой, застегнув застёжку «Велкро» и фиксирующие ремни (3). Зафиксировать кисть и необходимые для иммобилизации пальцы остальными фиксирующими ремнями. Не затягивать ремни чрезмерно сильно во избежание нарушения кровообращения. Возможно, через несколько минут ходьбы возникнет необходимость отрегулировать уровень давления.

### Правила подбора:

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность лучезапястного сустава (рис. 3).

Согласно полученным результатам подобрать ортез по таблице подбора размеров.

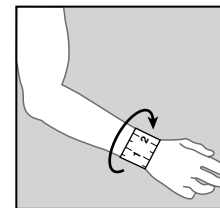


рис. 3

### Таблица подбора размеров:

Ортез на пястно-фаланговый сустав Orlett, арт. WFG-100		
Размер	Окружность лучезапястного сустава (см)	
S/M	14-18	
L/XL	18-22	

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.