



КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП

Инструкция по эксплуатации



ВСН-4000 с капюшоном

ВСН-4000 без капюшона

Благодарим Вас, что Вы выбрали детскую складную кресло-коляску **BRONIGEN ВСН-4000**. Перед началом использования кресла-коляски, ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по эксплуатации. Это поможет Вам использовать кресло-коляску наиболее эффективно.

Комплектация

1. Кресло-коляска	1 шт.
2. Опоры для ног	2 шт.
2. Подголовник	1 шт.
3. Подушка подголовника	1 шт.
4. Подушка для сидения	1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
6. Набор инструментов	1 комплект.
7. Съёмный капюшон (для ВСН-4000 с капюшоном)	1 шт.

Назначение

Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Область применения


Кресло-коляска используется для детей с потерей или ограничением функций передвижения, возникшим в результате паралича, потери конечностей, деформации конечностей, контрактуры суставов и других заболеваний.

Оказываемые эффекты

Кресло-коляска позволяет родителям или сопровождающим удобно и безопасно перемещать ребёнка с нарушенными функциями опорно-двигательного аппарата во время прогулки, а также при необходимости транспортировки ребёнка.

Складная конструкция кресла-коляски обеспечивает дополнительный комфорт при транспортировке.

Кресло-коляска предоставляет возможность индивидуальной регулировки по потребностям пользователя. Возможно изменение угла наклона спинки кресла-коляски, высоты положения опор для ног, высоты установки подушки подголовника, а также корректировки длины фиксирующих ремней.

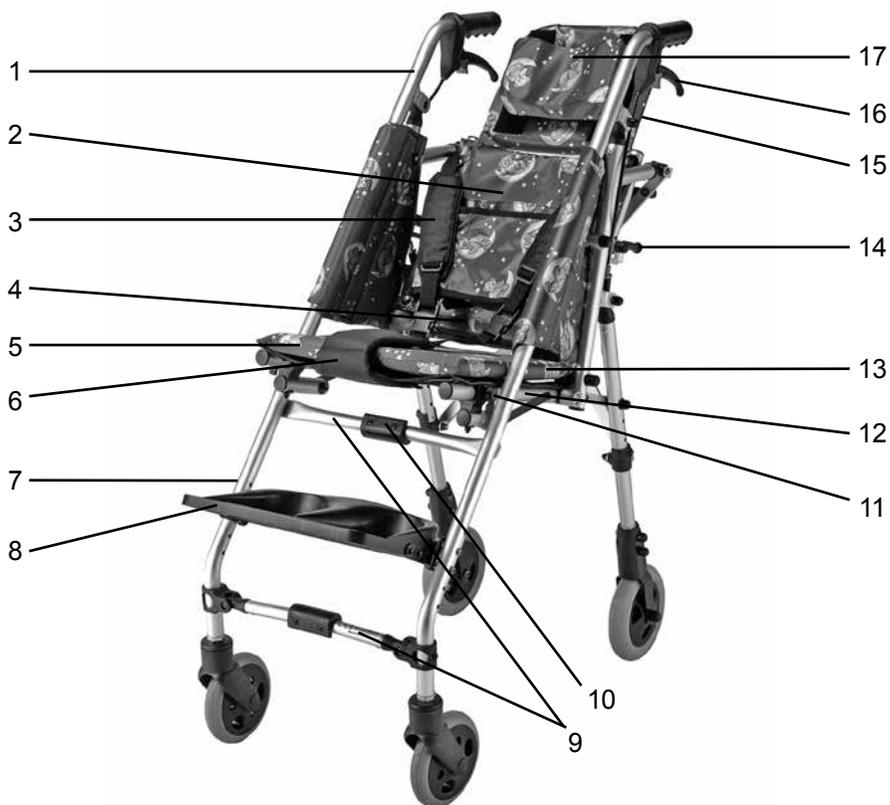

- 1 - рама коляски;
- 2 - спинка;
- 3 - ремень плечевой;
- 4 - ремень поясной;
- 5 - подушка сиденья;
- 6 - абдуктор;
- 7 - узел подножек;
- 8 - опоры узла подножек;
- 9 - поперечина;

- 10 - фиксатор поперечины;
 - 11 - фиксатор опоры сиденья;
 - 12 - опора сиденья;
 - 13 - сиденье;
 - 14 - фиксатор наклона спинки;
 - 15 - подголовник;
 - 16 - рычаг тормоза;
 - 17 - подушка подголовника.
-

Принцип действия

- Наклон спинки сиденья (2) устанавливается в одном из трех положений при помощи рычагов (14), расположенных с обеих сторон спинки.
- Плечевые ремни (3) крепятся к абдуктору (6) при помощи пружинных застёжек. Натяжение плечевых ремней регулируется перемещением соответствующих пряжек ремней. Поясной ремень (4) закреплён на спинке сиденья (2), его размер регулируется застёжкой «Велкро».
- Абдуктор (6) закреплён своей нижней частью на основании сиденья (13), а верхней частью соединён с плечевыми ремнями (3).
- Кресло-коляска комплектуется съёмными и поворотными подножками. Для установки узла подножек (7) на кресло-коляску наденьте их на два штифта на раме и поверните вперед до щелчка фиксатора. Опоры для ног (8) опустите в горизонтальное положение.
- Высота опор регулируется перестановкой крепежного болта в одно из пяти фиксированных положений. Для снятия подножек нажмите на рычаг фиксатора, поверните узел подножек (7) назад (в сторону колеса), и движением вверх снимите его со штифтов.
- Поперечины (9) с фиксаторами (10) установлены между передними колесами, под сиденьем и на задней стороне спинки сиденья.
- Подголовник (15) устанавливается в гнездах вертикальных опор спинки и фиксируется кнопочными фиксаторами. Подушка подголовника (17) крепится к подголовнику (15) на требуемой высоте при помощи застёжки «Велкро».
- Кресло-коляска оборудована стояночными тормозами задних колес. Для торможения нажмите рычаг тормоза (16) до блокировки колес. Рычаг тормоза может быть зафиксирован в одном из трех положений, обеспечивающих различное усилие торможения.

Противопоказания

Кресло-коляска используется для детей весом до 50 кг.

Меры предосторожности

- Перед использованием кресла-коляски убедитесь, что все трубки зафиксированы, во избежание травм.
 - Будьте осторожны при сборке и складывании кресла-коляски.
 - ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать опоры для ног как опорную платформу при посадке в кресло и вставании из кресла.
 - Перед посадкой и вставанием с кресла заблокируйте колёса тормозами.
-


Правила использования


Порядок сборки кресла-коляски

- 

1 Выньте кресло-коляску из упаковки.
- 


2 Двигайте переднюю ножку вперёд, а заднюю ножку назад.
- 

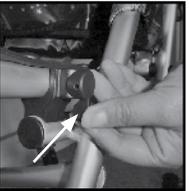3 Нажмите на поперечную трубку сидения.
- 

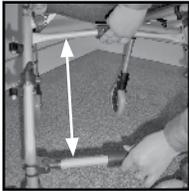4 Зафиксируйте поперечную трубку сидения с двух сторон.
- 


5 На передней части кресла-коляски нажмите вниз на верхнюю поперечину и потяните вверх нижнюю поперечину.
- 

6 Надавите на поперечину сзади.
- 

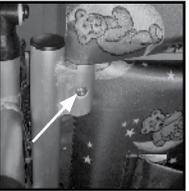7 Установите головную часть.
- 

8 Убедитесь, что фиксатор попал в фиксирующее отверстие, как на рисунке.
- 

9 Положите подушку для сидения.
- 

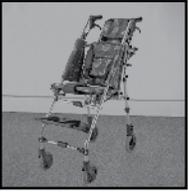10 Установите опоры для ног.
- 


11 Вид коляски в собранном виде.

Порядок складывания кресла-коляски


- 

1 Снимите головную часть.
 - 


2 Снимите подушку для сидения.
 - 

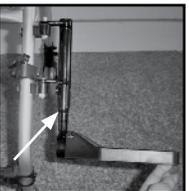3 Опустите вниз рычаг узла подножек.
 - 


4 Снимите опоры для ног.
-
-

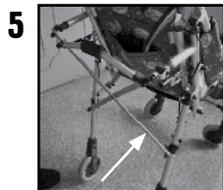

5 Поднимите поперечину на задней части.

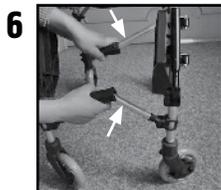


6 На передней части кресла нажмите вниз верхнюю поперечину и потяните вверх нижнюю поперечину.

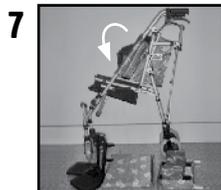

7 Коляска в сложенном виде.

Порядок установки капюшона (для моделей с капюшоном)

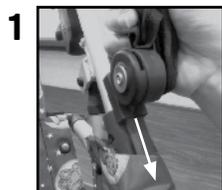

1 Вставьте боковые части капюшона на держатели на коляске с левой и правой стороны



2 Убедитесь, что детали вставлены полностью.



3 Зафиксируйте капюшон с двух сторон с помощью велкро фиксаторов.



4 Коляска с капюшоном в собранном виде.

Для снятия капюшона выполните все действия в обратном порядке

Правила ухода за креслом-коляской

- Для чистки пластиковых и металлических частей используйте тёплую воду с нейтральным моющим средством. После чистки вытрите все детали насухо тряпочкой. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и др.), а также сильнодействующие моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.
- Для чистки подушечки для сидения, подголовника, а также обивки спинки кресла-коляски и боковых частей используйте губку, смоченную в тёплой воде с мягким моющим средством. Затем смойте моющее средство губкой, смоченной в чистой воде, и дайте всем деталям просохнуть. Не сушите подушечку для сидения и подголовник в автоматической сушилке, т.к. это может привести к деформации изделий.

-
-
- Особо загрязненные части очищайте с помощью мягкой щётки.
 - Не допускайте повреждения обивки твёрдыми и острыми предметами.

Правила хранения

- Храните кресло-коляску после использования в сухом чистом месте.
- Не подвергайте кресло-коляску воздействию высокой температуры, влажности и пыли.
- Температура хранения кресла-коляски от -20°С до +60°С.
- При хранении оберегайте кресло-коляску от воздействия прямых солнечных лучей.

Правила утилизации

Утилизация кресла-коляски осуществляется по правилам утилизации алюминиевого лома, действующим на территории потребителя.

Гарантии производителя

Гарантия на кресла-коляски составляет 12 месяцев с момента покупки при отсутствии повреждений вследствие удара, механического воздействия, несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию.

Срок службы кресел-колясок составляет 2 года.

Технические характеристики

Глубина сиденья, мм	300
Высота спинки, мм	350-560
Размеры (ШхВхД) без опор для ног	510х990/1200х790
Вес коляски без капюшона, кг	10,5
Вес коляски с капюшоном, кг	11
Грузоподъемность, кг	50
Диаметр колёс, см	20

Размерный ряд

Размер	S	M	L	XL
Ширина сиденья, см	30	33	36	38

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной продавцом в гарантийном талоне при продаже изделия.
2. В случае отсутствия отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с даты поставки коляски в торгующую организацию.
4. Гарантия распространяется только на производственные дефекты.
5. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие удара, механического воздействия, несанкционированного ремонта или внесения изменения в конструкцию.

Торговая организация (продавец)

Отметки о ремонте



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09239 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01700 (с 26.06.2014 г. по 24.03.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127220, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.

Претензии принимает: представитель в России и СНГ — ООО «НИКАМЕД» по адресу: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.