

Информация о правилах эффективного и безопасного использования:

Массажёры нельзя бросать на пол. Не делать массаж лица. Необходима регулярная обработка поверхности изделий после использования (см. Правила ухода). Максимально допустимая нагрузка на массажёры KINERAPY Dome — 130 кг.

Правила хранения:

Хранить изделия при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов и прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок:

Шесть месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, указанных в данной инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- не гарантийный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Срок годности:

Не установлен.

Правила утилизации:

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9881 от 03.04.2020 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485.

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

www.kinerapy.com

www.nikamed.ru

Арт.: INTKK-RH_MED-N1_07/20

**KINERAPY**
ADVANCED REHABILITATION TECHNIQUES

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Комплект массажёров, 2 шт.
KINERAPY DOME

Массажёр-твинс
KINERAPY TWINS BALL

Комплект массажных мячей, 3 шт.
KINERAPY MASSAGE BALLS

Массажёр-эллипс
KINERAPY ELLIPSE BALL

Массажный мяч
KINERAPY MASSAGE BALL

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор! Немечская торговая марка KINERAPY объединяет опыт профессионалов в сфере здорового образа жизни и реабилитации. Миссия бренда – помочь Вам в улучшении качества жизни и достижении активного долголетия. Наша философия – движение, и только изделия бескомпромиссного качества помогают нам эффективно её реализовать. Выбранное Вами медицинское изделие произведено в соответствии со стандартом EN ISO 13485, обеспечивающим высокое качество и безопасность эксплуатации, и зарегистрировано в Росздравнадзоре. Изделия KINERAPY производятся из самых современных и экологических полимерных материалов с использованием био-пластификатора, исключающего содержание токсинов и опасных для здоровья фталатов. Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами использования изделий.

Область и способ применения:

Массажёры KINERAPY предназначены для массажа и самомассажа различных частей тела детей и взрослых в сочетании с гимнастикой.

Комплект массажёров KINERAPY DOME рекомендуется для самомассажа стоп, упражнений на баланс, а также в качестве подушки для поясничной области.

Массажёр-твинс KINERAPY Twins Ball рекомендуется использовать для массажа шеи и спины. Для развития моторики и восстановления чувствительности кистей рук, а также для самомассажа стоп и профилактики плоскостопия.

Комплект массажных мячей KINERAPY Massage Balls широко используется для самомассажа кистей и пальцев рук, а также может использоваться для массажа всего тела.

Массажёр-эллипс KINERAPY Ellipse Ball удобно использовать в качестве валика для массажа стоп, а также для массажа рук, кистей и других частей тела.

Изделия предназначены для многократного личного использования.

Показания:

- малоподвижный образ жизни (для изделий арт. RF500, RH115, RH114, RH116);
- восстановление и реабилитация после:
 - травм опорно-двигательного аппарата;
 - обострений дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата;
 - поражений периферических нервов различного генеза.
- профилактика и лечение состояний, вызванных:
 - вынужденной гиподинамией;
 - угнетением локального кровообращения.

Противопоказания:

- невозможность выполнения реабилитационных методик по комплексу патологий;
- гнойно-септические поражения кожных покровов в непосредственных зонах воздействия изделий;
- неадекватное состояние пациента;
- индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделий.

Конструкция:

Массажёры KINERAPY выпускаются с разной степенью жесткости массажных шипов: жёсткие, полужесткие и мягкие.

Все изделия изготавливаются по технологии бесшовного литья, не имеют клеевой поверхности.

Массажёры KINERAPY (кроме KINERAPY Massage Balls) имеют ниппельное отверстие для регулировки наполненности воздухом. Изделия можно либо дополнительно накачать с помощью игольчатого насоса, либо выпустить излишний воздух.

Правила подбора:

Для выбора типа жесткости следует обратиться к специалисту по массажу, который определит необходимую глубину воздействия массажа. При выборе жесткости шипов массажёра необходимо учитывать чувствительность кожных покровов.

Правила использования:

Для начинающих, а также для тех, у кого кожа обладает повышенной чувствительностью, в первые две недели массаж с использованием массажёров KINERAPY желательно выполнять через хлопчатобумажную ткань, а затем массаж выполняется при прямом контакте с кожей.

Применять массажёры в гигиенических целях следует систематически, вначале ежедневно (утром и вечером по 5-10 минут), потом курсами в течение 1-3 недель. Далее для поддержания здоровья и работоспособности достаточно проводить процедуру один раз в 2-3 дня. Общая длительность гигиенического сеанса общего самомассажа массажёрами – 10-15 минут, из них: спина – 2-3 минуты, грудь – 1-2 минуты, область таза – 1 минута, бедра – по 1-1,5 минуты каждое, икроножные мышцы по 0,5 минуты.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Побочные действия: До настоящего времени не выявлены. Изделия при использовании не вызывают нарушений кровообращения и целостности кожных покровов.

Состав: ПВХ.**Комплектность:**

Комплект массажёров KINERAPY DOME, арт. RF500, 2 шт., инструкция.

Комплект массажных мячей KINERAPY Massage Balls, арт. RH106, 3 шт., инструкция.

Массажный мяч KINERAPY Massage Ball, арт. RH107, 1 шт., инструкция.

Массажёр-эллипс KINERAPY Ellipse Ball (жёсткий), арт. RH115, 1 шт., инструкция.

Массажёр-эллипс KINERAPY Ellipse Ball (полужесткий), арт. RH114, 1 шт., инструкция.

Массажёр-твинс KINERAPY Twins Ball, арт. RH116, 1 шт., инструкция.

Правила ухода:

Изделия очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным раствором. Не используйте щётки, абразивные средства или химические очистители.