

Противопоказания для изделий RK160 и RK700:

- невозможность выполнения реабилитационных методик по комплексу патологий;
- гнойно-септические поражения кожных покровов в непосредственных зонах воздействия изделий;
- неадекватное состояние пациента;
- индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделий.

Побочные действия: До настоящего времени не выявлены. Изделие при использовании не вызывает нарушений кровообращения и целостности кожных покровов.

Состав: ПВХ.

Правила ухода: Игрушку очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным раствором. Не используйте щётки, абразивные средства или химические очистители.

Информация о правилах эффективного и безопасного использования: В случае прокола НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ надувную игрушку. Отремонтированная игрушка не гарантирует безопасность использования.

Правила хранения: Хранить изделие при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов и прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок: Шесть месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, указанных в данной инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Обратите внимание!

В связи с тем, что глаза и мордочка игрушки раскрашены вручную, возможны небольшие потеки, расплывчатость и неровность краски. Это не дефект и гарантийным случаем не является.

Срок годности: Не установлен.

Правила утилизации: По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.

Игрушки для детей старше трех лет. Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9881 от 03.04.2020 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Изготовитель: Рехард Технолджис ГмБХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

www.kinerapy.com

www.nikamed.ru

**KINERAPY**
ADVANCED REHABILITATION TECHNIQUES

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мяч-Кенгуру
(мяч надувной)

KINERAPY JUMP BALL

Тренажёр-игрушка Рыжий Пес
(мяч надувной)

KINERAPY ORANGE DOG

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор! Немецкая торговая марка KINERAPY объединяет опыт профессионалов в сфере здорового образа жизни и реабилитации. Миссия бренда – помочь Вам в улучшении качества жизни и достижении активного долголетия. Наша философия – движение, и только изделия бескомпромиссного качества помогают нам эффективно её реализовать. Выбранное Вами медицинское изделие произведено в соответствии со стандартом EN ISO 13485, обеспечивающим высокое качество и безопасность эксплуатации, и зарегистрировано в Росздравнадзоре. Изделия KINERAPY производятся из самых современных и экологичных полимерных материалов с использованием биопластификатора, исключающего содержание токсинов и опасных для здоровья фталатов. Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами использования изделия.



**Мяч-Кенгуру (мяч надувной)
KINERAPY JUMP BALL.**

Диаметр: 60 см



Игрушка для детей старше трех лет.

Область и способ применения:

Мяч-Кенгуру используется в игровых занятиях для детей и подростков. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Конструкция:

Игрушка изготовлена из материала повышенной упругости. В конструкции игрушки предусмотрены «рожки», за которые ребёнок может держаться во время сидения и прыжков.



max 80 кг

максимальная нагрузка

Правила подбора:

Для безопасного использования игрушки необходимо, чтобы при сидении на игрушке стопы ребёнка опирались на пол. Максимальная нагрузка на мяч не должна превышать 80 кг.

Правила использования:

Накачайте игрушку с помощью насоса для накачивания мячей. Во избежание переполнения игрушки воздухом и разрыва не используйте воздушный компрессор для накачивания мячей. Диаметр полностью накачанной игрушки не должен превышать 60 см. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Комплектность:

Игрушка, две заглушки, инструкция.


**Тренажёр-игрушка Рыжий Пес (мяч надувной)
KINERAPY ORANGE DOG.**


Игрушка для детей старше трех лет.

Область и способ применения:

Тренажёр-игрушка Рыжий Пёс предназначен для гимнастики и игр для детей от 3 до 5 лет. Сидя на спине Рыжего Пса и упираясь стопами в пол, ребёнок может совершать вставания и пружинящие приседания. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Конструкция:

Игрушка изготовлена из материала повышенной упругости. У Рыжего Пса широкие опорные лапы и большие уши для удержания равновесия. Глаза, нос и линии на мордочке раскрашены вручную.



max 40 кг

максимальная нагрузка

Правила подбора:

Для безопасного использования мяча необходимо, чтобы при сидении ребёнка на мяче его стопы полностью опирались на пол. Максимальная нагрузка на игрушку не должна превышать 40 кг.

Правила использования:

Накачайте игрушку с помощью насоса для накачивания мячей. Во избежание переполнения воздухом и разрыва не используйте воздушный компрессор для накачивания мячей. Высота спинки Рыжего Пса не должна превышать 26 см. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Комплектность: Игрушка Рыжий Пёс, заглушка, инструкция.

Показания для изделий RK160 и RK700:

- угнетение моторики и чувства баланса у детей и подростков;
- нарушения осанки у детей и подростков;
- восстановление и реабилитация после:
 - травм опорно-двигательного аппарата.
 - обострения дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата;
 - поражений периферических нервов различного генеза;
- состояния, требующие применения в качестве терапии лечебной физкультуры и оздоровительных методик у детей и подростков.