

Правила хранения:

Хранить изделия при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов и прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок:

Шесть месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, указанных в данной инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- не гарантийный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Срок годности:

Не установлен.

Правила утилизации:

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9881 от 03.04.2020 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485.

Изготовитель: Рехард Технолджис ГмБХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

www.kinerapy.com

www.nikamed.ru



KINERAPY

ADVANCED REHABILITATION TECHNIQUES

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Венотренажёр KINERAPY VEIN TRAINER

Арт.: INTKK-RS350_MED-N1_07/20

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор! Немецкая торговая марка KINERAPY объединяет опыт профессионалов в сфере здорового образа жизни и реабилитации. Миссия бренда – помочь Вам в улучшении качества жизни и достижении активного долголетия. Наша философия – движение, и только изделия бескомпромиссного качества помогают нам эффективно её реализовать. Выбранное Вами медицинское изделие произведено в соответствии со стандартом EN ISO 13485, обеспечивающим высокое качество и безопасность эксплуатации, и зарегистрировано в Росздравнадзоре. Изделия KINERAPY производятся из самых современных и экологичных полимерных материалов с использованием биопластификатора, исключающего содержание токсинов и опасных для здоровья фталатов.

Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами использования изделий.

**Венотренажёр KINERAPY VEIN TRAINER****Область и способ применения:**

Занятия с венотренажёром KINERAPY являются эффективным средством профилактики венозной недостаточности у людей, длительное время находящихся в сидячем положении (офисных работников, студентов, школьников).

Венотренажёр KINERAPY также может использоваться как тренажёр с нестабильной поверхностью, который предназначен для тренировки координации движений и баланса. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Показания:

- малоподвижный образ жизни;
- восстановление и реабилитация после:
 - травм опорно-двигательного аппарата;
 - обострения дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата;
 - поражений периферических нервов различного генеза;

- профилактика и лечение состояний, вызванных:
 - вынужденной гиподинамией;
 - угнетением локального кровообращения.

Противопоказания:

- невозможность выполнения реабилитационных методик по комплексу патологий;
- гнойно-септические поражения кожных покровов в непосредственных зонах воздействия изделий;
- неадекватное состояние пациента;
- индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделий.

Побочные действия:

До настоящего времени не выявлены. Изделие при использовании не вызывает нарушений кровообращения и целостности кожных покровов.

Конструкция:

Венотренажёр имеет двустороннюю массажную поверхность, что даёт возможность индивидуально менять степень массажного воздействия в зависимости от выбранной поверхности.

Венотренажёр имеет ниппельное отверстие для регулировки наполнения воздухом.

Правила подбора:

Венотренажёр универсален и может использоваться взрослыми и детьми без ограничений.

Максимальная нагрузка:

150 кг.

Правила использования:

Упражнения с использованием венотренажёра могут выполняться из положений стоя, сидя, в статическом и динамическом режиме с возможностью усложнения тренировки (выполнение упражнений с закрытыми глазами), а также изменения высоты и плотности самого венотренажёра за счет регулирования наполненности воздухом.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Комплектность:

Венотренажёр, инструкция.

Состав: ПВХ.**Правила ухода:**

Изделие очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным раствором. Не используйте щётки, абразивные средства или химические очистители.