

energy line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

ANCLEFLEX

**ОРТЕЗ С ГЕЛЕВЫМИ ПОДУШЕЧКАМИ
НА ГОЛЕНСТОПНЫЙ СУСТАВ И СТОПУ**

DAN-201

WWW.ORLETT.RU

Ортезы Orlett Energy line изготовлены из эластичного материала специальной вязки, обеспечивающего повышенную влаго- и воздухопроницаемость. Технология вязки ортезов Orlett Energy line позволяет достичь плотного анатомического прилегания к суставам и компрессии мягких тканей, способствуя активации кровообращения, снижению отеков и уменьшению болевого синдрома. Гелевые подушечки в области костных выступов стимулируют восстановление проприоцепции («суставного чувства») и стабилизируют суставы.

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез AnkleFlex с гелевыми подушечками на голеностопный сустав и стопу Orlett Energy line, арт. DAN-201, стабилизирует голеностопный сустав. Гелевые подушечки обеспечивают плотное прилегание ортеза к суставу и защиту костных выступов. Эластичная ткань ортезов оказывает компрессионное воздействие на мягкие ткани, а многочисленные мягкие шипы гелевых подушечек оказывают на область сустава массажное воздействие, способствуя улучшению кровообращения и восстановлению поврежденных тканей. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- растяжения мышц и связок сустава;
- состояния после вывихов и подвывихов голеностопного сустава;
- воспаления сухожилий в области голеностопного сустава после травм и операций;
- профилактика обострений и консервативное лечение артрозов, артритов (в том числе ревматических), бурситов, синовитов;
- профилактика травм при нагрузках на голеностопный сустав;
- уменьшение отеков после травм, операций;
- реабилитация после травм и операций на голеностопном суставе.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего использования.

КОНСТРУКЦИЯ



Ортез AnkleFlex на голеностопный сустав Orlett Energy line, арт. DAN-201, состоит из следующих элементов:

1. Манжета.
2. Гелевые подушечки.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Ортез, удерживая двумя руками за середину гелевых вставок, надевают как носок так, чтобы гелевые вставки расположились сразу «за и под» лодыжками. Проконтролируйте положение надетого ортеза на ноге (шов должен проходить по середине пятки).

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность выше костей лодыжки.

Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Размер	Окружность выше костей лодыжки, см
S	16-20
M	20-25
L	25-29
XL	29-34
XXL	более 34

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить изделие. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

35% полиамид, 10% эластан, 5% полиэстер, 25% латекс, 25% термопластический эластомер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. DAN-201, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74411 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

