

energy line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

GENUFLEX
ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

DKN-203

WWW.ORLETT.RU

Ортез Orlett Energy line изготовлен из эластичного материала специальной вязки, обеспечивающего повышенную влаго- и воздухопроницаемость. Технология вязки ортеза позволяет достичь плотного анатомического прилегания к суставам и компрессии мягких тканей, способствуя активации кровообращения, снижению отеков и уменьшению болевого синдрома.

Гелевая подушечка стимулирует восстановление проприоцепции («суставного чувства»).

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез на коленный сустав Orlett Energy line, арт. DKN-203, стабилизирует и разгружает коленный сустав, ограничивает патологические боковые движения. Кольцевидная гелевая подушечка фиксирует коленную чашечку и обеспечивает интенсивную стимуляцию проприорецепторов (рецепторов «суставного» чувства). Спиральные ребра жесткости снижают ударные нагрузки на сустав. Эластичная ткань ортеза оказывает компрессионное воздействие на мягкие ткани, а многочисленные мягкие шипы гелевой подушечки оказывают на область сустава массажное воздействие, способствуя улучшению кровообращения и восстановлению поврежденных тканей. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- боли в коленном суставе при движении;
- ушибы, растяжения связок коленного сустава в подостром периоде;
- профилактика травм коленного сустава и коленной чашечки (надколенника) при занятиях спортом и физическим трудом;
- боли в коленном суставе (пателлофemorальный болевой синдром);
- вывихи надколенника;
- заболевания коленной чашечки (хондромалиция надколенника);
- воспалительные и дегенеративные заболевания (артриты, синовиты, периартикулярные отеки, бурситы и артрозы в начальной стадии);
- реабилитация после травм и операций на коленном суставе.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего использования.

КОНСТРУКЦИЯ




Ортез на коленный сустав Orlett Energy line, арт. DKN-203, состоит из следующих элементов:

1. Манжета.
2. Спиральные ребра жесткости.
3. Кольцевидная гелевая подушечка.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Ортез натянуть на область коленного сустава так, чтобы гелевая подушечка-кольцо расположилась вокруг коленной чашечки.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

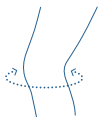

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность середины коленного сустава в положении стоя.

Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность середины коленного сустава, см
S	30-34
M	34-38
L	38-42
XL	42-48
XXL	боле 48

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить изделие. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

33% полиамид, 22% термопластический эластомер, 20% латекс, 10% эластан, 3% полиэстер, 12% сталь.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. DKN-203, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74411 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

