

energy line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**MANUFLEX**

**ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ  
С ГЕЛЕВОЙ ПОДУШЕЧКОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
ЭЛАСТИЧНЫМ РЕМНЕМ-ФИКСАТОРОМ**

**DWR-202**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

Ортез Orlett Energy line изготовлен из эластичного материала специальной вязки, обеспечивающего повышенную влаго- и воздухопроницаемость. Технология вязки ортеза Orlett Energy line позволяет достичь плотного анатомического прилегания к суставам и компрессии мягких тканей, способствуя активации кровообращения, снижению отеков и уменьшению болевого синдрома. Гелевая подушечка в области костных выступов стимулирует восстановление проприоцепции («суставного чувства»).

## СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

---

Ортез Orlett Energy line на лучезапястный сустав, арт. DWR-202, обеспечивает среднюю фиксацию лучезапястного сустава. Гелевая вставка, фиксированная к ткани, обеспечивает плотное прилегание ортеза к суставу, постоянную защиту шиловидного отростка локтевой кости и интенсивную стимуляцию проприорецепторов (рецепторов «суставного чувства»). Дополнительный съемный эластичный ремень-фиксатор позволяет установить нужный уровень давления на область запястья.

Эластичная ткань ортеза оказывает компрессионное воздействие на мягкие ткани, а многочисленные мягкие шипы гелевой вставки оказывают на область сустава массажное воздействие, способствуя улучшению кровообращения и восстановлению поврежденных тканей.

Отпускается без рецепта.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

---

- болевой синдром при травмах и заболеваниях лучезапястного сустава;
- отеки при артрозах и артритах;
- ограничение движения при травмах, ушибах и растяжениях связок лучезапястного сустава;
- реабилитация после снятия гипсовых повязок и лонгет;
- хронические воспаления сухожилий после травм и операций;
- производственные нагрузки на запястье (вибрация, вращение, подъем тяжестей);
- профилактика воспалительных заболеваний сустава при занятиях спортом.

## РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЖИМ

При дополнительных нагрузках на лучезапястный сустав.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

## КОНСТРУКЦИЯ

Ортез Orlett Energy line на лучезапястный сустав, арт. DWR-202, состоит из следующих элементов:

1. Манжета.
2. Гелевая вставка.
3. Съемный эластичный ремень-фиксатор.

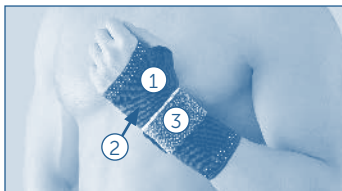

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Ортез подбирается на правую и левую руку. Перед надеванием убедитесь, что выбран правильный вариант ортеза (правый или левый).

1. Расстегните ремень-фиксатор.
2. Натяните ортез на руку так, чтобы гелевая вставка располагалась сверху снаружи, а большой палец поместился в специальный вырез.
3. Отрегулируйте компрессию ортеза с помощью ремня-фиксатора.

## ПРАВИЛА ПОДБОРА



Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность лучезапястного сустава. Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Размер	Окружность лучезапястного сустава, см
S	до 17
M	17-19
L	19-22
XL	22-26
XXL	более 26

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить изделие. Важно, чтобы ортез был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание

и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



## **СОСТАВ**

40% полиамид, 25% латекс, 15% полиэстер, 15% термопластический эластомер, 5% эластан.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Ортопедическое изделие арт. DWR-202, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ** .....

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

