

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению
ортопедических изделий

**ОРТЕЗ НА ГОЛЕНСТОПНЫЙ СУСТАВ
И СТОПУ**

HAS-337



WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Orlett на голеностопный сустав и стопу, арт. HAS-337, обеспечивает стабильную иммобилизацию голеностопного сустава (сохраняет угол строго 90°). За счет расположенной внутри подкладки пневмокамеры позволяет регулировать необходимый уровень внешнего компрессионного воздействия на пораженную область и обеспечивает дополнительную стабилизацию, способствует более быстрому рассасыванию отечной жидкости, гематом.

Закругленный подошвенный контур обеспечивает физиологический перекал при ходьбе и существенно снижает нагрузку на передний отдел стопы (доказано данными бароподометрии в нагрузке).

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- консервативное лечение стабильных переломов дистального отдела малоберцовой кости, лодыжек, костей предплюсны и плюсны;
- реабилитация после операций на вышеуказанных областях;
- повреждения сухожильно-связочного аппарата голеностопного сустава, мягких тканей стопы;
- иммобилизация голеностопного сустава (под углом 90°) при парезе седалищного или малоберцового нерва;
- неинфицированные нейропатические раны переднего отдела стопы.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- наличие кожных заболеваний (необходима консультация лечащего врача);

- хронические облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей с хронической артериальной недостаточностью 3-4 степени (атеросклероз магистральных сосудов, облитерирующий эндартериит, диабетическая ангиопатия);
- диабетическая остеоартропатия Шарко в острой стадии;
- язвенные дефекты, локализованные в заднем отделе стопы;
- хроническая венозная недостаточность с применением компрессионного трикотажа 3-4 класса компрессии и требующая оперативного лечения;
- открытые травмы стопы и голеностопного сустава.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования ортеза.

КОНСТРУКЦИЯ

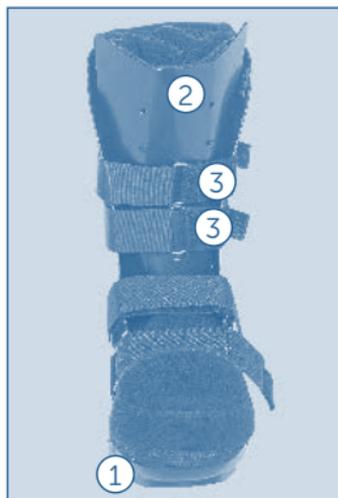


рис. 1

Ортез состоит из следующих компонентов:

1. Пластиковый каркас с двумя фиксированными ремнями с застёжкой велкро.
2. Передняя жёсткая съёмная пластина.
3. Два съёмных ремня с застёжкой велкро.



рис. 2

4. Мягкий внутренний вкладыш с воздушной системой.
- 4а. Ремни с застёжкой велкро на мягком внутреннем вкладыше.
46. Клапан воздушной системы.
5. Передний мягкий съёмный компонент внутреннего вкладыша.
6. В комплект входит манометр с помпой для нагнетания воздуха и измерения давления внутри воздушной системы.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Ослабьте ремни (4а), выньте мягкий внутренний вкладыш (4) и наденьте его на ногу. Убедитесь, что пятка правильно располагается на основании его внутренней части. Плотно зафиксируйте мягкий внутренний вкладыш вокруг стопы и икры застёжками велкро (4а). Присоедините передний мягкий съёмный компонент (5) внутреннего вкладыша, закрывая им пальцы стопы. Не надувайте воздушную систему, пока нога не закреплена внутри ортеза.
2. Согнутую в колене ногу расположите внутри ортеза (1), следя за тем, чтобы пятка разместилась в нижней части ботинка. Установите переднюю (2) (съёмную жёсткую) часть ортеза так, чтобы её края не выходили за края ортеза. С помощью ремней с застёжками велкро (3) зафиксируйте ногу в ортезе.
3. Затягивайте ремни, начиная сверху. Важно затягивать ремни выше и ниже лодыжки туго, а ремни на верхней части голени и нижней части стопы слабее.
4. Надувание и сдувание внутреннего чехла производится через клапан (46), который расположен сверху передней части ортеза.

5. Откройте клапан, вставьте резиновую грушу с манометром и нагнетайте воздух, пока нога внутри ортеза не станет полностью неподвижной. Отсоедините резиновую грушу с манометром от клапана. Важно: при отсоединении резиновой груши с манометром от клапана обязательно придерживать клапан у основания большим и указательным пальцами руки. При необходимости отрегулируйте давление воздуха внутри чехла – оно должно быть комфортным для пациента. Важно: давление внутри надувного чехла не должно превышать уровня диастолического артериального давления пациента.


Возможно, через несколько минут ходьбы возникнет необходимость отрегулировать уровень давления.

Ускорение сдувания производится сдавливанием основания воздушного клапана между пальцами руки.

ВНИМАНИЕ!

Не следует слишком сильно утягивать фиксирующие ремни во избежание нарушения кровообращения.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

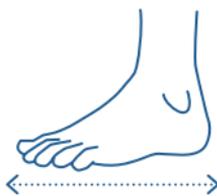

Для корректного подбора ортеза необходимо измерить сантиметровой лентой длину стопы.

Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Длина стопы, см
S/M	от 23 до 27
L/XL	от 27 до 30

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой отсоединить мягкий воздушный вкладыш с воздушной системой для его стирки. Ручная стирка вкладыша при температуре не выше 40°C. Пластиковый каркас обрабатывается отдельно с использованием стандартных антисептиков. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Не применять машинную стирку. Глажение запрещено. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

35% полиэстер, 32% полиамид, 15% полиуретан, 15% термопластичный полиуретан, 3% поливинилхлорид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Орtez должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Орtez утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. HAS-337, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74411 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Арт.: INTO16-HAS-337-N2_08/17