


medical line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

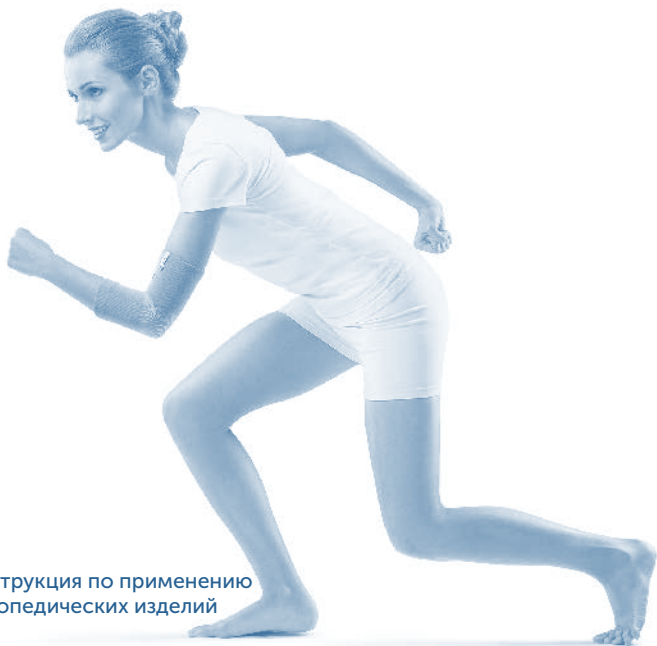

Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ  
НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ**

**MEL-104**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

---

Эластичный бандаж выполнен из современного материала, заменителя хлопка, состоящего из особых полиэфирных волокон с четырехлепестковым поперечным сечением, который обеспечивает активную транспортировку влаги с поверхности кожи на внешнюю поверхность бандажа.

Эластичный бандаж Orlett на локтевой сустав, арт. MEL-104, обеспечивает легкую степень фиксации и компрессию локтевого сустава, способствуя уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу.

Отпускается без рецепта.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

---

- травмы, ушибы, растяжения связок суставов;
- профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний суставов (артритов, тендинитов, тендовагинитов);
- болевой синдром при хронических дегенеративных заболеваниях суставов (артрозах и остеоартрозах);
- профилактика травм при занятиях спортом, производственных нагрузках на сустав.

## РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

---

Для профилактики травм и обострений заболеваний сустава, а также в период реабилитации после травм.

Рекомендованный режим: при нагрузках на сустав (производственных или спортивных).

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

---

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием биндажа необходимо проконсультироваться у врача.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование биндажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

## КОНСТРУКЦИЯ

Биндаж Orlett эластичный на локтевой сустав, арт. MEL-104 (рис. 1), выполнен из современного материала, который способствует интенсивному испарению влаги с поверхности кожи, имеет высокую проницаемость для воздуха, обладает всеми достоинствами изделий из натурального хлопка, но более прочен, износостоек, гигиеничен, чем чистый хлопок, не вызывает аллергии.

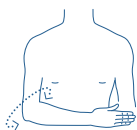


рис. 1

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Удерживая биндаж за верхний край, где расположено название марки Orlett, натяните биндаж на локтевой сустав.

## ПРАВИЛА ПОДБОРА



Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность локтевого сустава.

Согласно полученным результатам подобрать необходимую модель биндажа Orlett по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	S	M	L	XL	XXL
Окружность локтевого сустава, см	24-26	26-28	28-31	31-34	более 34

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка / химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## СОСТАВ

32% полиэстер, 30% хлопок, 23% латекс, 15% эластан.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

---

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

---

Ортопедическое изделие арт. MEL-104, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

---

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

---

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74409 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Производитель:** Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.



