

medical line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**ЭЛАСТИЧНЫЕ БАНДАЖИ  
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ**

**MKN-103**

**SKN-103**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## **СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

---

Эластичный бандаж Orlett на коленный сустав, арт. MKN-103, выполнен из современного материала, заменителя хлопка, состоящего из особых полиэфирных волокон с четырехлепестковым поперечным сечением, которые обеспечивают активную транспортировку влаги с поверхности кожи на внешнюю поверхность бандажа.

Эластичный бандаж Orlett на коленный сустав, арт. SKN-103, выполнен из современного материала, технологичного заменителя шерсти, при создании которого керамический порошок добавляют в структуру полимерной нити, переплетенной в строго определенном порядке по специальной технологии.

Бандаж Orlett, арт. MKN-103, обеспечивает компрессионный эффект, легкую степень фиксации коленного сустава, способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу.

Бандаж Orlett, арт. SKN-103, обеспечивает легкую степень фиксации коленного сустава, сохраняет тепло и улучшает кровообращение мягких тканей, прилегающих к суставу

Отпускается без рецепта.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

---

- травмы, ушибы, растяжения связок суставов;
- профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний суставов (артритов, тендинитов, тендовагинитов);
- болевой синдром при хронических дегенеративных заболеваниях суставов (артрозах и остеоартрозах);
- профилактика травм при занятиях спортом, производственных нагрузках на сустав.

## **РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ**

---

Для профилактики травм и обострений заболеваний сустава, а также в период реабилитации после травм. Рекомендованный режим: при нагрузках на сустав (производственных или спортивных).

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

---

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

---

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием бандажа необходимо проконсультироваться у врача.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

## КОНСТРУКЦИЯ

---



Бандаж Orlett, арт. MKN-103, выполнен из современного материала, который способствует интенсивному испарению влаги с поверхности кожи, имеет высокую проницаемость для воздуха, обладает всеми достоинствами изделий из натурального хлопка, но более прочный, износостойкий и гигиеничный, чем чистый хлопок, не вызывает аллергии и раздражения кожи.


Бандаж Orlett, арт. SKN-103, выполнен из современного материала, который сохраняет тепло и улучшает кровообращение в области сустава, усиливает лечебный эффект наружных лекарственных средств (мази, гели, кремы); обладает всеми достоинствами изделий из натуральной шерсти, но более прочный, износостойкий и гигиеничный. Не вызывает аллергии и раздражения кожи.

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

---

Бандаж натягивается на колено так, чтобы вставка специальной вязки располагалась в области коленного сустава, при этом название марки Orlett должно расположиться спереди, сверху.

## ПРАВИЛА ПОДБОРА

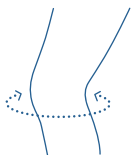

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность середины коленного сустава.

Согласно полученным результатам подобрать необходимую модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	XS*	S	M	L	XL	XXL
Окружность середины коленного сустава, см	до 30	30-35	35-40	40-45	45-50	более 50

\* только для МКН-103.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется при- мерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## **СОСТАВ**

---

Бандаж Orlett, арт. MKN-103: 32% полиэстер, 30% хлопок, 23% латекс, 15% эластан.

Бандаж Orlett, арт. SKN-103: 40% хлопок, 27% полиамид, 10% эластан, 23% латекс.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

---

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

---

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

---

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

---

Бандаж Orlett, арт. MKN-103: ортопедическое изделие арт. MKN-103, инструкция по применению.

Бандаж Orlett, арт. SKN-103: ортопедическое изделие арт. SKN-103, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

---

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ** .....

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09550 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74410 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

