


medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

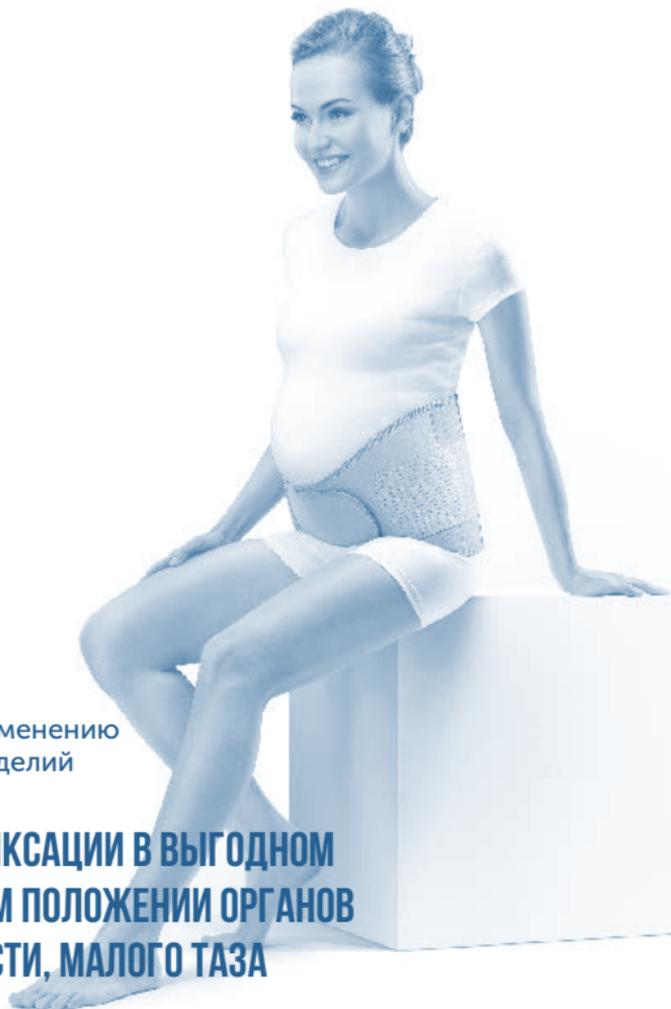

Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**БАНДАЖ ДЛЯ ФИКСАЦИИ В ВЫГОДНОМ  
ФИЗИОЛОГИЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОРГАНОВ  
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, МАЛОГО ТАЗА**

**MS-99**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## **СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

---

Бандаж-корсет Orlett (дородовый для беременных), арт. MS-99, осуществляет поддержку живота, способствуя нормализации положения плода, снижает нагрузку на поясничный отдел позвоночника за счет фиксации поясничной области при помощи ребер жесткости, уменьшает дискомфорт и боли в спине. Способствует снижению риска развития гипертонуса матки, предупреждению излишнего растяжения мышц и кожи и появлению «растяжек» живота, особенно при многоводии, многоплодии. Отпускается без рецепта.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

---

- поддержка живота во 2-ой и 3-й триместры беременности на фоне заболеваний позвоночника;
- снижение нагрузки на поясничный отдел позвоночника во время беременности;
- уменьшение и предупреждение возникновения болей в спине;
- немедикаментозное лечение радикулитов и люмбаго, возникших во время беременности;
- профилактика осложнений на фоне беременности (обеспечение нормального положения плода, снижение давления на органы малого таза и др.);
- многоводие, многоплодие;
- гипертонус матки;
- профилактика перерастяжения мышц и кожи живота, образования стрий (растяжек).

## **РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ**

---

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Рекомендованный режим: носят в течение всего дня.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- невраправимые грыжи передней брюшной стенки;
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача.

Людам с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

## КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж изготовлен из прочного эластичного медицинского полотна, проницаемого для воздуха и влаги с высокой износостойкостью. Ткань биологически инертна, не вызывает аллергических реакций.

На рисунке отмечены:

1. Пояс с застежкой-липучкой велкро.
2. Дополнительные затяжки с застежками-липучками велкро.
3. Четыре ребра жесткости



рис. 1


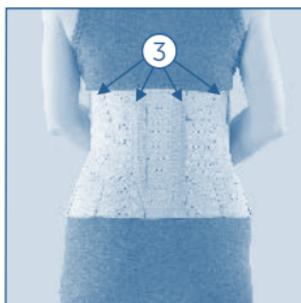


рис. 2

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж рекомендуется надевать утром, лежа, перед подъемом с постели. Пояс (1) бандажа расположить в лобковой области, под животом, и застегнуть с помощью застежки-липучки велкро. Затем бандаж зафиксировать дополнительными лентами натяжения (2).

## ПРАВИЛА ПОДБОРА

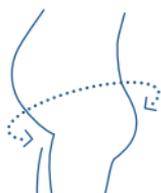

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность туловища сзади на уровне поясничного отдела, спереди под животом. Согласно полученным результатам подобрать бандаж Orlett по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность туловища под животом, см
S	до 85
M	85-97
L	97-105
XL	105-115
XXL	более 115

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушику в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## **СОСТАВ**

30% полиэстер, 25% полиамид, 10% полиуретан, 10% хлопок, 8% эластан, 5% латекс, 10% сталь, 2% поливинилхлорид.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Ортопедическое изделие арт. MS-99, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ** .....

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74409 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

