

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

ОРТЕЗ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ И РУКУ

SI-311

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез Orlett на плечевой сустав и руку (фиксирующий ортез на плечевой пояс), арт. SI-311, применяется для фиксации плечевого сустава в положении небольшого (10-15°) отведения. Конструкция позволяет использовать ортез как на левую, так и на правую руки. Мягкий материал airvelvet обеспечивает комфорт при длительном ношении ортеза.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- иммобилизация при переломах хирургической шейки плеча с незначительным смещением, головки плеча и суставного конца лопатки, тела лопатки;
- состояния после вправления вывиха плечевой кости;
- состояния после операций на плечевом суставе;
- состояния после остеосинтеза ключицы или плеча, нуждающиеся во временной послеоперационной иммобилизации;
- артрозы, артриты;
- параличи верхних конечностей;
- плекситы, невриты.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- локальные (в области применения ортеза) дерматиты и гнойничковые инфекции кожи;
- неудовлетворительный результат ранее проводимого консервативного лечения;
- воспалительные заболевания в стадии обострения;
- фиксированные деформации, требующие оперативной коррекции;
- злокачественные новообразования с болевым синдромом;
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться у врача.

Людям с чувствительной кожей следует надевать ортез на майку с длинным рукавом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

КОНСТРУКЦИЯ

Цифры на рис. 1, 2, 3 и 7 соответствуют следующим элементам конструкции:

1. Муфта на плечевой сустав и руку с фиксирующим поясом.
2. Валик-подушка (рис. 7).
3. Фиксирующий элемент на руку.
4. Ремень, фиксирующий положение плеча.
5. Ремень, фиксирующий положение кисти. При необходимости можно использовать этот ремень для фиксации положения локтевого сустава.
6. Застежка-липучка велкро для фиксации пояса муфты на печевой сустав и руку (рис. 3).
7. Застежка-липучка велкро для фиксации руки в муфте (рис. 3).

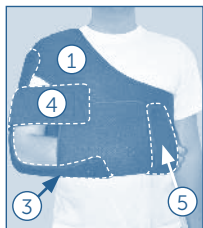


рис. 1

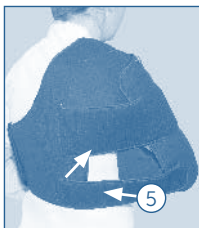


рис. 2



рис. 3

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Наложить муфту (1) на область плечевого сустава (рис. 4)
2. Зафиксировать сбоку пояс муфты съемными застежками-липучками велкро (6) (рис. 5).
3. Расположить в муфте руку и зафиксировать ее в нужном положении с помощью застежек-липучек велкро (7) (рис. 6).
4. Подложить валик-подушку (2) под плечо (рис. 7).
5. Дополнительно зафиксировать положение руки при помощи фиксирующего элемента на руку (3) (рис. 8).
6. Зафиксировать положение плеча при помощи ремня (4), фиксирующего положение плеча (рис. 9).
7. При необходимости зафиксировать положение кисти при помощи фиксирующего ремня (5) (рис. 1).



рис. 4



рис. 5



рис. 6



рис. 7



рис. 8




рис. 9

ВАЖНО

Изделие универсальное (для правой и левой руки). Изделие упаковано для правого плечевого сустава и руки.

При необходимости лечения левого плечевого сустава необходимо вывернуть муфту на другую сторону.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

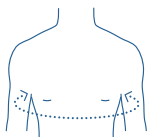

Для корректного подбора ортеза Orlett, арт. SI-311, необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность грудной клетки на уровне подмышечных впадин.

Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

| Размер | Окружность грудной клетки, см |
|--------|-------------------------------|
| XS | 72-81 |
| S | 81-89 |
| M | 89-97 |
| L | 97-105 |
| XL | 105-113 |
| XXL | 113-122 |

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез Orlett. Важно, чтобы ортез Orlett был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

60% полиуретан, 40% полиамид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. SI-311, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Art.: INTO16-SI-311-N2_08/17