

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

**ОРТЕЗ НА ГОЛЕНСТОПНЫЙ СУСТАВ И СТОПУ
(ДЕРОТАЦИОННЫЙ ОРТЕЗ)**

TAN-201 F

WWW.ORLETT.RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Нижняя треть голени, голеностопный сустав и стопа.

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез на голеностопный сустав и стопу (деротационный ортез), арт. TAN-201 F, обеспечивает надежную фиксацию нижней трети голени, голеностопного сустава и стопы, препятствуя внутренней и наружной ротации бедра.

Предназначен для реабилитации только в положении лежа.

Ортез надевается непосредственно на тело. Благодаря системе фиксирующих ремней надежно фиксирует и стабилизирует нижнюю конечность в функционально выгодном положении (диапазон 90-45°) за счет Т-образной планки, крепящейся к ортезу поверхностью велкро. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- переломы шейки бедра;
- межвертельные переломы бедра;
- ранняя послеоперационная реабилитация пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава;
- парезы и параличи нижних конечностей различного генеза;
- реабилитационный период после острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт);
- поражения нервов нижней конечности;
- плантарный фасциит.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза;
- сгибательные (разгибательные) контрактуры голеностопного сустава (т.е. в направлении подошвы стопы).

- индивидуальная непереносимость материалов изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться с врачом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.


КОНСТРУКЦИЯ

Ортез состоит из пластикового каркаса, внутренней части из комфортного, мягкого материала, системы фиксирующих ремней и ограничительной планки, предотвращающей ротацию конечности.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Ортез надевается непосредственно на тело, фиксируется системой ремней. Ограничительная планка фиксируется застежкой велкро лечащим врачом в необходимом положении.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

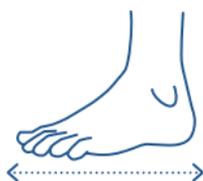

Для корректного подбора ортеза необходимо измерить сантиметровой лентой длину стопы.

Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Длина стопы, см
S/M	20,5-24
L/XL	24-29

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется при- мерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

СОСТАВ

20% полиуретан, 15% полиамид, 8% полиэстер, 3% сталь, 40% полипропилен, 12% акрилонитрилбутадиенстирол, 2% полиоксиметилен.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. TAN-201 F, инструкция по применению.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74411 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

