

junior line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

КОРРЕКТОР ОСАНКИ

TLSO-250(P)

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортопедический корректор осанки позволяет поэтапно корригировать нарушения осанки за счет формирования мышечно-суставного стереотипа правильной осанки, в том числе в детском и подростковом возрасте. Механизм коррекции сочетает горизонтальную и вертикальную реклинацию за счет натяжения нерастяжимых наплечных лямок корректоров. Корректор осанки обеспечивает разведение ключиц, сведение и опущение лопаток за счет нерастяжимых наплечных лямок и ребер жесткости, расположенных вдоль позвоночника в проекции поперечных отростков позвонков.

Отпускается без рецепта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- компенсирует дефицит опорности;
- нормализует тонус мышц проблемных участков спины;
- снижает нагрузки на межпозвонковые диски;
- снижает травматизацию корешков нервов;
- фиксирует и стабилизирует проблемные отделы позвоночника;
- разгружает позвонки и предохраняет их от дальнейшего смещения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- нарушения осанки;
- искривления грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I–II степени);
- остеохондропондилопатии (болезни Кальве, Шейермана-Мау);
- профилактика сутулости при сидячей работе;
- травмы и реабилитация после травм грудного и поясничного отделов позвоночника;
- закрепление достигнутых эффектов после процедур массажа или мануальной терапии.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения корректора осанки назначает лечащий врач. Для TLSO-250(P) перед первым применением необходимо вынуть

ребра жесткости и изогнуть их индивидуально (под контролем врача или техника-ортопеда).

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЖИМ НОШЕНИЯ КОРРЕКТОРА ОСАНКИ

- начиная с 1-1,5 часов в первый день, постепенно, в течение 2-х недель, доводя до 6-ти часового ношения в день;
- постоянное в течение 4-х – 6-ти часов в день (в зависимости от возраста ребенка) в течение 2-х месяцев;
- постепенно в течение 2-х недель снизить до 1-1,5 часов;
- по прошествии 3-х месяцев обязательно проконсультироваться с лечащим врачом!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- диафрагмальные грыжи;
- невосприимчивые грыжи брюшной стенки;
- синдром портальной гипертензии;
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения корректора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием корректора осанки необходимо проконсультироваться с врачом.

Людам с чувствительной кожей следует надевать корректор осанки на нижнее белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения корректора осанки.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать корректор осанки слишком сильно, во избежание нарушения дыхания.

КОНСТРУКЦИЯ

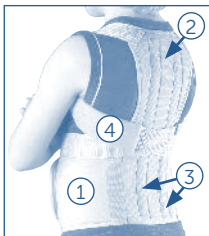


рис. 1

Ортопедический корректор осанки Orlett состоит из следующих элементов (цифры на рисунке 1 соответствуют элементам конструкции):

1. пояс корректора;
2. неэластичная спинка;
3. металлические ребра жесткости;
4. наплечные неэластичные лямки.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Перед использованием корректора осанки необходимо индивидуально изогнуть ребра жесткости под контролем врача или техника-ортопеда. Корректор следует надевать на нижнее белье.

1. Корректор осанки закрепить на животе поясом с застежкой велкро (рис. 2).
2. Расположить ребра жесткости симметрично относительно позвоночного столба. Пропустить лямки корректора под мышками и перекрестить их на спине (рис. 3).
3. Расположить мягкие муфты на лямках корректора так, чтобы они защищали надплечья.
4. Расправить плечи и зафиксировать положение плечевого пояса, застегнув лямки с застежками-липучками велкро на животе (рис. 4).



рис. 2

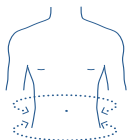


рис. 3



рис. 4

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для подбора размера сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность талии и бедер.

Согласно полученным результатам подобрать корректор осанки Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Рост, см	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
S	100-120	45-52
M	120-140	52-58
L	140-160	58-65

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корректор осанки. Важно, чтобы корректор осанки был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

25% полиэстер, 18% хлопок, 17% эластан, 10% полипропилен, 10% полиуретан, 8% полиамид, 10% алюминий, 2% поливинилхлорид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корректор осанки должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Корректор осанки утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования корректора осанки дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корректора осанки без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корректора осанки. Не допускается эксплуатация поврежденного корректора осанки.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. TLSO-250(P), инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

