

medical line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**КОРРЕКТОР ОСАНКИ**

**TLSO-251(F)**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

---

Корректор осанки ортопедический позволяет поэтапно корректировать нарушения осанки за счет формирования мышечно-суставного стереотипа правильной осанки. Механизм коррекции сочетает горизонтальную и вертикальную реклинацию за счет натяжения нерастяжимых наплечных лямок корректоров.

Корректор осанки обеспечивает разведение ключиц, сведение и опущение лопаток за счет нерастяжимых наплечных лямок и ребер жесткости, расположенных вдоль позвоночника в проекции поперечных отростков позвонков.

Отпускается без рецепта.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

---

- компенсирует дефицит опорности;
- нормализует тонус мышц проблемных участков спины;
- снижает нагрузки на межпозвонковые диски;
- снижает травматизацию корешков нервов;
- фиксирует и стабилизирует проблемные отделы позвоночника;
- разгружает позвонки и предохраняет их от дальнейшего смещения.

Особенностью конструкции является наличие эластичного пояса, дополнительно обеспечивающего уравнивание тонуса мышц, участвующих в удержании положения тела. Наличие пояса позволяет дополнительно фиксировать и разгружать поясничный отдел позвоночника при наличии болей.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

---

- нарушения осанки;
- искривления грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I–II степени);
- остеохондропондилопатии (болезни Кальве, Шойермана-Мау);
- профилактика сутулости при сидячей работе;
- травмы и реабилитация после травм грудного и поясничного отделов позвоночника;
- закрепление достигнутых эффектов после процедур массажа или мануальной терапии.
- профилактика переломов при остеопорозе, опухолях и туберкулезном процессе.

## РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

---

Режим и сроки ношения корректора осанки назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЖИМ НОШЕНИЯ КОРРЕКТОРА ОСАНКИ

---

- начиная с 1-1,5 часов в первый день, постепенно, в течение 2-х недель, доводя до 6-ти часового ношения в день;
- постепенно в течение 2-х недель снизить до 1-1,5 часов;
- по прошествии 3-х месяцев обязательно проконсультироваться с лечащим врачом!

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

- беременность;
- диафрагмальные грыжи;
- невправимые грыжи брюшной стенки;
- синдром портальной гипертензии;
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения корректора.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

---

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием корректора осанки необходимо проконсультироваться с врачом.

Людям с чувствительной кожей следует надевать корректор осанки на нижнее белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения корректора осанки.

## ВНИМАНИЕ!

---

Не следует затягивать корректор осанки слишком сильно во избежание нарушения дыхания.

## КОНСТРУКЦИЯ

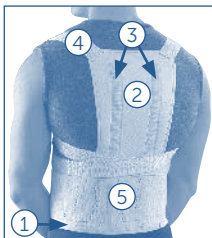


рис. 1

Корректор осанки ортопедический Orlett, арт. TLSO-250(A), состоит из следующих элементов (цифры на рисунке соответствуют элементам конструкции):

1. пояс корректора;
2. нерастяжимая спинка;
3. металлические ребра жесткости;
4. наплечные нерастяжимые лямки;
5. дополнительный эластичный пояс.

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Перед использованием корректора осанки необходимо индивидуально изогнуть ребра жесткости под контролем врача или техника ортопеда. Корректор следует надевать на нижнее белье.

1. Корректор осанки закрепить на животе поясом с застежкой велкро (рис. 2).
2. Расположить ребра жесткости симметрично относительно позвоночного столба. Пропустить лямки корректора под мышками и перекрестить их на спине (рис. 3).
3. Расположить мягкие муфты на лямках корректора так, чтобы они защищали надплечья.
4. Расправить плечи и зафиксировать положение плечевого пояса, застегнув лямки с застежками-липучками велкро на животе (рис. 4).
5. Зафиксировать корректор осанки дополнительным эластичным поясом.



рис. 2

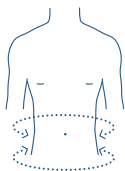


рис. 3



рис. 4

## ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для подбора размера корректора осанки сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность талии и бедер и учитывается рост пациента.

Согласно полученным результатам подобрать корректор осанки Orlett по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Рост, см	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
S	150-160	60-75
S1	160-170	60-75
M	160-170	70-85
M1	170-180	70-85
L	170-180	80-95
L1	180-190	80-95
XL	180-190	90-110
XL1	190-200	90-110
XXL	190-200	110-130
XXL1	200-210	110-130

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корректор осанки. Важно, чтобы корректор осанки был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане.

Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## **СОСТАВ**

27% полиэстер, 17% хлопок, 17% эластан, 8% полипропилен, 8% полиуретан, 8% полиамид, 3% латекс, 10% алюминий, 2% поливинилхлорид.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Корректор осанки должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Корректор осанки утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности не установлен.

Возможность использования корректора осанки дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корректора осанки без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корректора осанки. Не допускается эксплуатация поврежденного корректора осанки.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Ортопедическое изделие арт. TLSO-250(A), инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

---

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

---

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Арт.: INTO16-TLSO-251(F)-N2\_08/17