

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

ОРТЕЗ НА ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫЕ СУСТАВЫ

WFG-100

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез Orlett на пястно-фаланговые суставы, арт. WFG-100, обеспечивает сильную фиксацию пястно-фаланговых и межфаланговых суставов. Металлическая шина фиксирует пястно-фаланговые и межфаланговые суставы в заданном положении. Ограничивает подвижность, снижает болевой синдром, фиксирует лучезапястный сустав в физиологически правильном положении. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- травмы, ушибы, растяжения 2-4 пальцев руки;
- недостаточность связочного аппарата пястно-фаланговых суставов;
- артрозы и ревматические поражения лучезапястного и пястно-фалангового суставов (2-4 пальцев руки);
- тендовагиниты области пальцев кисти.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Для профилактики травм и заболеваний суставов рекомендованный режим: при нагрузках на сустав (спортивных, производственных).

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- острые гнойные воспалительные заболевания (в области применения ортеза);
- опухолевые заболевания в области применения ортеза;
- индивидуальная непереносимость материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться со специалистом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или

раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

КОНСТРУКЦИЯ

Ортез Orlett, арт. WFG-100, состоит из следующих элементов:

1. Манжета.
2. Шина.
3. Фиксирующие ремни (5 шт.).

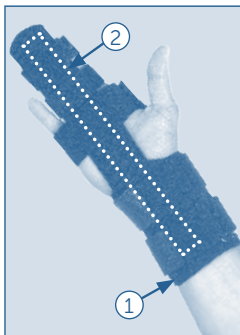


рис. 1

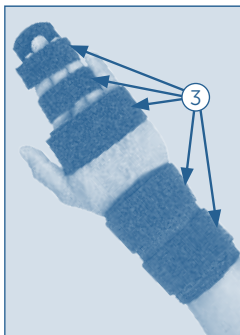


рис. 2

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

При необходимости предварительно вынуть и изогнуть металлическую шину (2), подогнав под индивидуальные особенности строения руки. Расстегнув все ремни, расположить кисть на изделии таким образом, чтобы шина располагалась под иммобилизируемой областью по ладонной поверхности кисти. Обхватить дистальную часть предплечья манжетой, застегнув застёжку велкро и фиксирующие ремни (3). Зафиксировать кисть и необходимые для иммобилизации пальцы остальными фиксирующими ремнями. Не затягивать ремни чрезмерно сильно во избежание нарушения кровообращения. Возможно, через несколько минут ходьбы возникнет необходимость отрегулировать уровень давления.

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность лучезапястного сустава. Согласно полученным результатам подобрать ортез по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность лучезапястного сустава, см
S/M	14-18
L/XL	18-22

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

48% полиамид, 20% полиуретан, 10% полиэстер, 5% эластан, 12% алюминий, 5% полиэтилен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. WFG-100, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

