

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЕ КОЛЫЦА (ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

TAOS Gel

Арт. F-00041-04B; 05B; 06B



Мягкие и комфортные защитные кольца TAOS изготовлены из износостойкого трикотажа. Внутри трикотажного кольца имеется подушка из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен для кожи и не вызывает аллергии. При постоянном использовании защитные кольца TAOS эффективно помогают устранить боль и дискомфорт при мозолях, потертостях, деформациях, лечении ушибов и воспалений суставов пальцев ног. Кольца TAOS предназначены для многообразного применения и идеально подходят для чувствительной кожи.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ-ПЕЛОТ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ (ЗАЩИЩАЮЩИЙ)

FORMA Gel

Арт. F-00043-01B; 02B



Мягкий, комфортный гелевый пелот FORMA сделан из специального полимерного геля TRIBLOCK, безопасного для кожи и не вызывающего аллергии. Подушка прочно крепится на основе мягкой трикотажной эластичной манжеты. Для использования изделия на правой и левой ногах манжету выворачивают наизнанку. При постоянном использовании гелевые пелоты FORMA помогают быстро и эффективно устранить болье ощущения и дискомфорт в чувствительных частях стопы при натоптышах, мозолях, потертостях, воспалении кожи и на ранках стадиях Hallux valgus («ногти») на ногах при отклонении больших пальцев наружу). Пелот переднего отдела стопы FORMA предназначены для многообразного применения во всех типах обуви и идеально подходят для чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- мозоли межфаланговых суставов;
- молоткообразные пальцы;
- перераставшие пальцы;
- когтеобразные пальцы;
- профилактика образования мозолей и травмирования пальцев об обувь;
- для использования в любом типе обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: надевается на палец стопы на поврежденное место.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- быстро уменьшает болевые ощущения и дискомфорт;
- защита от контакта с обувью;
- эффективное смягчение кожи в области контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых, кровоточащих и молющих ранках.

СОСТАВ: гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют смягчению мозолей.

УХОД: кольца ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего гелевую поверхность приподнимают пальцем или детской присылкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР: S, M, L.

КРУГЛЫЕ ГЕЛЕВЫЕ ВСТАВКИ (КОРРИГИРУЮЩИЕ)

INTON Gel

Арт. 00054-01B; 02B



Мягкие и комфортные мекпальцевые вставки INTON изготовлены из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен для кожи и не вызывает аллергии. При постоянном использовании гелевые вставки INTON помогают быстро и эффективно устранить болевые ощущения и дискомфорт в межпальцевых промежутках при мозолях, потертостях, деформациях, лечении ушибов и воспалений суставов пальцев ног. Вставки INTON предназначены для многообразного применения и идеально подходят для чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
- мозоли в прощиях межфаланговых суставов;
- молоткообразные пальцы;
- потертости;
- повреждения кожи пальцев стопы;
- вросшие ногти;
- состояния после операции по поводу Hallux valgus.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: изделие размещают между пальцами стоп (чаще вкладывают между первым и вторым пальцами). Более широкая часть должна располагаться с подошвенной стороны стопы.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: • раздвигает прищипые друг к другу пальцы; • предотвращает трение, потертости, мозоли; минеральное масло в составе геля TRIBLOCK эффективно смягчает кожу.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых и молющих ранках.

СОСТАВ: гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют смягчению мозолей.

УХОД: вставки ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего приподнимают пальцем или детской присылкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР: S, L.

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЕ БУРСОПРОТЕКТОР (ЗАЩИЩАЮЩИЙ)

ALTIS Gel

Арт. F-00042-07B



При постоянном использовании прокладка ALTIS эффективно помогает устранить болевые ощущения и дискомфорт в «ногтеочах» плоскостопных суставов больших пальцев при потертостях, деформациях, ушибах и воспалениях на фоне Hallux valgus, а так же при подагре, отклонении солей, артрозе и воспалении кожи сустава.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- начальная степень Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
- артрозо-артриты и бурситы первого плоскостопного сустава;
- мозоли и натоптыши в области первого плоскостопного сустава;
- подагра;
- послеоперационный период.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: надевается кольцом на первый палец гелевой поверхностью к коже и располагается в области первого плоскостопного сустава. Прокладка ALTIS удобно крепится на большом пальце, предназначена для многообразного применения и идеально подходит для чувствительной кожи. Надев прокладку ALTIS PLUS, можно ходить во всех типах обуви.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: • защита от давления, трения и образования потертостей воспаленной суставной сумки первого плоскостопного сустава;- защита от контакта с обувью;
- эффективное смягчение кожи в области контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых и молющих ранках.

СОСТАВ: гелевая пластина, покрытая с внешней стороны тканью. Гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют смягчению мозолей.

УХОД: бурсопротектор ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего гелевую поверхность приподнимают пальцем или детской присылкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР: универсальный.

ГЕЛЕВАЯ ПОДУШКА БУРСОПРОТЕКТОР (ЗАЩИЩАЮЩАЯ)

ALTIS PLUS Gel

Арт. F-00042-05B



Мягкая и комфортная гелевая подушка (бурсопротектор) ALTIS PLUS сделана из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен для кожи и не вызывает аллергии. При постоянном использовании гелевая подушка ALTIS PLUS помогает быстро и эффективно устранить болевые ощущения и дискомфорт в «ногтеочах» плоскостопных суставов больших пальцев при потертостях, деформациях, ушибах и воспалениях на фоне Hallux valgus, а так же при подагре, отклонении солей, артрозе и воспалении кожи сустава.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- консервативное лечение Hallux valgus (вальгусная деформация большого (первого) пальца стопы);
- фиксация в правильном положении после оперативного лечения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

бандаж Dans следует надевать только на время сна и снимать перед подъемом с постели. После операции следует применять бандаж Dans после заживления кожи. При наличии диабета перед применением проконсультируйтесь у врача. Натяжение банджа постепенно усиивают до полного излечения (исправления) деформации пальца).

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- применение при начальной и средней степени нефиксированного Hallux valgus (отклонение первого пальца стопы наружу) для возврата большого пальца стопы в нормальное положение;
- применение бандаж Dans после операции по поводу Hallux valgus повышает эффективность реабилитации;
- фиксирует и стабилизируют развитие деформации сустава большого пальца;
- нормализуют тонус связок и мышц стопы.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых и молющих ранках.

СОСТАВ: пластиковый рама с пенополиуретановыми накладками и застегивающ «клерко».

УХОД: бандаж периодически моют теплой водой с детским мылом, после чего сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР: S (34-36), M (37-40), L (41-44).

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
- артрозо-артриты и бурситы первого плоскостопного сустава;
- мозоли и натоптыши в области первого плоскостопного сустава;
- подагра;
- послеоперационный период.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: надевается кольцом на первый палец и распологается в области первого плоскостопного сустава. Подушка ALTIS PLUS удобно крепится на большм пальце, предназначена для многообразного применения и идеально подходит для чувствительной кожи. Надев подушку ALTIS PLUS, можно ходить в любых типах обуви.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: • защита от давления, трения и образования потертостей воспаленной суставной сумки первого плоскостопного сустава;- защита от контакта с обувью;
- эффективное смягчение кожи в области контакта с гелем;
- подушка прочно удерживается в области сустава.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых и молющих ранках.

СОСТАВ: гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют смягчению мозолей.

УХОД: бурсопротектор ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего гелевую поверхность приподнимают пальцем или детской присылкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР: универсальный.

ГЕЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ВКЛАДЫШИ ОТ НАТОПТЫШЕЙ (ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

JOLLI* Gel

Арт. F-00073



Гелевые защитные вкладыши от натоптышей JOLLI* предназначены для защиты подошвенной части переднего отдела стопы при натоптышах, мозолях и трещинах. Мягкая рельефная поверхность гелевых вкладышей эффективно предотвращает скольжение стоп в обуви и существенно повышает комфорт при ходьбе.

СВОЙСТВА ТОВАРА

- Гелевые вкладыши применяются при: - мозолях и деформациях плоскостопных суставов;
- натоптышах, мозолях, трещинах, потертости в основании пальцев;
- поперечной и средней степени Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: размещается в обуви в области плоскостопных суставов.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ: • защищает от контакта с обувью;- эффективно смягчают кожу в области контакта с гелем;
- защищают передний отдел стопы от ударных нагрузок (натртыши в любом типе модельной обуви).

ОГРАНИЧЕНИЯ:

не использовать при открытых, кровоточащих и молющих ранках.

СОСТАВ: гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют смягчению мозолей.

УХОД: вкладыши моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Изделия из геля могут повторно использовать после мытья или очистки.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР: универсальный.

* Товар не является медицинским изделием и не подлежит обязательной сертификации.

ЭЛАСТИЧНАЯ СТЯЖКА ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ (РАЗГРУЖАЮЩАЯ)

VESTA Gel

Арт. F-00009-01; 02; 03



Удобная эластичная ортопедическая стяжка VESTA возвращает кости стопы в анатомически правильное положение. Упругий пелот стяжки VESTA бережно и надежно поддерживает нормальную арочную форму стопы. При постоянном использовании стяжки VESTA уменьшается утомляемость стопы при ходьбе, уменьшает усталости и боли при плоскостопии и Hallux valgus («ногти») на ногах при отклонении больших пальцев наружу). Стяжка VESTA удобно крепится на стопе и предназначена для многообразного применения. Стяжка VESTA носят в широкой обуви 2-4 часа в день.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- поперечная расплстанность стоп;
- начальная и средняя степени Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
- травмы и деформации плоскостопных суставов;
- профилактика для многообразного применения в широкой повседневной обуви.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: манжету-стяжку надевают (натягивают) на стопу так, чтобы пелот полимерного свадки стяжки располагался в области поперечного свода.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- эффективно поддерживает нормальную арочную форму переднего отдела стопы;
- нормализует анатомическое положение костей стопы;
- уменьшает отек стопы;
- уменьшает в стопах боль и дискомфорт;
- изделие предназначено для лечения комбинированного и поперечного плоскостопия.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых и молющих ранках.

СОСТАВ: изделие состоит из эластичной трикотажной стяжки и пелота из вулканизированного латекса.

УХОД: стяжку периодически стирают в теплой воде с детским мылом, после чего сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 30 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР: S 16,5 см; M 18 см; L 19 см (длина орнументности стопы в области предплюсны).

ORTMANN®

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СИЛИКОНОВЫЕ

SolaMed LEDA

Арт. F-00035-01; 02; 03

Силиконовые стельки снимают боль и дискомфорт при ходьбе, особенно на фоне трещин кожи в подошвенной области.

Износостойкий гипоаллергенный силикон не вызывает контактной реакции. Стельки SolaMed LEDA особенно эффективны при диабетической стопе.

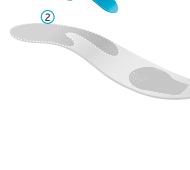

- 1 Амортизатор из эластичного силикона
2 Каркас из упругого силикона

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВАЯ ПОДУШЕЧКА БУРСОПРОТЕКТОР (ЗАЩИЩАЮЩАЯ)

ALTIS MINI Gel

Арт. F-00042-10



Мягкая и комфортная гелево-тканевая подушечка ALTIS MINI сделана из специального полимерного геля TRIBLOCK, безопасного для кожи и не вызывающего аллергии.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
• артро-артриты и бурситы первого плюснефалангового сустава;
• натоптыши в области первого плюснефалангового сустава;
• подагра;
• послеоперационный период.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
эластичную манжету надевают на область плюснефаланговых суставов, располагая большой палец в меньшей части стельки.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых, кровоточащих и мокнувших ранах.

СОСТАВ: трикотажная манжета с разделителем, внутри которой вставлена гелевая подушечка. Гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла улаивают кожу и способствуют смягчению мозолей.

УХОД: изделие периодически моют в теплой воде с детским мылом, после чего сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 30 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств). КОМПЛЕКТНОСТЬ: 1 шт. в упаковке. РАЗМЕР: универсальный.


ПОЛУСТЕЛКИ-СУПИНАТОРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

SolaMed MESIN

Арт. F-00040-04B; 05B; 06B; 07B; 08B; 09B

Ортопедические стельки MESIN изготовлены из силикона двух различных удельных жесткости. Зона синевого цвета более мягкая, что обеспечивает дополнительную амортизацию в пяточной области и области пятки.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах. Применять не более 16 часов в день.

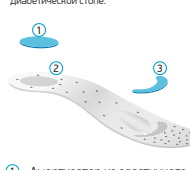

- 1 Амортизатор из эластичного силикона
2 Каркас из упругого силикона
3 Амортизатор в области плюсны

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЕ ПОДУШЕЧКИ (ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

TARSO Gel

Арт. F00011-01; 02



Тонкие комфортные подушечки TARSO изготовлены из специального геля TRIBLOCK, покрытого с 2-х сторон чрезвычайно мягкой эластичной тканью. Подушечки TARSO имеют тонкий профиль, поэтому занимают мало места в обуви.


ПОЛУСТЕЛКИ-СУПИНАТОРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

SolaMed POLIN

Арт. F-00038-01; 02; 03

Силиконовые полустельки уменьшают чувство усталости и тяжести в ногах. Рельеф полустельки поддерживает свода стопы, предотвращает развитие плоскостопия.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах. Применять не более 16 часов в день.

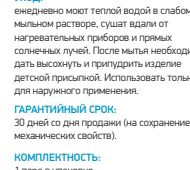

- 1 Амортизатор из эластичного силикона
2 Каркас из упругого силикона

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- травмы и деформации плюснефаланговых суставов;
• трещины;
• потертости;
• травмы и деформации плюснефаланговых суставов;
• поперечная расплывчатость стоп, осложненная натоптышами в основании пальцев;
• после операций на плюснефаланговых суставах.
ТИП ОБУВИ: для всех типов обуви.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых, кровоточащих и мокнувших ранах.

СОСТАВ: Гелевая подушечка покрыта мягкой эластичной трикотажной тканью с удерживающим фиксатором. Гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла улаивают кожу и способствуют смягчению мозолей.

УХОД: изделие периодически моют в теплой воде с детским мылом, после чего сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 30 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств). КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке. РАЗМЕР: S, L.

ПОЛУСТЕЛКИ-СУПИНАТОРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

SolaMed NILUS

Арт. F-00031-01B; 02B; 03B

Тонкие подпяточники SolaMed NILUS уменьшают чувство усталости и тяжести в ногах. Рельеф полустельки поддерживает свода стопы, предотвращает развитие плоскостопия.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах. Применять не более 16 часов в день.



- 1 Амортизатор из эластичного силикона
2 Амортизатор пятки из упругого силикона

ГЕЛЕВЫЕ КОЛПАЧКИ (ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

FLINT Gel

Арт. F-00033-01B; 03B



Мягкие и комфортные гелевые защитные колпачки FLINT изготовлены из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля, смягчает и увлажняет кожу.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- мозоли;
• трещины;
• потертости;
• поврежденные ногти пальцев стопы;
• врожденные ногти;
• ампутированные культи фаланг пальцев.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах.

УХОД: колпачки ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего придувают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств). КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке. РАЗМЕР: M, L.


ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАЩИЩАЮЩИЕ (ПОДПЯТОЧНИКИ)

SolaMed NILUS

Арт. F-00031-01B; 02B; 03B

Тонкие подпяточники SolaMed NILUS уменьшают чувство усталости и тяжести в ногах.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах. Применять не более 16 часов в день.

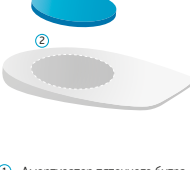

- 1 Амортизатор пяточного бугра из эластичного силикона
2 Амортизатор пятки из упругого силикона


ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАЩИЩАЮЩИЕ (ПОДПЯТОЧНИКИ)

SolaMed BISHOP

Арт. F-00037-01; 02; 03

Подпяточники SolaMed BISHOP уменьшают чувство усталости и тяжести в ногах, снимают болевые ощущения при пяточной шпоре и трещинах подошвы стопы.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах. Применять не более 16 часов в день.

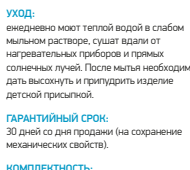

- 1 Амортизатор пяточного бугра из эластичного силикона
2 Амортизатор пятки из упругого силикона


ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ (ПОДПЯТОЧНИКИ)

SolaMed BISHOP

Арт. F-00037-01; 02; 03

Подпяточники SolaMed BISHOP уменьшают чувство усталости и тяжести в ногах, снимают болевые ощущения при пяточной шпоре и трещинах подошвы стопы.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах. Применять не более 16 часов в день.

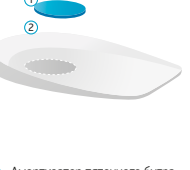

- 1 Амортизатор пяточного бугра из эластичного силикона
2 Амортизатор пятки из упругого силикона

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- мозоли;
• трещины;
• потертости;
• поврежденные ногти пальцев стопы;
• врожденные ногти;
• ампутированные культи фаланг пальцев.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах.

УХОД: колпачки ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего придувают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств). КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке. РАЗМЕР: M, L.

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВАЯ ТРУБОЧКА (ЗАЩИЩАЮЩАЯ)

TODES Gel

Арт. F-00050-03; 04

Трубочка TODES легко разрезается на защитные кольца требуемого размера, которые эффективно помогают устранить боль и дискомфорт при мозолях, потертостях, деформациях, лечении ушибов и воспалений суставов пальцев ног.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах.



- 1 Амортизатор пяточного бугра из эластичного силикона
2 Амортизатор пятки из упругого силикона

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- мозоли;
• трещины;
• потертости;
• поврежденные ногти пальцев стопы;
• врожденные ногти;
• ампутированные культи фаланг пальцев.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах.

УХОД: колпачки ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего придувают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств). КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке. РАЗМЕР: M, L.

ГЕЛЕВАЯ ПОДУШЕЧКА БУРСОПРОТЕКТОР (ЗАЩИЩАЮЩАЯ)

PROTO Gel

Арт. F00071-00B

Мягкая и комфортная гелевая подушечка (бурсопротектор) с менталейвой вставкой PROTO сделана из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых, кровоточащих и мокнувших ранах.

УХОД: подушечки-фиксаторы ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего придувают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств). КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке. РАЗМЕР: универсальный.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- артриты;
• травмы;
• мозоли;
• натоптыши в области первого и межфаланговых суставов;
• подагра;
• послеоперационный период;
• мозолиобразные мозоли;
• переносимые мозоли;
• потертости;
• деформации;
• лечение ушибов и воспалений суставов пальцев ног.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых, кровоточащих и мокнувших ранах.

УХОД: подушечки-фиксаторы ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего придувают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств). КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке. РАЗМЕР: M 35-39, L 40-45.

ГЛОСКИЕ ГЕЛЕВЫЕ ВСТАВКИ (ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

MOLLI Gel

Арт. F-00055-01B; 02B; 03B



Мягкие и комфортные менталейзовые вставки MOLLI изготовлены из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Quiltes varus (отклонение мизанца внутрь);
• мозолиобразные мозоли;
• мозоли;
• трещины;
• потертости;
• поврежденные ногти пальцев стопы;
• врожденные ногти;
• деформации суставов пальцев ног;
• ушибы суставов пальцев ног;
• артриты;
• бурситы;
• мозоли;
• мозолиобразные мозоли;
• мозоли;
• натоптыши в области первого и межфаланговых суставов;
• подагра;
• послеоперационный период;
• мозолиобразные мозоли;
• переносимые мозоли;
• потертости;
• деформации;
• лечение ушибов и воспалений суставов пальцев ног.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых и мокнувших ранах.

УХОД: подушечки-фиксаторы ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего придувают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств). КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке. РАЗМЕР: M 35-39, L 40-45.

ГЕЛЕВЫЕ ПОДУШЕЧКИ-ФИКСАТОРЫ (ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

SOLEI Gel

Арт. F-00056-01B; 02B



Мягкие и комфортные гелевые фиксаторы SOLEI изготовлены из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- деформированные мозолиобразные и мозолеобразные мозоли;
• мозоли;
• трещины;
• потертости на коже под пальцами.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать при открытых, кровоточащих и мокнувших ранах.

УХОД: подушечки-фиксаторы ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего придувают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств). КОМПЛЕКТНОСТЬ: 2 шт. в упаковке. РАЗМЕР: M 35-39, L 40-45.