

Nea ©



1 1036-20 1 / 3

Designed in the Netherlands
Made in the EU

www.push.eu

Nea International Bv
Europalaan 31
6199 AB Maasricht-Alport
The Netherlands



1.20.1



CARE

Ортез на голеностопный сустав
ANKLE BRACE



Ортезы серии Care* торговой марки Push — оптимальное решение для защиты и профилактики.

Ортезы Push Care предназначены, в первую очередь, для профилактического применения в случаях физических нагрузок. Эти ортезы успешно защищают человека также в случаях незначительных травм и умеренных нарушениях функции суставов. Отличительной особенностью является легкая степень фиксации и умеренная компрессия.

Продукция Push care является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

* Care – забота

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ PUSH CARE ANKLE BRACE АРТИКУЛ: 1.20.1

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Незначительные деформации голеностопного сустава.
- Бурситы.
- Легкая нестабильность голеностопного сустава (при небольшой нагрузке).
- Артроз голеностопного сустава без признаков нестабильности.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Правильная последовательность наложения определяется по увеличению количества символов «точек» на застежке-липучке «Велкро».

1. Расстегните все застежки-липучки «Велкро». Наденьте основу ортеза на стопу. Расположите стопу под 90° относительно голени. Затем застегните застежку на передней части ортеза.
2. Зафиксируйте эластичные ленты в виде «восьмерки» вокруг стопы.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Правильное использование ортеза Push care Ankle Brace может потребовать консультации лечащего врача.
- Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез Push care Ankle Brace. Важно, чтобы ортез Push care Ankle Brace был удобен.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push care Ankle Brace.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push care Ankle Brace требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push care Ankle Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push care Ankle Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ортез Push care Ankle Brace на голеностопный сустав обеспечивает легкую фиксацию и регулируемую компрессию сустава. Ортез можно носить практически в любой повседневной обуви. Смягчающие вставки над лодыжками для максимального удобства ношения ортеза. Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля).

Ортез Push care Ankle Brace на голеностопный сустав удобен для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


Противопоказаний к использованию ортеза Push care Ankle Brace на голеностопный сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push care Ankle Brace на голеностопный сустав для предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения в стопе. В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.



A



B

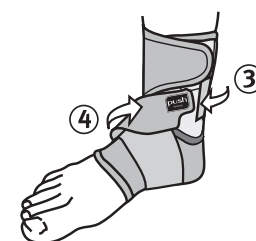

C

Инструкция по применению



• py

Артикул 1.20.1

Производитель NEA International BV
(NEA Интернешнл БиВи)
www.push.eu

Импортер ООО «Орто Медикл Групп»
Россия,
143405, Московская область,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять Россия,
127220, Москва, а/я № 58,
ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/04876 от 29.03.2016 г.
выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии
№ РОСС NL.АЯ46.Д72396
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО
«Региональный орган по сертификации и
тестированию»




ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность голеностопного сустава: через пятку к подъему стопы (см. рисунок на упаковке). Ортезы Push safe Ankle Brace на голеностопный сустав представлены в пяти размерах (см. таблицу размеров на упаковке) отдельно для правого и левого голеностопных суставов. Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортез.

ПРАВИЛА УХОДА

Чтобы продлить срок службы, после ношения ортез следует просушить. Перед стиркой застегните застёжки-липучки «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30°C. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

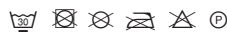

СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3, 4, 5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться в оригинальной упаковке, при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 1.20.1

