




ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 1.10.1

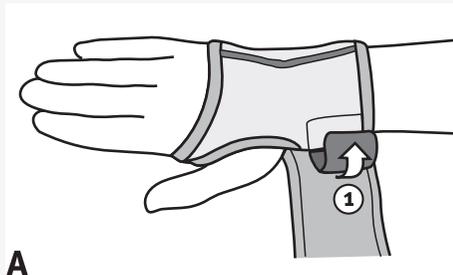

A

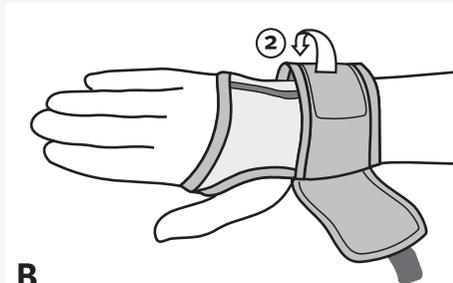

B

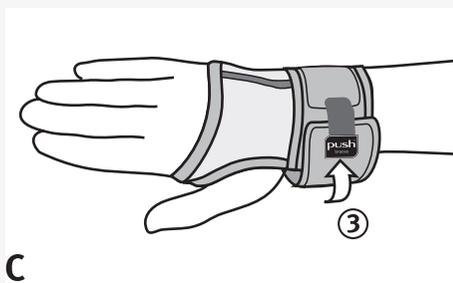

C

Ортезы серии Care* торговой марки Push — оптимальное решение для защиты и профилактики.

Ортезы Push Care предназначены, в первую очередь, для профилактического применения в случаях физических нагрузок. Эти ортезы успешно защищают человека также в случаях незначительных травм и умеренных нарушениях функции суставов. Отличительной особенностью является легкая степень фиксации и умеренная компрессия.

Продукция Push care является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

* Care – забота

**ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
PUSH CARE WRIST BRACE
АРТИКУЛ: 1.10.1**

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Растяжение связок лучезапястного сустава.
- Умеренная нестабильность лучезапястного сустава.
- Повреждения сухожилий разгибателей.
- Артроз суставов кисти и запястья.
- Ревматоидные поражения лучезапястного сустава.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Правильная последовательность наложения определяется по увеличению количества символов «точек» на застежке-липучке «Велкро».

1. Натяните основу ортеза на руку до тех пор, пока она не достигнет большого пальца. Зафиксируйте первую фиксирующую ленту вокруг запястья.
2. Зафиксируйте длинную ленту вокруг запястья для обеспечения необходимой компрессии.
3. Зафиксируйте ортез с помощью застежки-липучки «Велкро».

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При использовании ортеза Push care Wrist Brace может потребоваться консультация лечащего врача.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push care Wrist Brace.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push care Wrist Brace требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push care Wrist Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push care Wrist Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ортез Push care Wrist Brace на лучезапястный сустав обеспечивает легкую фиксацию и регулируемую компрессию сустава. Легкая фиксация оставляет достаточную свободу движений для выполнения определенных действий. Ладонь руки остается свободной для обеспечения возможности кистевого хвата. Смягчающие вставки над шиловидным отростком обеспечивают комфорт ношения. Правильное анатомическое наложение ортеза важно для предупреждения травматизма при движениях кисти. Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля).

Ортез Push care Wrist Brace на лучезапястный сустав удобен для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза Push care Wrist Brace на лучезапястный сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push care Wrist Brace на лучезапястный сустав для предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения в кисти. В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

Nea



1 1036-10 1 / 3

Designed in the Netherlands
Made in the EU

www.push.eu

The Netherlands
6199 AB Maastricht-Alport
Europalaan 31
Nea International Bv



1.10.1



CARE

Ортез на лучезапястный сустав
WRIST BRACE



Инструкция по применению



• ру

Артикул 1.10.1

Производитель NEA International BV
(NEA Интернешнл БиВи)
www.push.eu

Импортер ООО «Орто Медикл Групп»
Россия,
143405, Московская область,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять Россия,
127220, Москва, а/я № 58,
ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/04856 от 25.03.2016 г.
выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии
№ РОСС NL.АЯ46.Д72395
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО
«Региональный орган по сертификации и
тестированию»



ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность лучезапястного сустава (см. рисунок на упаковке). Ортезы Push care Wrist Brace на лучезапястный сустав выпускаются в четырех размерах на правую и левую стороны (см. таблицу размеров на упаковке). Чтобы убедиться в правильном подборе размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез Push care Wrist Brace был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Чтобы продлить срок службы, после ношения ортеза следует просушить. Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3, 4

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться в оригинальной упаковке, при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.


УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.


ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 1.10.1

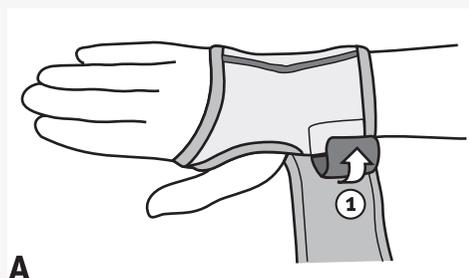

A

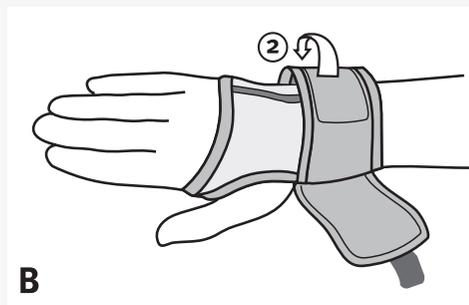

B

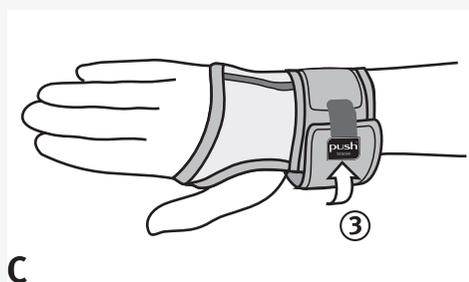

C