

Продукция Push med представляет апробированные врачами и учеными эффективные решения для лечения и предотвращения травм опорно-двигательного аппарата. Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высоким уровнем эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной степени и регулируемая компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Продукция Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу [sales@nikamed.ru](mailto:sales@nikamed.ru)

### ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ PUSH MED ANKLE BRACE AEQUI FLEX АТИКУЛ: 2.20.2

#### НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Лечение острых повреждений латеральных связок голеностопного сустава.
- Продолжительное лечение консервативных и операбельных переломов голеностопного сустава.
- Серьезная (остаточная) нестабильность.
- Артроз с нестабильностью.
- Вторичная профилактика повреждений связок голеностопного сустава.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

#### ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Перед надеванием ортеза необходимо расстегнуть застежки «Велкро».

Правильная последовательность фиксации ремней определяется по увеличению количества символов □ на застежках «Велкро» (см. рисунок).

- Push med Ankle Brace Aequi Flex одевается на носок.
- Поместите ногу в ортез. Твердая часть ортеза находится на внутренней стороне ноги. Распределите длинные ленты по сторонам.
- Застегните диагональную ленту, совместив на липучках «Велкро» символы □ (см. рисунок).
- Оберните упругую ленту, отмеченную символом ⊕ вокруг голени. Потяните ее по диагонали через подъем, оберните вокруг лодыжки только выше пятки и закрепите.
- В конце оберните упругую ленту, отмеченную символом ⊕. Потяните ее от подъема ноги, оберните вокруг лодыжки над первой лентой и закрепите. Подъем — более низкая часть стопы, где начинается ремень.

#### РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При использовании ортеза Push med Ankle Brace Aequi Flex на голеностопный сустав может потребоваться консультация лечащего врача.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push med Ankle Brace Aequi Flex.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push med Ankle Brace Aequi Flex требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push med Ankle Brace Aequi Flex или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push med Ankle Brace Aequi Flex на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

#### СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ортез Push med Ankle Brace Aequi Flex — высокоэффективный ортез на голеностопный сустав, обеспечивает высокий уровень фиксации и защиты в процессе лечения или для профилактики травм голеностопного сустава.

Твердая поддержка расположена на внутренней стороне голеностопного сустава и имеет впадину для выступа медиальной лодыжки.


Латеральная сторона представляет собой комфортную, эластичную форму, которая адаптируется согласно индивидуальному строению голеностопного сустава человека.

Строение ортеза имеет твердый центр и становится более мягким к краям, что гарантирует хорошую подгонку и высокий уровень комфорта.


Ортез закрепляется диагональным ремнем.

Эластичные ленты со встроенным фиксатором на пятке, в сочетании с функциональной лентой, обеспечивают индивидуально регулируемую компрессию вокруг голеностопного сустава.

#### ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АТИКУЛ: 2.20.2

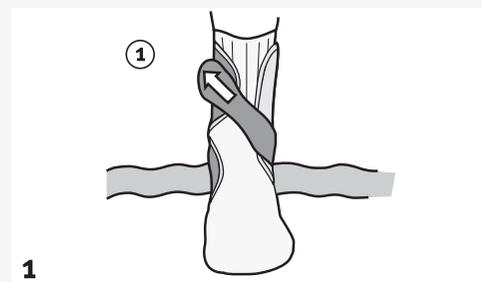

1

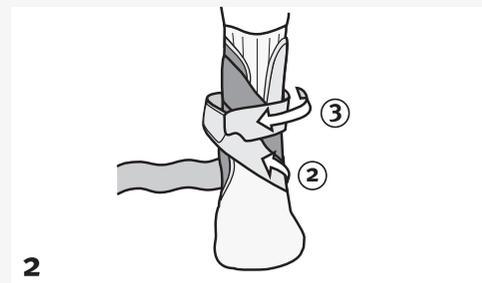

2



3

Nea ©



I 2036-20 2 / 3

Designed in the Netherlands  
Made in the EU

www.push.eu

The Netherlands  
6199 AB Maastricht-Alport  
Europalaan 31  
Nea International Bv



2.20.2



MED

Ортез на голеностопный сустав  
ANKLE BRACE AEQUI FLEX



## Инструкция по применению



• РУ

Артикул	2.20.2
Производитель	NEA International BV (NEA Интернешнл БиВи) www.push.eu
Импортер	ООО «Орто Медикл Групп» Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять	Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием  
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение  
№ ФСЗ 2009/04876 от 29.03.2016 г.  
выдано Росздравнадзором,  
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии  
№ РОСС NL.АЯ46.Д72396  
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО  
«Региональный орган по сертификации и  
тестированию»



Орtez Push med Ankle Brace Aequi Flex применяется на обработанных ранах лодыжки и как долгосрочная поддержка в случаях хронической неустойчивости лодыжки.

Неэластичные ленты используют для задания пределов пронации и супинации, сохраняя функциональность сустава для ходьбы.

Инверсия/эверсия (внутреннее/внешнее) движение голеностопа ограничено, тогда как подошвенное/дорсальное движение имеет физиологичную свободу. Это значит, что нет ограничения во время нормальной ходьбы и бега.

Нумерация на липучках «Велкро» облегчает надевание ортеза.

Орtez Push med Ankle Brace Aequi Flex необходимо носить на носок, оптимальная стабилизация достигается при ношении ортеза с обувью на шнуровке (спортивной обувью).

#### ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза Push med Ankle Brace Aequi Flex на голеностопный сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push med Ankle Brace Aequi Flex на голеностопный сустав для предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения в стопе. В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

#### ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность голеностопного сустава: через пятку к подъему стопы (см. рисунок на упаковке). Ортезы Push med Ankle Brace Aequi Flex на голеностопный сустав выпускаются в трех размерах отдельно на правую и левую ноги (см. таблицу размеров на упаковке). Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортез.

#### ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой застегните застёжки-липучки «Велкро» и застёжку «молнию». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Чтобы продлить срок службы, после стирки ортез следует просушить.



#### СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

Орtez изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

#### РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3 (левый, правый)

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

#### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

#### ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

#### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

#### ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 2.20.2

