

© Nea



I 2036-70 1 / 3

Designed in the Netherlands  
Made in the EU

www.push.eu

The Netherlands  
6199 AB Maastricht-Airport  
Europalaan 31  
Nea International bv



2.70.1



## MED

Ортез на локтевой сустав  
ELBOW BRACE EPI



## Инструкция по применению



• ru

Продукция Push med представляет апробированные врачами и учеными эффективные решения для лечения и предотвращения травм опорно-двигательного аппарата.

Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высоким уровнем эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной степени и регулируемая компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Продукция Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортезов внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу [sales@nikamed.ru](mailto:sales@nikamed.ru)

### ОРТЕЗ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ PUSH MED ELBOW BRACE EPI АРТИКУЛ: 2.70.1

#### НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Латеральные и медиальные эпикондилиты  
(в т.ч. «локоть теннисиста» и «локоть гольфиста»).

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

#### ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Перед надеванием ортеза необходимо расстегнуть застежки-липучки «Велкро».

1. Наденьте ортез на предплечье таким образом, чтобы полужесткий пелот располагался примерно в пяти сантиметрах ниже наружного (латерального) или внутреннего (медиального) надмыщелка плечевой кости (см. рисунок).
2. Затяните регулируемую ленту и зафиксируйте ее застежкой-липучкой «Велкро».

#### РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При использовании ортеза Push med Elbow Brace Epi на локтевой сустав может потребоваться консультация лечащего врача.
- Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез Push med Elbow Brace Epi.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push med Elbow Brace Epi.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push med Elbow Brace Epi требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push med Elbow Brace Epi или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push med Elbow Brace Epi на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

#### СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ортез Push med Elbow Brace Epi на локтевой сустав обеспечивает локальное сдавливание на внешнюю «локоть теннисистов» или внутреннюю «предплечье гольфистов» группы мышц-разгибателей кисти. Это ослабляет натяжение мышц в месте прикрепления в локтевом суставе. Полужесткий пелот ортеза выполнен из эластичного полимера. Анатомическая форма позволяет ортезу оставаться на месте при движениях руки.

Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля).

Ортез Push med Elbow Brace Epi на локтевой сустав удобен для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).

#### ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 2.70.1



Артикул	2.70.1
Производитель	NEA International BV (NEA Интернешнл БиВи) www.push.eu
Импортер	ООО «Орто Медикл Групп» Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять	Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием  
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение  
№ ФСЗ 2009/04856 от 25.03.2016 г.  
выдано Росздравнадзором,  
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии  
№ РОСС NL.АЯ46.Д72395  
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО  
«Региональный орган по сертификации и  
тестированию»



## ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза Push med Elbow Brace Epi на локтевой сустав не выявлено.

Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push med Elbow Brace Epi на локтевой сустав для предотвращения симптомов нарушения периферического кровообращения в предплечье и кисти.


В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

### ПОДБОР РАЗМЕРА

Ортез Push med Elbow Brace Epi на локтевой сустав выпускается в одном универсальном размере, позволяющем фиксировать ортез на предплечье с диапазоном окружности от 20 до 35 сантиметров.

### ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой застегните застежки «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Чтобы продлить срок службы, после стирки ортез следует просушить.

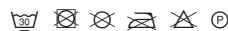

### СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

### РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Универсальный

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

### ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

## ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 2.70.1

