

Продукция Push med представляет апробированные врачами и учеными эффективные решения для лечения и предотвращения травм опорно-двигательного аппарата.

Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высоким уровнем эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной степени и регулируемая компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Продукция Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

**ОРТЕЗ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
PUSH MED SHOULDER BRACE
Артикул: 2.50.1/2.50.3**

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Подвывих плечевой кости.
- Субкапитальные переломы.
- Повреждения акромиально-ключичного сочленения.
- Период реабилитации после травм и операций плечевого сустава.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Ортез на плечевой сустав представлен в трех размерах. Каждый размер представлен правой и левой стороной. Для подбора размера измеряется окружность груди на уровне 5 см. выше локтя свободно свисающей руки. На упаковке изделия приведена таблица подбора размера.

Правильная последовательность фиксации определяется по увеличению количества точек в символе на застежках «Велкро» (☐ ⊕ ⊗).

A. Закрепите грудную ленту в комфортном положении (☐).

Для специалистов подбирающих размер: перед началом использования пациентом грудная лента должна быть отрегулирована.

A1. Затем закрепите грудную ленту таким образом, чтобы она плотно прилегла к телу и не доставляла дискомфорт пациенту.

B. Застегните фиксатор на плече, обхватив лентой плечо и пропустив ее через застежку. Расположите фиксатор над локтем (⊕).

C. Застегните фиксатор на запястье (⊗). Вы можете передвигать фиксатор на запястье и ленту на кисть влево или вправо по грудной ленте, чтобы выбрать наиболее комфортное положение.


Советы по регулированию ортеза для лежачих пациентов:

- Измерьте половину окружности груди пациента.
- Умножьте результат на 2.
- Используйте застежку для регулирования длины грудной ленты сзади.
- Расстегните грудную ленту, используя пряжку для быстрого расстегивания.
- Отрегулируйте ортез.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При использовании ортеза на плечо Push med Shoulder Brace может потребоваться консультация лечащего врача.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push med Shoulder Brace.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push med Shoulder Brace требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push med Shoulder Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push med Shoulder Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 2.50.1/2.50.3

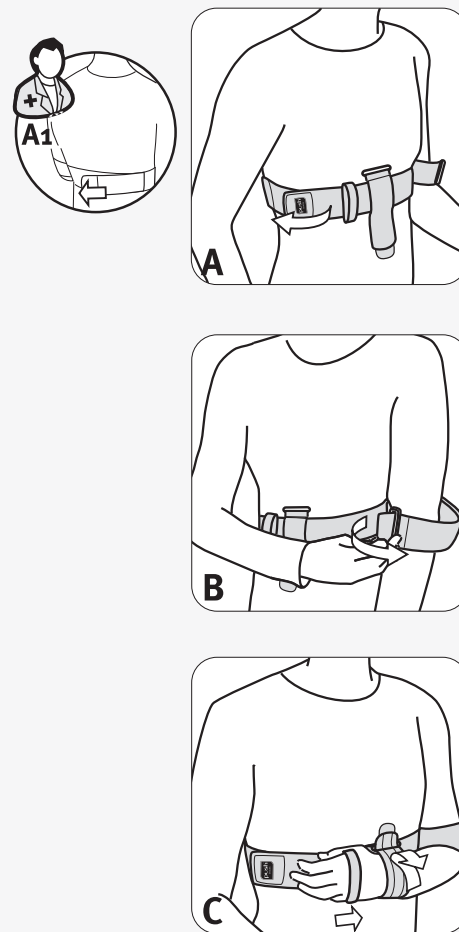

1 2036-50 3 / 3

Made in the EU
Designed in the Netherlands

www.push.eu

The Netherlands
6199 AB Maastricht-Alport
Europalaan 31
Nea International Bv




2.50.1/2.50.3



MED

Ортез на плечевой сустав
SHOULDER BRACE

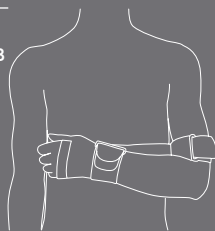

Инструкция по применению



• py

Артикул 2.50.1/2.50.3

Производитель NEA International BV
(NEA Интернешнл БиВи)
www.push.eu

Импортер ООО «Орто Медикл Групп»
Россия,
143405, Московская область,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять Россия,
127220, Москва, а/я № 58,
ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/04856 от 25.03.2016 г.
выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии
№ РОСС NL.AЯ46.Д72395
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО
«Региональный орган по сертификации и
тестированию»



СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Орtez на плечевой сустав Push med shoulder brace состоит из трех элементов.

Грудная лента, которая фиксируется вокруг грудной клетки или верхней части талии, является основой ортеза. Перед началом использования грудную ленту необходимо отрегулировать, чтобы она полностью соответствовала размеру.

Лента на плечо обеспечивает фиксацию плеча к торсу, предотвращая отведение плеча. Положение ортеза на плече может быть выбрано таким образом, чтобы зафиксировать руку в определенном положении. Положение можно легко изменить, слегка повернув грудную ленту.

Третий элемент фиксации - фиксатор на запястье и лента на кисть - обеспечивает фиксацию руки и предотвращает провисание кисти. Если необходимо предотвратить только отведение плеча, то фиксатор на запястье и ленту на кисть можно не использовать. Поскольку ортез крепится непосредственно к торсу, шея и надплечье остаются свободными. Каждый элемент фиксации регулируется индивидуально для оптимального положения при любых условиях.

Ортез Push med shoulder brace рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза Push med Shoulder Brace на плечо не выявлено.

Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push med Shoulder Brace на плечо для предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения в предплечье и кисти.

В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность грудной клетки на уровне, который располагается на 5 сантиметров выше висящего локтя (см. рисунок на упаковке).

Ортез на плечо выпускается в трех размерах и может быть собран и на правую, и на левую стороны (см. таблицу подборов размера на упаковке).

Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортезы ближайших размеров.

ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой застегните застежки «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Чтобы продлить срок службы, после стирки ортез следует просушить.



СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 2.50.1/2.50.3

