

VENOTEKS®

ВАША ПОБЕДА НАД ВАРИКОЗОМ

подушка
ортопедическая
под ноги

артикул: П34,
58x85

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
И УХОДУ
ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

venoteks.ru

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Отеки ног любой этиологии, в том числе при беременности.
- Хроническая венозная недостаточность вен нижних конечностей всех степеней.
- Усталость и тяжесть в ногах.
- Ночные спазмы и судороги мышц ног.
- Артрозы и артриты суставов нижних конечностей.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Улучшение венозного оттока из вен нижних конечностей, в т.ч. при варикозе.
- Придание ногам приподнятого положения во время отдыха.
- Поддержание ног в приподнятом положении перед надеванием противоварикозного трикотажа или бандажей и ортезов.

ОКАЗЫВАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

- ✔ Снижение объемов отеков нижних конечностей различной этиологии, в т.ч. в период беременности.
- ✔ Снижение усталости в ногах.
- ✔ Облегчение надевания противоварикозного трикотажа или бандажей и ортезов.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

Комплект поставки изделия:

1. Подушка в индивидуальной коробке.
2. Насос Hand Pump, арт. RP200.
3. Мешочек.
4. Инструкция по применению.

Состав изделия:

1. Подушка: ПВХ — 80%, метилцеллюлоза — 20%.

Принадлежности:

1. Насос Hand Pump, арт. RP200 — 100% полипропилен
2. Мешочек — 100% полиэстер

В комплекте насос и мешочек



Материал подушки не содержит вредных веществ, фталатов и тяжелых металлов.

Размеры, вес:


Подушка размером 58 x 85 см (в ненадутом состоянии) состоит из трех соединенных баллонов, наполняемых воздухом.
Вес 430±50 г.

СПОСОБ ПОДБОРА

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Полностью разверните подушку. Накачайте все баллоны с помощью ручного воздушного насоса.
- Для отдыха и сна разместите подушку так, чтобы самый низкий край подушки (тонкий баллон) располагался в области бедер. Отрегулируйте степень наполнения большого и среднего баллонов для максимально комфортного положения голени на подушке.
- Стопы ног могут лежать на большом баллоне или свисать за краем подушки.
- Для поддержания ног в приподнятом положении перед надеванием противоварикозного трикотажа или биндажей и ортезов рекомендуется полежать указанным выше способом не менее 10-15 мин.
- Максимальная допустимая нагрузка на подушку составляет 80 кг.

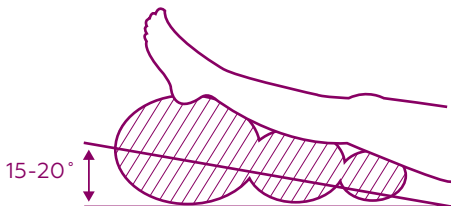

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДУШКИ

- ✔ Специальная запатентованная форма разработана с учетом анатомических особенностей нижних конечностей.
- ✔ Возможность регулировать высоту подушки для максимально комфортного применения.
- ✔ Возможность регулировать степень наполнения отдельных баллонов подушки для оптимального положения голени на подушке.
- ✔ Возможность регулировать мягкость подушки за счет наполнения баллонов.
- ✔ Оптимальные размеры подушки в надутом виде 50x60 см (может изменяться в зависимости от степени наполненности баллонов воздухом).
- ✔ Удобный чехол для хранения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

- Гарантийный срок на подушку и насос: 1 год со дня продажи.
- Гарантия распространяется только на производственные дефекты, нарушающие функциональные свойства изделия.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие удара, механического воздействия, превышения максимальной нагрузки, несанкционированного ремонта или внесения изменения в конструкцию, нарушения правил хранения.
- Гарантия действительна только при использовании и хранении продукции в соответствии с инструкцией.

СРОК СЛУЖБЫ

- Не менее 1 года. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.
- Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки VENOTEKS.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Подушка не требует особого ухода.

В случае необходимости протрите поверхность подушки влажной тряпочкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Не установлен.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей. Утилизировать вместе с бытовым мусором.

Подушка ортопедическая под ноги, арт. П34, 58x85

ТУ 9396-010-88419706-2014



РУ № РНЗ 2016/3829 от 29.03.2016 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ46.Д72376 (с 30.03.2016 г. по 30.03.2019 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Патент № 2417784

Претензии направлять:

Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.

Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге,
д. 5, стр. 4.
www.trelaxorto.ru, www.трелакс.пф

Арт.: INTTC-П34-Н1_12/16