

Особенности госпитальных чулок HOSPITAL PRO23

Состав и технология изготовления изделия гарантируют комфорт и удобство в эксплуатации:

- Эластичная вязка полотна обеспечивает удобство при надевании даже в послеоперационный период.
- Силиконовая резинка обеспечивает надежную фиксацию на бедре.
- Цветовая кодировка в виде полоски, расположенной ниже резинки, позволяет сократить время подбора размера.
- Открытый мыс обеспечивает удобство надевания, что особенно актуально при ограниченной подвижности пациентов, при оценке периферической гемодинамики стоп, в ситуациях, требующих ухода за передним отделом стопы.
- Технология вязки манжеты в области пальцев обеспечивает комфортное прилегание к стопе, не пережимая и не сдавливая ее.
- Возможность как ручной, так и машинной стирки и стерилизации обеспечивает безопасность многократного использования.

Лечебные свойства

1. Госпитальные чулки HOSPITAL PRO23 – незаменимое средство для компрессионной терапии после процедуры флебосклерозирования и после оперативных вмешательств на венах нижних конечностей. Применение трикотажа обеспечивает опосредованное сдавливание просвета вен за счет компрессии на мягкие ткани нижних конечностей. Это способствует остановке кровотечения в зоне разрушения вены, предотвращает образование гематом, снижает интенсивность болевого синдрома, ускоряет процесс окклюзии склерозированных вен. Также PRO23 восстанавливает нормальный кровоток неоперированных вен, уменьшает отеки нижних конечностей и способствует профилактике образования венозных тромбозов.
2. Госпитальные чулки HOSPITAL PRO23 – эффективное средство комплексной профилактики образования венозных тромбов у пациентов с умеренной и высокой степенью риска. Применение этого трикотажа обеспечивает сужение просвета вен за счет компрессии тканей нижних конечностей. Как следствие – восстановление работы клапанов вен нижних конечностей, ускорение венозного кровотока, уменьшение вязкости крови и уменьшение риска образования венозных тромбов.


Градуированная компрессия (23 мм рт.ст.) – физиологически распределенное давление по ноге, максимальное в области лодыжки и постепенно уменьшающееся к бедру, которое задается компьютером при изготовлении трикотажа VENOTEKS HOSPITAL.

Правила подбора размера:

Обратите внимание!

Измерения нужно проводить утром до появления отеков на ногах или днем после обязательного отдыха в течение 15 минут с приподнятыми ногами. В случае применения госпитальных чулок HOSPITAL PRO23 после проведения операций на нижних конечностях, замеры необходимо проводить ДО операции.

Компрессия: максимальная компрессия в области лодыжек – 23 мм рт.ст.

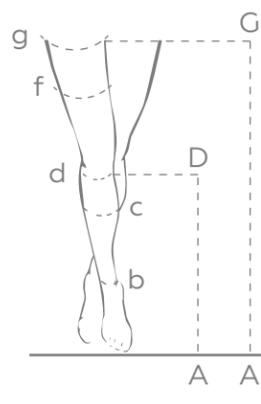

Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Измерение окружности (см)						
b	18-20	20-23	23-26	26-28	28-30	30-32
d	25-34	28-36	31-39	33-41	36-46	40-48
f	37-49	41-53	45-57	49-60	53-65	59-70
g	40-54	44-58	48-62	52-65	56-70	62-75
Измерение длины (см)						
A-D	до 37	до 40	до 44	до 48	до 48	до 48
A-G	до 70	до 75	до 80	до 80	до 85	до 85
цветовая кодировка размера (под резинкой)	коричневый	красный	синий	желтый	розовый	зеленый

b – окружность лодыжки
d – окружность на 2 см ниже коленной чашечки
f – окружность бедра на 13 см ниже ягодичной складки
g – окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки
A-D – длина от уровня d до пятки
A-G – длина от уровня g до пятки

Артикул	2R236
Состав	65% – нейлон, 35% – эластан


VENOTEKS®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

HOSPITAL

Госпитальные чулки HOSPITAL PRO23

Незаменимы для компрессионного лечения после операций на венах нижних конечностей и флебосклерозирования, а также для профилактики венозных тромбозов у пациентов с умеренной и высокой степенью риска.

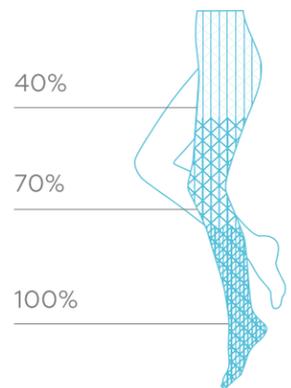

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- После флебосклерозирования
- После оперативных вмешательств на венах нижних конечностей
- Для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов с умеренной и высокой степенью риска ВТЭО

Производитель: Рехард Технолоджис ГмБХ, Потсдаммер штрассе, 92, 10785, Берлин, Германия.

Импортер: ООО «ОртоМедикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

По вопросам и предложениям обращаться: ООО «ОртоМедикл Групп», Россия, 127220, Москва, а/я № 58, тел. 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Система менеджмента качества ISO 13485. Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.

Соблюдение мер безопасности не требуется.

РУ № ФСЗ 2012/13480 от 26.12.2012 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE. АЯ46. Д71997 (с 23.12.2015 г. по 23.12.2018 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Гарантийный срок: на компрессионные свойства – 1 месяц при условии соблюдения правил ухода.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

VENOTEKS®

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЧУЛКИ HOSPITAL PRO23



- Дышащий материал комфортно носить
- Быстро и удобно надевать и снимать
- Можно стерилизовать и использовать многократно
- Оказывают градуированную компрессию

Арт.: TVH2-4-N3_08/17

Обязательно проинформируйте своего лечащего врача, если у Вас:

дерматиты различного происхождения, нарушение артериального кровообращения ног (эндартериит, атеросклероз, диабет), пролежни на ногах, мокнущие экземы, острая инфекция мягких тканей ноги, инфицированные трофические язвы, язвы не венозного происхождения, метаболические отеки, сердечно-легочная недостаточность в стадии декомпенсации.

Режим и правила использования госпитальных чулок HOSPITAL PRO23

Режим ношения (длительность и непрерывность) послеоперационных чулок PRO23 определяет специалист. Надевать компрессионный послеоперационный трикотаж следует по возможности утром или после 10-15-минутного отдыха ног на возвышении для предупреждения образования отеков. Пациентам с высоким риском ВТЭО, находящимся на длительном постельном режиме, трикотаж необходимо использовать в дневные и ночные часы и снимать его только для проведения гигиенических процедур, если иное не рекомендовал специалист.

Обратите внимание!

- Острые ногти, мозоли, заусенцы на пальцах могут повредить чулки, поэтому нужно постоянно ухаживать за ногтями и кожей кистей и стоп.
- Перед надеванием и стиркой чулок нужно снимать кольца, браслеты и другие украшения на руках, которые могут повредить изделие.
- Рекомендуется надевать чулки в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.

Как правильно снимать изделия HOSPITAL PRO23

- Удалите с рук все украшения и наденьте резиновые перчатки.
- Возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к стопе.
- Аккуратно снимите пятку и далее все изделие.

Правила ухода:

Изделие рекомендуется стирать через день вручную или в стиральной машине при температуре 90°С (не более 15 стирок), можно подвергать стерилизации методом автоклавирования при 121°С (не более 3 раз).

Ручная стирка: используйте средства для стирки деликатных тканей. Тщательно прополощите. Не выкручивайте. Сушите при комнатной температуре.

Машинная стирка: максимальная температура 90°С с использованием нейтральных моющих средств. Стирайте в защитном мешочке для белья. Барабанная сушка при температуре не выше 55°С.

Правила хранения:

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухом месте, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Обратите внимание!

Запрещены: отбеливание, химчистка, утюжка, сушка на нагревательных приборах. Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.

Гарантийными случаями не являются:

- Механические повреждения (включая случайные).
- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению.
- Дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием.
- Несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Информация для покупателей:
Сохраните кассовый чек и упаковку изделия после покупки.
Индивидуальные параметры покупателя:
К внешнему виду и подбору размера изделия претензий не имею.
Подпись покупателя _____ Дата покупки _____
Внимание!
Для рассмотрения претензий к приобретенным изделиям Вам необходимо предоставить по месту покупки изделие в чистом виде, оригинал кассового чека, данную упаковку изделия.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Комплектность: компрессионное изделие, инструкция.

