

VENOTEKS®

ВАША ПОБЕДА НАД ВАРИКОЗОМ

гольфы для мужчин

гольфы для мужчин
и женщин

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
И УХОДУ
ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

venoteks.ru

**BUSINESS
TRAVEL**

VENOTEKS

Изделия торговой марки VENOTEKS, производителем которых является немецкая компания Rehard Technologies GmbH, за долгое время своего существования на российском рынке приобрели широкую популярность среди специалистов и покупателей.

Каждое из предлагаемых на российском рынке изделие марки VENOTEKS разрабатывается в соответствии с антропометрическими параметрами российских потребителей, с учетом требований сертифицирующих органов и стандартов лечения, принятых в Российской Федерации.

Для обеспечения комфортного и эффективного применения изделия различных размеров изготавливаются на отдельных настроенных цифровых станках производства немецкой компании MERZ. Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485, регулирующим производство изделий медицинского назначения.

При производстве используются только самые современные материалы от европейских производителей, такие, как хлопок, микрофибра, dryarn, шёлк, шерсть, нейлон и эластан. На все материалы имеются сертификаты качества и экологического соответствия. Трикотаж VENOTEKS сертифицирован по системе OEKO-Tex 100, гарантирующей соответствие европейским нормам производства трикотажа. Перед отгрузкой потребителям все изделия проходят строгий контроль качества и компрессионных параметров на специализированном оборудовании Salzmann.

Качество компрессионного трикотажа VENOTEKS подтверждено Регистрационным удостоверением, выданным Росздравнадзором. Мы уверены в надёжности нашей продукции и гарантируем сохранение компрессионных свойств трикотажа VENOTEKS в течение 6 месяцев при ежедневном применении и соответствующем уходе.

Rehard Technologies GmbH заботится о своих клиентах и постоянно совершенствует ассортимент с тем, чтобы изделия не только гарантированно сохраняли здоровье, но и отвечали современным тенденциям моды и высоким требованиям к комфорту, предъявляемым современным пользователем.

НОВЫЕ ЛИНИИ

Линия VENOTEKS BUSINESS

Твой выбор. Твоё превосходство

Медицинский компрессионный трикотаж для энергичных деловых мужчин. Мягкие и удобные гольфы I (15-21 мм рт.ст.) и II (23-32 мм рт.ст.) классов компрессии подойдут под любой стиль одежды. Основной компонент состава полотна «натуральный хлопок» обеспечивает мягкость и экологичность изделий, а микрофибра делает гольфы шелковистыми и эластичными, обеспечивая оптимальный воздухообмен. Такое сочетание материалов, а также специальная «мужская» вязка полотна – это комфорт, удобство и элегантный внешний вид.

- Эффективная профилактика и лечение варикоза обеспечиваются благодаря градуированной физиологически распределенной компрессии.
- Повышенный комфорт создается сочетанием хлопка и синтетических волокон.
- Оптимальная цветовая гамма гольфов подходит для любой одежды в деловом стиле.
- Удобная резинка специальной вязки обеспечивает надежную фиксацию гольфов на ноге.
- Анатомически вывязанная пятка препятствует сползанию и перекручиванию в области стопы.
- Пористая вязка на подошве создает оптимальный температурный баланс.
- Гипоаллергенный состав полотна не вызывает раздражение даже на чувствительной коже.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ ДЛЯ УСПЕХА

НОВЫЕ ЛИНИИ

Линия VENOTEKS TRAVEL

Первый шаг счастливого пути

Современный медицинский компрессионный трикотаж для женщин и мужчин, которые отправляются в путешествие. Гольфы I (15-21 мм рт.ст.) и II (23-32 мм рт.ст.) классов компрессии очень мягкие и удобные благодаря высокому содержанию нитей микрофибры (78% микрофибры).

Гольфы VENOTEKS TRAVEL препятствуют образованию отёков и тяжести в ногах во время путешествий, улучшают кровообращение ног. Обеспечивают профилактику тромбоза вен и тромбоземболии во время перелетов. Способствуют улучшению общего самочувствия в дороге и снижают общую утомляемость.

- Эффективная профилактика и лечение варикоза обеспечиваются благодаря градуированной физиологически распределенной компрессии.
- Мягкость и шелковистость гольфам придает высокое содержание нитей микрофибры.
- Удобство и комфорт в использовании создаются благодаря высокой эластичности полотна.
- Широкая резинка специальной вязки обеспечивает надежную фиксацию гольфов на ноге и не сдавливает ногу.
- Мягкий шов на мысе препятствует натиранию пальцев.
- Гипоаллергенный состав полотна не вызывает раздражение даже на чувствительной коже.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ И УДОБСТВО В ПУТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

резинка особой вязки отлично держит гольфы на ноге (BUSINESS)

широкая резинка не сдавливает ногу (TRAVEL)

физиологически распределенная компрессия улучшает кровообращение


массажная зона снимает усталость (BUSINESS)

высокоэластичная вязка препятствует образованию складок

мягкий шов не натирает пальцы

«анатомическая» зона пятки обеспечивает идеальную посадку по ноге

антистрессовая подошва поддерживает оптимальную температуру и воздухообмен

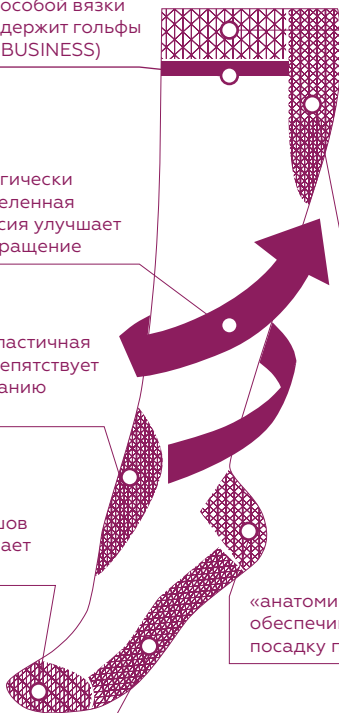


ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Лечебные свойства VENOTEKS основаны на том, что каждое изделие равномерно по всей окружности ноги оказывает давление (компрессию) на мягкие ткани и далее на стенки вен. Постоянная физиологически распределённая компрессия точно рассчитана, дозирована и измерена в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.). Параметры компрессии медицинских трикотажных изделий заложены в сложной современной технологии их изготовления. Компрессия максимальна в области лодыжки и постепенно уменьшается к колену и бедру в следующем процентном соотношении: лодыжка 100%, верхняя часть голени 70%, средняя треть бедра 40%.

Как работает компрессионный трикотаж:

- ✔ сужает просвет вен и улучшает работу венозных клапанов;
- ✔ ускоряет кровоток и приток кислорода к мышцам;
- ✔ уменьшает отёки, усталость и боли в ногах;
- ✔ предотвращает прогрессирование варикозной болезни и развитие её осложнений;
- ✔ препятствует образованию тромбов.

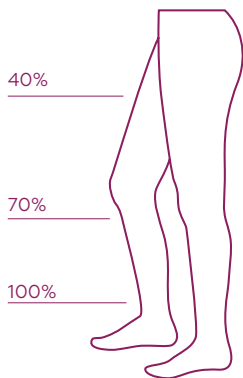

Гольфы создают дополнительный каркас, поддерживающий вены, и защищают их от чрезмерного растяжения постоянным давлением крови. Компрессионные свойства трикотажа VENOTEKS гарантированно сохраняются 6 месяцев при соблюдении инструкции по применению и уходу.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1

VENOTEKS 1 класс компрессии 15-21 мм рт.ст.

отёки ног к вечеру,
тяжесть и усталость
в ногах, чувство
распирания при
отсутствии внешних
признаков пораже-
ния вен

болевые ощущения
в ногах после
статической нагрузки

наследственная
предрасположен-
ность к заболева-
ниям вен

профилактика
венозных тромбозов
при перелетах и
путешествиях

сосудистые звёздочки,
сеточки и единичные
расширенные вены
(длиной до 5 см)

2

VENOTEKS 2 класс компрессии 23-32 мм рт.ст.

сильные отёки
ног, не проходя-
щие к утру

частые ночные
судороги икро-
ножных мышц

профилактика
венозных тромбо-
зов при умерен-
ном и высоком
риске их образо-
вания

профилактика
рецидива
венозной
трофической
язвы

расширенные вены длиной
более 5 см, множествен-
ные расширенные вены,
варикозные узлы без тро-
фических нарушений

Консультация специалиста обязательна

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обязательно поставьте в известность специалиста при наличии у Вас следующих заболеваний:

- Декомпенсированная сердечно-лёгочная недостаточность.
- Диабетическая полинейропатия и ангиопатия.
- Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз, воспалительные заболевания артерий, осложнённые стенозом, тромбозом или тромбоэмболией) лодыжечно-плечевой индекс $< 0,7$. При снижении давления на уровне лодыжки ниже 100 мм рт.ст. (но выше 60 мм рт.ст.) могут быть использованы изделия I класса компрессии.
- Трофические язвы не венозной этиологии.
- Острая инфекция мягких тканей ног. Септический флебит.
- Местные кожные заболевания ног.
- Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа.

Первые признаки заболеваний вен (уменьшаются после ночного отдыха):

- Отеки голени и стопы к концу дня, глубокие следы от носков на коже.
- Чувство тяжести и распирания в икрах, появляющееся при длительном пребывании в положении сидя или стоя.
- Чувство дискомфорта в ногах к вечеру.

При более тяжелой стадии появляются:

- Боль и распирание в икрах ног.
- Чувство жара в ногах и ночные судороги.
- Внешние изменения – на бёдрах и голени образуются мелкие сине-красные сосудистые «звёздочки», темно-синие внутрисосудистые вены и извитые варикозные вены.

АРТИКУЛЫ И СОСТАВ

Линия VENOTEKS BUSINESS

АРТИКУЛ	КЛАСС КОМПРЕССИИ	СОСТАВ
1C154	1	53% хлопок, 35% нейлон, 12% эластан
2C154	2	47% хлопок, 40% нейлон, 13% эластан
1C156	1	60% хлопок, 30% полиамид, 10% эластан

Линия VENOTEKS TRAVEL

АРТИКУЛ	КЛАСС КОМПРЕССИИ	СОСТАВ
1C155	1	90% нейлон, 10% эластан
2C155	2	90% нейлон, 10% эластан

Группы риска:

- Варикозная болезнь у родственников.
- Работа «на ногах».
- Регулярная «сидячая» работа.
- Беременность и послеродовой период.
- Регулярное ношение обуви на каблуках выше 4 см.
- Избыточная масса тела.
- Прием гормональных противозачаточных препаратов после 30 лет.
- Длительные интенсивные спортивные нагрузки.
- Регулярное поднятие тяжестей.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА


арт. 1C154, 2C154, 1C155, 2C155

Размер	S*	M	L	XL
Измерение окружности (см)				
b	17-19	19-22	22-25	26-30
d	26-35	30-39	34-43	37-46
Измерение длины (см)				
A-D	до 36	до 39	до 43	до 46
A (ориентировочно)	36-38	39-41	41-43	44-46

* Доступен только для артикулов 1C155 и 2C155

арт. 1C156

Размер	M	L	XL	XXL
Измерение окружности (см)				
b	20-23	22-25	24-27	26-29
d	31-37	34-40	37-43	40-46
Измерение длины (см)				
A (ориентировочно)	38-40	40-42	42-44	44-47

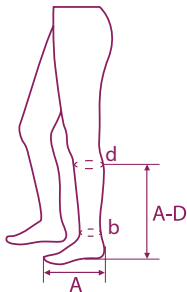

b – окружность надлодыжечной области (самая тонкая часть ноги)

d – окружность под коленной чашечкой (на два пальца ниже коленного сустава)

A-D – длина от уровня D до пятки

A – размер обуви

Обратите внимание!

При подборе размера гольфов руководствуйтесь приведенными здесь таблицами. Измерения нужно проводить утром, до появления отёков на ногах.

КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕВАТЬ ТРИКОТАЖ VENOTEKS

Рекомендуется постирать изделие перед первым применением.

Надевайте VENOTEKS утром до появления отёков на ногах. Если Вы снимаете компрессионный трикотаж в течение дня, то надевать его нужно после отдыха ног. Помните, что острые ногти, мозоли, заусенцы на руках и ногах могут повредить изделие. Поэтому при использовании компрессионного трикотажа нужно постоянно ухаживать за ногтями и кожей рук и ног.

- **Кольца, браслеты и другие украшения на руках могут повредить изделие. Их нужно снимать перед надеванием и стиркой компрессионных изделий.**
- **Рекомендуется надевать изделие в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.**
- **При надевании и снятии чулок не тяните за ажурную резинку во избежание отрыва резинки от чулка.**

Схема надевания



• Внимательно прочитайте раздел о подготовке рук и ног к надеванию изделия.

• Выверните изделие наизнанку до пятки.



• Осторожно натяните изделие на ступню и убедитесь, что пятка изделия правильно расположена на ноге.



• Натягивайте изделие разглаживающими движениями через лодыжку к колену, растягивая каждый участок. Не следует тянуть изделие с усилием за верхний край.



• Окончательно разгладьте мелкие морщинки по всей длине изделия.

• Если Вы надеваете колготки, натягивайте их далее на бёдра.

Прежде, чем снимать изделие, удалите с рук все украшения. Рекомендуется снимать изделие в резиновых перчатках. Возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к стопе. Аккуратно снимите пятку и далее всё изделие.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ТРИКОТАЖЕМ VENOTEKS

- VENOTEKS нужно ежедневно стирать вручную или в стиральной машине (деликатный режим).
- Температура воды при ручной и машинной стирке не должна превышать 30°C.
- В качестве моющих средств нужно выбирать жидкие слабощелочные шампуни или средства для стирки деликатных тканей.
- Не используйте стиральные порошки и кондиционеры.
- При машинной стирке используйте защитный мешочек для белья или положите изделие в наволочку. Не используйте режим машинной сушки.
- После ручной стирки изделие нужно тщательно прополоскать в тёплой воде.
- Не выкручивайте изделие, заверните в полотенце и слегка отожмите его.
- Сушите изделие при комнатной температуре или в прохладном месте на сухом полотенце.

Обратите внимание!

VENOTEKS нельзя кипятить, отбеливать, выжимать, прилагая особую силу, гладить и сушить на батареях, нагревательных приборах, сушилках и под прямыми лучами солнца.

Недопустимо использование химических растворителей и пятновыводителей, которые повреждают изделие.

Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.

Для предотвращения образования складок полностью просушите изделие и аккуратно сложите его в оригинальную упаковку или храните в подходящем защитном мешочке.



НОВЫЕ ЛИНИИ ТРИКОТАЖА VENOTEKS

Уважаемые покупатели!

Мы рады представить вам новые линии бренда VENOTEKS, которые помогут решить проблемы профилактики и лечения различных проявлений заболевания вен и по праву займут достойное место в вашем гардеробе.

VENOTEKS TREND

Компрессионный трикотаж должен быть модным.

Линия VENOTEKS TREND – самый прозрачный и тонкий компрессионный трикотаж на российском рынке. Гольфы, чулки, колготки и колготки для беременных разработаны для активных, современных и уверенных в себе женщин. VENOTEKS TREND можно носить на работе и на отдыхе, с офисным костюмом и с коктейльным платьем. В TRENDе удобно даже летом.

VENOTEKS COMFORT

Терапия с комфортом

Линия VENOTEKS COMFORT это очень мягкий и шелковистый компрессионный трикотаж. Он создан для женщин, которые ценят надежность, комфорт и практичность. Гольфы, чулки, колготки и колготки для беременных производятся из специальных нитей с высоким содержанием микрофибры. Микрофибра придает мягкость полотну и обеспечивает хороший микроклимат для кожи ног. В изделиях VENOTEKS COMFORT уютно даже в холодное время года.

VENOTEKS CLASSIC

Ваша победа над варикозом

VENOTEKS CLASSIC – надежный компрессионный трикотаж с доказанной медицинской эффективностью и эстетичным внешним видом. Изделия в этой линии созданы для мужчин и для женщин, которым необходимо остановить развитие варикоза и обеспечить дальнейшую защиту вен. VENOTEKS CLASSIC прошел клинические исследования по показателям эффективности и безопасности, и его лечебный эффект гарантирован. Традиционные и надежные в использовании изделия линии CLASSIC сочетаются с любым стилем одежды и подходят для любой погоды.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД НОГИ VENOTEKS



Ортопедическая подушка под ноги VENOTEKS помогает уменьшить отёки и усталость ног.

Специальная запатентованная форма подушки разработана с учётом анатомических особенностей нижних конечностей, способствует полному расслаблению мышц голени, правильному расположению голеностопных и коленных суставов, полноценному отдыху ног.

Подушка изготовлена из высококачественного ПВХ и состоит из трёх секций, которые накачиваются воздухом с помощью насоса, входящего в комплект к подушке. Каждая секция накачивается независимо от другой, что позволяет придать подушке максимально удобную для каждого пользователя форму.

Поддержание ног в возвышенном положении полезно при:

- Отёках ног, в том числе во время беременности.
- Заболеваниях вен и суставов нижних конечностей.
- Усталости и тяжести в ногах.
- Спазмах и судорогах мышц ног.

Подушка под ноги VENOTEKS помогает:

- Снять нагрузку с ног во время сна или дневного отдыха.

Преимущества подушки VENOTEKS:

- Компактность: подушка без воздуха в сложенном виде имеет размер 15 x 20 см.
- Лёгкость: ультралёгкая, удобная для переноса и транспортировки.
- Простота в эксплуатации.
- Комфорт: поверхность подушки имеет специальное покрытие, приятное при контакте с кожей.
- Удобство: в комплект входят насос и удобный чехол для хранения.

ИНФОРМАЦИЯ

Комплектность

Компрессионное изделие, инструкция.

Условия утилизации

Утилизация с бытовым мусором.

Гарантийный срок

6 месяцев со дня продажи на сохранение компрессионных свойств при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются

- Механические повреждения (включая случайные).
- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению.
- Дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием.
- Несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Условия хранения

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Срок годности

Не установлен.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Соблюдение мер безопасности не требуется.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ИЗДЕЛИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки _____ Подпись покупателя _____

Обязательно укажите размеры потребителя.

1. Окружность надлодыжечной области (см) _____
2. Окружность под коленной чашечкой (см) _____
3. Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки _____
4. Длина: А-D (гольфы) (см) _____
А-G (чулки, колготки) (см) _____

Информация для покупателей:

Изделия чулочно-носочные надлежащего качества не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации в соответствии с постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. Претензии по качеству в течение гарантийного срока принимаются при возврате изделия в упаковке производителя.



Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13480 от 14.03.2018 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д75944 (с 02.04.2018 г. по 01.04.2021 г.) выдана ЗАО «Региональный центр по сертификации и тестированию».

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ,
Потсдамер штрассе, 92, 10785, Берлин, Германия.

Импортер: ООО «НИКАМЕД»,
Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять:
Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД»,
тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.