

Состав: ПВХ.

Правила ухода: Изделие очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным раствором. Не используйте щётки, абразивные средства или химические очистители.

Правила хранения: Хранить изделия при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов и прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок: Шесть месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, указанных в данной инструкции.

Срок годности: Не установлен.

Правила утилизации: По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.

Насос игольчатый для массажёров и тренажёров KINERAPY PUMP

Область и способ применения: Насос предназначен для накачивания изделий с ниппельным отверстием.

Конструкция и правила использования: Насос имеет съёмную иглу. Для накачивания изделия игла с помощью резьбы фиксируется на корпусе насоса. Для сдувания изделия игла, снятая с корпуса, вставляется в ниппельное отверстие мяча.

Состав: Полипропилен.

Комплектность: Насос с одной съёмной иглой.

Правила ухода: Протирать мягкой влажной тканью.

Правила хранения: Хранить вдали от нагревательных приборов.

Гарантийный срок: 3 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил, указанных в данной инструкции. Гарантия не распространяется на сохранность иглы.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- не гарантийный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Срок годности: Не установлен.

Правила утилизации: По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.



Сертификат соответствия № РОСС DE.МН08.Н27327 (с 14.07.2015 г. по 13.07.2016 г.) выдан ООО «Промтест»

Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485.

Изготовитель: Рехард Технолджис ГмБХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.

Уполномоченный представитель в России и СНГ: ООО «НИКАМЕД» Россия, 127220, Москва, а/я № 58, тел.: +7 (499) 257-45-81.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.

www.kinerapy.com

www.nikamed.ru

**KINERAPY**
ADVANCED REHABILITATION TECHNIQUES

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тренажёр-массажёр на сиденье KINERAPY SEAT

Балансировочный диск KINERAPY BALANCE DISK

Насос игольчатый для массажёров и тренажёров KINERAPY PUMP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор! Немецкая торговая марка KINERAPY объединяет опыт профессионалов в сфере здорового образа жизни и реабилитации. Миссия бренда – помочь Вам в улучшении качества жизни и достижении активного долголетия. Наша философия – движение, и только изделия бескомпромиссного качества помогают нам эффективно её реализовать. Выбранное Вами изделие произведено в соответствии с директивами ЕС и Германскими стандартами, обеспечивающими высокое качество и безопасность эксплуатации. Изделия KINERAPY производятся из самых современных и экологичных полимерных материалов с использованием биопластификатора, исключающего содержание токсинов и опасных для здоровья фталатов.

Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами использования изделий.


Тренажёр-массажёр на сиденье KINERAPY SEAT

Область и способ применения: Тренажёр-массажёр на сиденье KINERAPY Seat является одним из современных эргономичных приспособлений, предназначенных для улучшения качества рабочего места (кресла, стула) путем нивелирования негативных факторов сидения, возникающих при выполнении профессиональных обязанностей, превращая пассивное сидение в активный процесс.


Тренажёр-массажёр на сиденье для разгрузки и одновременной тренировки лиц, длительное время находящихся в сидячем положении (офисных работников, студентов, школьников). Изделие предназначено для многократного личного использования.

Конструкция: Тренажёр-массажёр на сиденье KINERAPY Seat имеет размер 37х38 см. Перепад высоты между низкой передней и высокой задней частью сиденья обеспечивает правильное положение тела. Благодаря закругленным краям передней части снижает давление на бедренную часть.

Двусторонняя массажная поверхность предоставляет возможность индивидуально менять степень массажного воздействия в зависимости от выбранной поверхности для сидения. Тренажёр-массажёр на сиденье имеет ниппельное отверстие для регулировки наполнения воздухом. Для эффективного воздействия максимальная нагрузка на тренажёр-массажёр на сиденье не должна превышать 150 кг.

Варианты расположения нижних конечностей во время сидения.

Правильно Неправильно

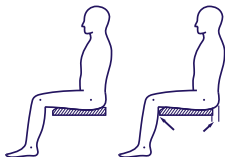

Правила подбора: Тренажёр-массажёр используется на креслах и стулах с ровным сиденьем размером не менее 37х38 см.

Правила использования:


- Тренажёр-массажёр располагается четко по центру стула.
- При использовании тренажёра общая высота сиденья увеличивается, что следует учитывать при соблюдении принципов эргономичной организации рабочего места: угол в коленных суставах должен сохраняться в пределах 90°, стопы должны полностью стоять на полу,

между краем стула и подколенной ямкой должно быть расстояние в 2 пальца.

- Тренажёр-массажёр на сиденье можно использовать в течение всего рабочего дня, но с перерывами. Оптимальным соотношением является его применение в течение 30-40 минут с паузой для отдыха 20-30 минут, а затем повторное использование в продолжение периода длительного сидения. В моменты отдыха можно переложить тренажёр на спинку стула и опереться на него спиной, таким образом позволяя разгрузить спину и массируя её.
- Существует прямая зависимость между количеством содержащегося воздуха в тренажёре-массажёре и степенью нагрузки на мышцы во время сидения. Для слабо тренированных людей рекомендуется использовать тренажёр, наполовину наполненный воздухом. Необходимо отрегулировать содержание воздуха с помощью игольчатого насоса. Для уменьшения объёма воздуха в тренажёре вставьте в воздушный клапан иглу от воздушного насоса и надавите на тренажёр. Для увеличения объёма воздуха необходимо накачать тренажёр с помощью игольчатого насоса.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Комплектность: Тренажёр-массажёр на сиденье, игольчатый насос, инструкция.

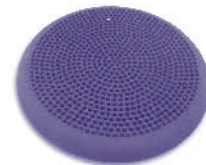
Балансировочный диск KINERAPY BALANCE DISK

Область и способ применения: KINERAPY BALANCE DISK относится к тренажёрам с нестабильной поверхностью, которые предназначены для тренировки координации движений и баланса. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Конструкция: Балансировочный диск диаметром 33 см имеет двустороннюю массажную поверхность, что даёт возможность индивидуально менять степень массажного воздействия в зависимости от выбранной поверхности.

Диск имеет ниппельное отверстие для регулировки наполнения воздухом.

Правила подбора: Балансировочный диск имеет универсальное применение и может использоваться взрослыми и детьми без ограничений. Не имеет ограничений по максимальной весовой нагрузке.

Правила использования: Упражнения с использованием балансировочного диска могут выполняться из положений стоя, сидя, лёжа, в статическом и динамическом режиме с возможностью усложнения тренировки (выполнение упражнений с закрытыми глазами), а также изменения высоты и плотности самого диска за счет регулирования наполненности диска воздухом.

На начальном этапе тренировки следует проводить в статическом режиме, с открытыми глазами, с последующим усложнением и переходом к динамическому режиму и/или работе с закрытыми глазами.

Эффективной считается тренировка продолжительностью 20 минут с минимальным количеством повторений 15 раз.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Комплектность: Балансировочный диск, инструкция.