

### Условия хранения:

Орtez должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

### Условия утилизации:

Орtez утилизировать с бытовым мусором.

### Срок годности:

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

### Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. TAN-201 F, инструкция по применению.

### Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

### Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.

РУ № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01697 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИИММШ».

**Изготовитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.  
**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.  
**Претензии принимает** представитель в России и СНГ — ООО «НИКАМЕД» по адресу: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.

**Для корреспонденции:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58.



## Инструкция по применению ортопедических изделий



Medical Line



Ортез на голеностопный сустав и стопу  
(деротационный ортез)

**TAN-201 F**

### **Область применения/предназначение:**

Нижняя треть голени, голеностопный сустав и стопа. Изделие предназначено для многократного личного использования.

### **Свойства товара (оказываемые эффекты):**

Орtez на голеностопный сустав и стопу (деротационный орtez), арт. TAN-201 F обеспечивает надежную фиксацию нижней трети голени, голеностопного сустава и стопы, препятствуя внутренней и наружной ротации бедра.

### **Предназначен для реабилитации только в положении лежа.**

Орtez надевается непосредственно на тело. Благодаря системе фиксирующих ремней надежно фиксирует и стабилизирует нижнюю конечность в функционально выгодном положении (диапазон 90-45°) за счет Т-образной планки, крепящейся к ортезу поверхностью «велкро».

### **Показания к применению:**

- переломы шейки бедра;
- межвертельные переломы бедра;
- ранняя послеоперационная реабилитация пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава;
- парезы и параличи нижних конечностей различного генеза;
- реабилитационный период после острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт);
- поражения нервов нижней конечности;
- плантарный фасциит.

### **Режим и сроки ношения:**

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.

### **Противопоказания:**

- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза;
- индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. По истечении периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

### **Предупреждения:**

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться с врачом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

### **Конструкция ортеза:**

Орtez состоит из пластикового каркаса, внутренней части из комфортного, мягкого материала, системы фиксирующих ремней и ограничительной планки, предотвращающей ротацию конечности.

### **Порядок надевания:**

Орtez надевается непосредственно на тело, фиксируется системой ремней. Ограничительная планка фиксируется застежкой «велкро» лечащим врачом в необходимом положении.

### **Правила подбора:**

Орtez подбирается по длине стопы

Размер	Длина стопы (см)
S/M	20,5-24
L/XL	24-29

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить орtez. Важно, чтобы орtez был удобен.

### **Состав изделия:**

20% полиуретан, 15% полиамид, 8% полиэстер, 3% сталь, 40% полипропилен, 12% акрилонитрилбутадиенстирол, 2% полиоксиметилен.

### **Правила ухода:**

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

