




Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

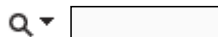

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез на голеностопный сустав (LAB-201(P))



Изделия протезно-ортопедические: Ортез на голеностопный сустав (LAB-201(P))





Артикул: LAB-201(P)

[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Ортез ORLETT LAB-201(P) предназначен для стабилизации голеностопного сустава и костей предплюсны. Ортез осуществляет фиксацию области лодыжек, голеностопного сустава, суставов предплюсны, уменьшает отёчность в области голеностопного сустава и стопы, снижает нагрузки на голеностопный сустав. Застежки Велкро позволяют регулировать объем ортеза для комфортного ношения в период выраженной отечности после травмы.

Яркий цвет ортеза не только понравится самому ребенку, но и привлечет внимание к поврежденной конечности, препятствуя повторным травмам.

Яркое, красивое, удобное изделие сделает лечение элементом игры для ребенка, способствуя необходимым для лечения срокам ношения.

Степень фиксации: сильная.

Линейка: Junior Line.

Состав: 30% полиамид, 20% полиэстер, 15% полиуретан, 5% эластан, 12% алюминий, 10% сталь, 8% полиэтилен.

Показания

- Травмы голеностопного сустава и его связочного аппарата.
- Нефиксированные деформации голеностопного сустава.
- Реабилитационный период после травм и операций на голеностопном суставе.

Цвета: ярко-зеленый.

Размеры: S, M, L, XL.

Подбор размеров

Для корректного подбора иммобилизирующего ортеза на голеностопный сустав ORLETT LAB-201(P) необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность выше костей лодыжки.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	S	M	L	XL
ОКРУЖНОСТЬ ВЫШЕ КОСТЕЙ ЛОДЫЖКИ, CM	15-17	17-19	19-21	21-23



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



[Версия для печати](#)

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

Обратная связь



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.

[illegible]

