



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q ▾

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)
[Каталог](#)
[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез на коленный сустав (тутор) (RKN-203(P))



Изделия протезно-ортопедические: Ортез на коленный сустав (тутор) (RKN-203(P))





Артикул: RKN-203(P)

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Ортез на коленный сустав ORLETT RKN-203(P) обеспечивает сильную степень фиксации коленного сустава. В модели предусмотрена разъемная конструкция, которая применяется в случаях сильного отека или раннего послеоперационного периода, когда необходим быстрый доступ к области коленного сустава.

Яркий цвет ортеза не только понравится самому ребенку, но и привлечет внимание к поврежденной конечности, препятствуя повторным травмам.

Яркое, красивое, удобное изделие сделает лечение элементом игры для ребенка, способствуя необходимым для лечения срокам ношения.

Степень фиксации: сильная.

Линейка: Junior Line.

Состав: 30% полиамид, 22% полиэстер, 15% полиуретан, 5% эластан, 15% алюминий, 5% сталь, 8% полиэтилен.

Показания

- Иммобилизация коленного сустава после операций.
- Иммобилизация коленного сустава после травм.

Цвета: ярко-зеленый.

Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Подбор размеров

Для корректного подбора ортеза на коленный сустав ORLETT RKN-203(P) необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность середины коленного сустава.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Таблица подбора размеров:

