



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез на пястно-фаланговый сустав (WFG-100(P))



Изделия протезно-ортопедические: Ортез на пястно-фаланговый сустав (WFG-100(P))





Артикул: WFG-100(P)

[Предыдущий](#)

Описание

Ортез на пястно-фаланговые суставы ORLETT WFG-100(P) обеспечивает сильную фиксацию пястно-фаланговых и межфаланговых суставов. Металлическая шина фиксирует пястно-фаланговые и межфаланговые суставы в заданном положении.

Ограничивает подвижность, снижает болевой синдром, фиксирует лучезапястный сустав в физиологически выгодном положении.

Яркий цвет ортеза не только понравится самому ребенку, но и привлечет внимание к поврежденной конечности, препятствуя повторным травмам.

Яркое, красивое, удобное изделие сделает лечение элементом игры для ребенка, способствуя необходимым для лечения срокам ношения.

Степень фиксации: сильная.

Линейка: Junior Line.

Состав: 43% полиамид, 20% полиуретан, 10% полиэстер, 10% эластан, 12% алюминий, 5% полиэтилен.

Показания

- Травмы связочно-мышечного аппарата II-IV пальцев руки.
- Воспалительно-дегенеративные заболевания пястно-фаланговых и межфаланговых суставов II-IV пальцев руки.
- Тендосиновиты.

Цвета: ярко-зеленый.

Размеры: S, M, L.

Подбор размеров

Для корректного подбора ортеза на лучезапястный и пястно-фаланговые суставы ORLETT WFG-100(P) необходимо сантиметровой лентой измерить окружность лучезапястного сустава и длину кисти от лучезапястного сустава до кончика 3-го пальца.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

[illegible]