



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Бандаж на шейный отдел позвоночника Шина Шанца (БН6-53) (4/5)



## Бандаж на шейный отдел позвоночника Шина Шанца (БН6-53) (4/5)





Артикул: БН6-53

[Предыдущий](#)  
[Следующий](#)

## Описание

Бандаж на шейный отдел позвоночника (шина Шанца) ORLETT БН6-53 предназначен для фиксации и стабилизации шейного отдела позвоночника. Бандаж обеспечивает правильное положение шеи и нормальную работу мышечно-связочного аппарата, что нормализует кровообращение шейного отдела позвоночника и головного мозга и препятствует нарушению нервной проводимости.

Нормализация кровообращения и проводимости нервных импульсов в сочетании с фиксацией шеи в правильном положении обеспечивают максимально эффективную реабилитацию и сокращают сроки лечения, позволяя надолго сохранить достигнутый результат.

Степень фиксации: средняя.

Линейка: Junior Line.

Состав:

- Основа: 100% пенополиуретан.
- Чехол: 100% хлопок.

## Показания

- Реабилитация после травм и операций в области шейного отдела позвоночника.
- Выраженный болевой синдром при остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях шейного отдела позвоночника (показатель боли не ниже 35-40% по ВАШ (визуально-аналоговой шкале)).
- Вертебробазилярная недостаточность.

**Цвета:** ярко-зеленый.

Размеры: 4, 5 (для детей до 1 года).

## Подбор размеров

Для корректного подбора бандажа на шейный отдел позвоночника ORLETT БН6-53 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность шеи и расстояние от угла нижней челюсти до середины ключицы.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер бандажа ORLETT.



</div>  
</div>