




Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

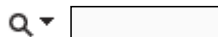

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Поясничный корсет с пластиковой рамой (LSO-981)



Изделия протезно-ортопедические: Поясничный корсет с пластиковой рамой (LSO-981)





Артикул: LSO-981

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Ортопедический корсет ORLETT LSO-981 используется для фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника. Корсет позволяет минимизировать нагрузку на тела позвонков, что особенно важно при лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний. Ортез имеет малый вес при сохранении фиксирующих свойств, что делает его незаменимым при лечении длительно текущих заболеваний позвоночника.

Степень фиксации: полная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 30% полиамид, 13% полиуретан, 5% хлопок, 3% полиэстер, 40% акрилонитрилбутадиенстирол, 7% сталь, 2% полипропилен.

Показания

- Иммобилизация после травм и оперативных вмешательств на поясничном и крестцовом отделах позвоночника.
- Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника.
- Спондилолистез.
- Спондилопатии.
- Грыжи межпозвонковых дисков.

Цвета: черный.

Размеры: S, M, L, XL.

Подбор размеров

Для корректного подбора размера ортопедического жесткого корсета ORLETT LSO-981 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность талии и бедер. Сумма окружностей талии и бедер делится пополам.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер корсета ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

Таблица подбора размеров:

