



никамед



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

🔍

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические на верхние конечности: Эластичный бандаж на лучезапястный сустав (MWR-102)



Изделия протезно-ортопедические на верхние конечности: Эластичный бандаж на лучезапястный сустав (MWR-102)



Артикул: MWR-102

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Бандаж на лучезапястный сустав ORLETT MWR-102 обеспечивает легкую степень фиксации и компрессию лучезапястного сустава, способствуя уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей лучезапястной области. Выполнен из современного материала, состоящего из особых полиэфирных волокон с четырехлепестковым поперечным сечением, которые обеспечивают активную транспортировку влаги с поверхности кожи на внешнюю поверхность бандажа.

Степень фиксации: легкая.

Линейка: Medical Line.

Состав: 32% полиэстер, 30% хлопок, 23% латекс, 15% эластан.

Показания

- Травмы: ушибы, растяжения связок лучезапястного сустава.
- Профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний лучезапястного сустава (артритов, тендинитов, тендовагинитов).

- Занятия теннисом.
- Производственные нагрузки на запястье (вибрация, вращение, подъем тяжестей).

Цвета: бежевый.

Размеры: S, M, L, XL.

Подбор размеров

Для корректного подбора бандажа на лучезапястный сустав ORLETT MWR-102 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность лучезапястного сустава.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер бандажа ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	S	M	L	XL
ОКРУЖНОСТЬ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА, CM	15-17	17-19	19-22	>22



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



Версия для печати

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

[Обратная связь](#)



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.



